

MÈRE UTILISATION DE L'APPLICATION NEWCARD : TÉLÉCHARGER, CONNECTER, COMMENCER




Bienvenue dans votre guide simple et rapide pour démarrer avec Newcard !

Étape 1 : Vérifier que le bluetooth de votre téléphone est activé



Étape 2 : Télécharger l'application Newcard depuis le Play Store

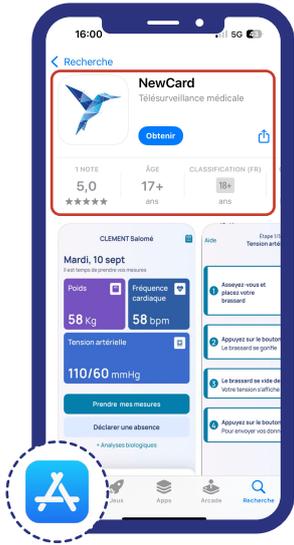

1 Ouvrir l'App Store sur votre appareil



2 Rechercher Newcard dans la barre de recherche



3 Télécharger l'application en cliquant sur

Obtenir

4 Confirmer le téléchargement

Étape 3 : Créer votre compte sur l'application

5 Ouvrir l'application depuis votre écran d'accueil



6 Cliquer sur :

Première connexion


pour commencer l'inscription

7 Entrer votre identifiant reçu par sms :
7 caractères. Ex : ef2702e

Mémoisez votre identifiant

Cliquer ensuite sur :

Continuer

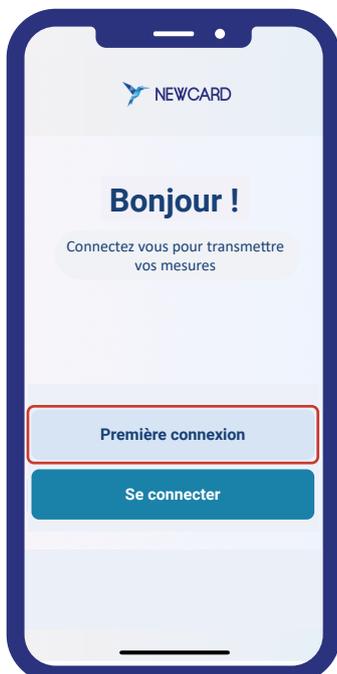


Je note mon identifiant

.....




8 Saisir le code de validation SMS envoyé sur votre téléphone (6 chiffres)

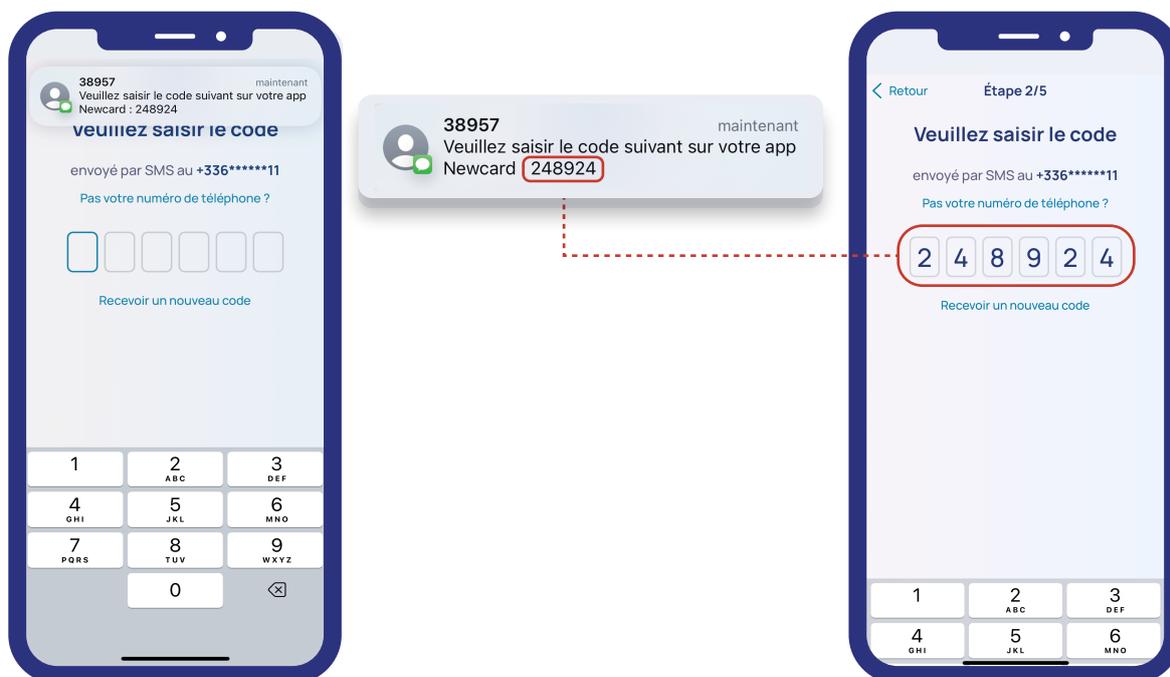

9 Créer un mot de passe sécurisé, qui doit contenir :

- ✓ Au moins 8 caractères
- ✓ Au moins une majuscule
- ✓ Au moins un caractère spécial (ex : #?!@\$%^&*~)
- ✓ Au moins un chiffre

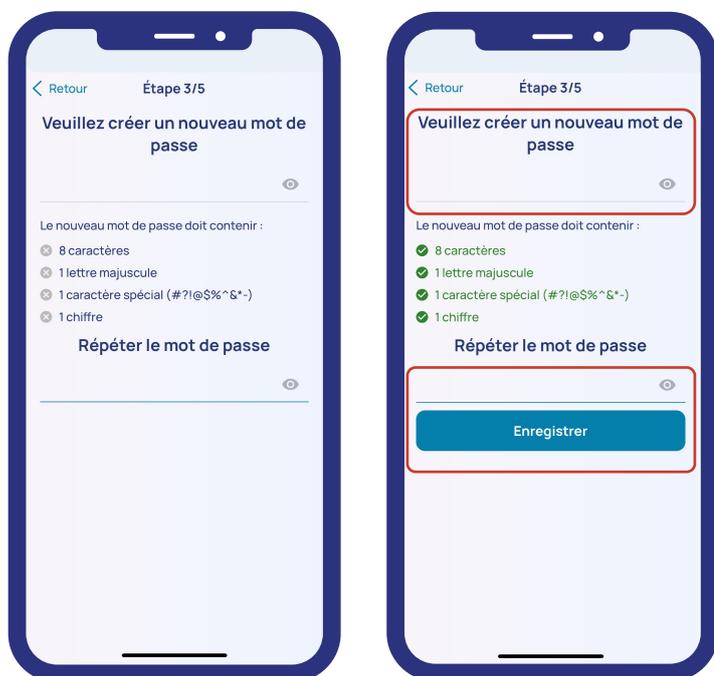

Je note mon mot de passe



Astuce : Garder bien en mémoire votre identifiant patient et mot de passe, vous en aurez besoin pour vous connecter à l'application chaque jour.

10 Finaliser l'inscription en cliquant sur

Enregistrer

Félicitations, votre compte est créé !

Étape 4 : Accepter les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)



11 Lire attentivement les Conditions Générales d'utilisation et descendre en bas de la page, ↓ Descendre en bas de page ↓


12 Cliquer sur **Accepter** pour valider.

Étape 5 : Connecter / Configurer le kit Newcard (balance + tensiomètre)

! **Préparer vos appareils** : Vérifier que les piles sont bien insérées dans le tensiomètre et la balance.



4 piles AAA

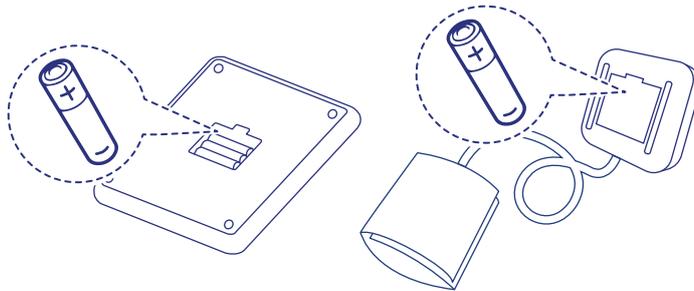

Étape 6 : Autoriser Newcard à utiliser le Bluetooth de votre téléphone

13 Cliquer sur : **Accéder à mes paramètres**

Allumez le bluetooth dans les paramètres de votre téléphone



Accéder à mes paramètres

Utiliser mon propre matériel

14 Cliquer sur : **Autoriser**



15 Cliquer sur : **Autoriser**



Étape 7 : Connecter le tensiomètre :


16 Cliquer sur :

Continuer

dans l'application



17 Appuyer sur le bouton du tensiomètre physique

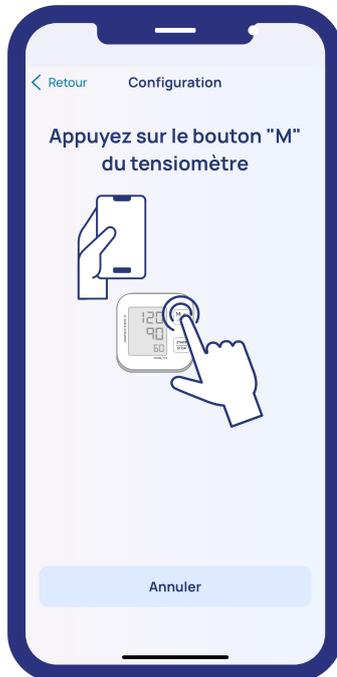

✓ BRAVO !
« Tensiomètre connecté avec succès »

Cliquer sur :

Continuer



Étape 8 : Connecter la balance :


18

✓ BRAVO ! « Balance connecté avec succès »

Cliquer sur :


Continuer

dans l'application

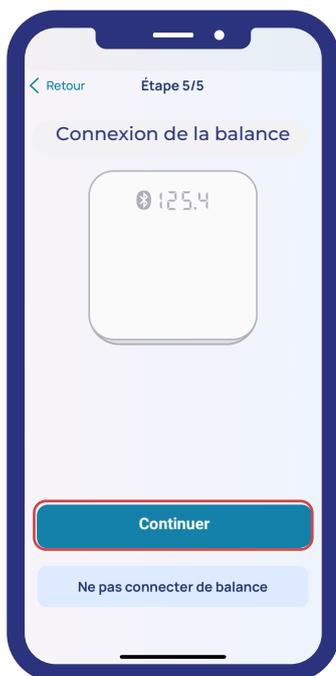

Cliquer sur :


Terminer

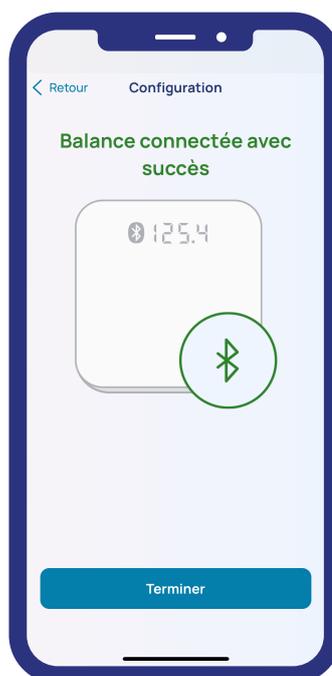


Félicitations, vous êtes prêt pour vos premières mesures !

 **Astuce :**

19 Se rendre dans l'onglet Paramètres (en bas à droite de l'écran)

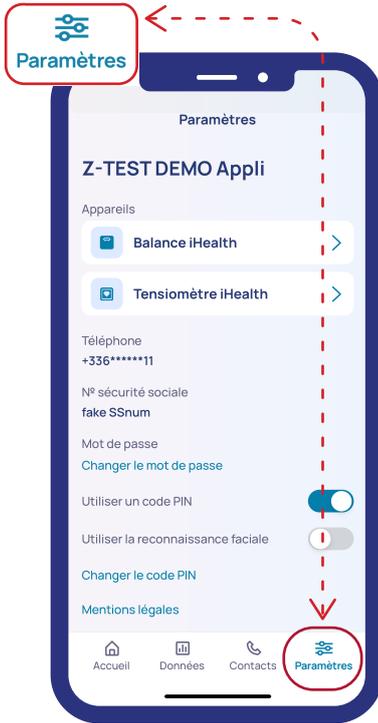

20 Activer l'option utiliser un code PIN et taper sur le bouton

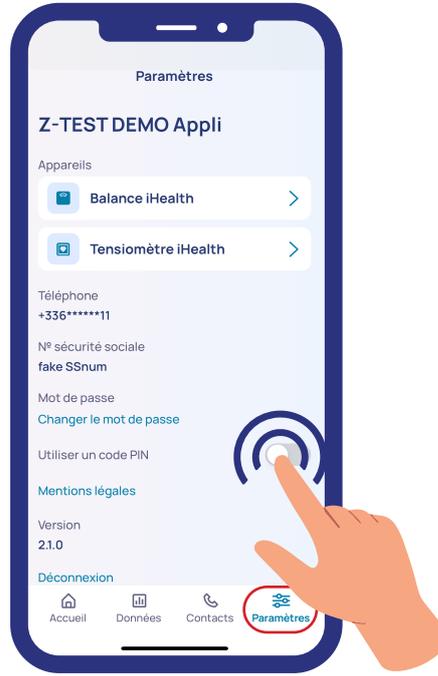


21 Créer un code PIN : Saisissez un code PIN à 4 chiffres, puis confirmez-le en le répétant





Félicitations ! Votre code PIN est activé !

 **Astuce : Pour ne pas utiliser le code PIN activer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale (optionnel, si votre téléphone le permet)**

22 Dans le même menu Paramètres, activer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale en glissant le bouton correspondant.

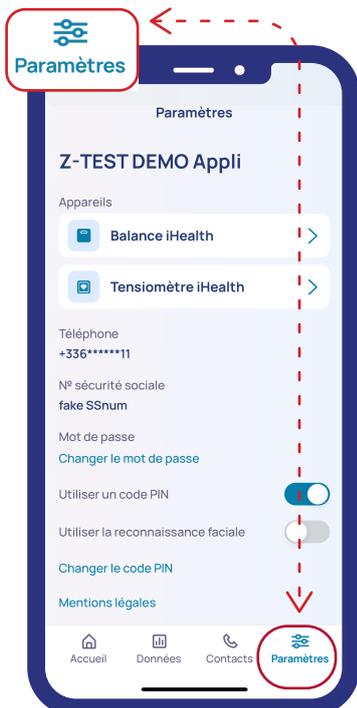

23 Suivre les instructions pour configurer Face ID ou Touch ID.

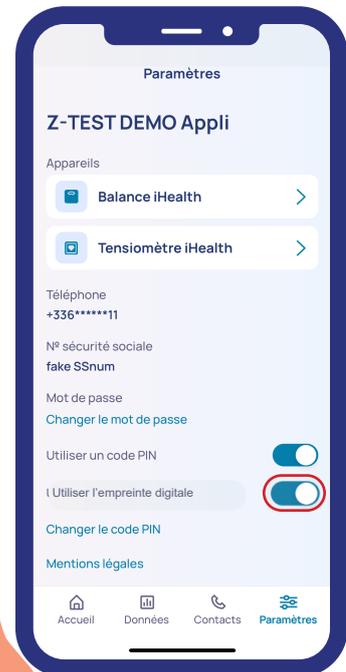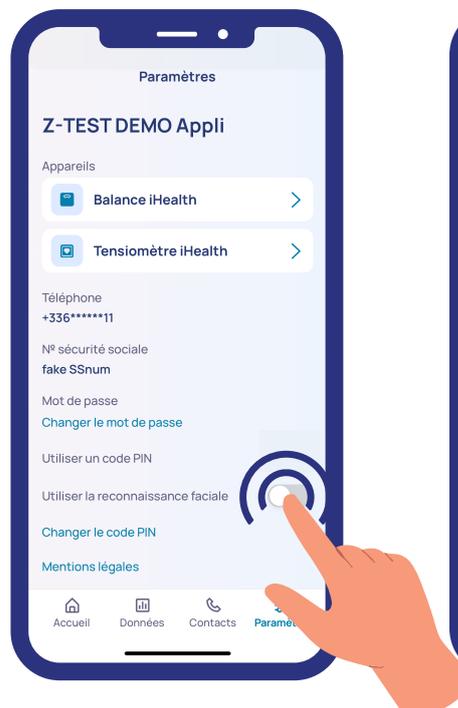


Votre connexion sera encore plus rapide et sécurisée !

Étape 9 : Se connecter

24 Cliquer sur :

Se connecter

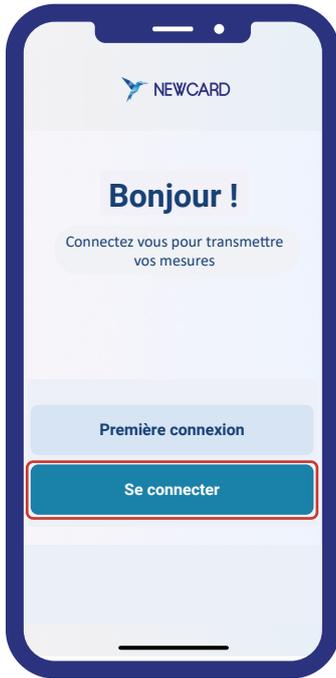

25 Enter votre identifiant et votre mot de passe



26 Saisir le code PIN

OU



Besoin d'aide ? N'hésitez pas à demander à vos proches, votre aide à domicile ou votre voisin !

 Téléphone :
03 20 14 71 14



1 Minute pour mon coeur :
cardio@newcard.io



1 Minute pour mes reins :
nephro@newcard.io

Création par NEWCARD SAS. – Ne pas jeter sur la voie publique – Référence : NEW-NTI-APP-APL-00.
Date de création : 15 mai 2025.

Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (2019).
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.