

1

Allumer la tablette
Sélectionner l'application
Newcard



2

Sélectionner
"Se connecter"



3

Saisir **son identifiant**
et **son mot de passe**



4

Sélectionner
le patient dans
la liste



5

Sélectionner
"Prendre mesures"



6

Prendre la tension du patient


En **4 étapes** :



1. Passer le brassard autour du **bras gauche**
2. Le **bandeau rouge** doit être placé à l'intérieur du pli du coude
3. Placer le bras gauche sur une table, la paume de la main orientée vers le ciel

7

Transmettre la tension
Appuyer sur le **bouton M**

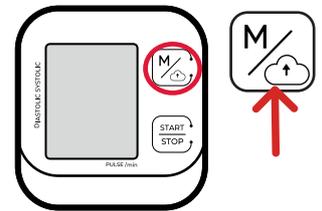

8

Peser le patient avec
la **balance Newcard**

Le poids s'envoie automatiquement à la tablette.



OU

Peser le patient avec la
balance de l'établissement de santé

Cliquez sur :


**Saisissez votre poids
manuellement**

et saisir le poids du patient



9


Répondre
aux questions

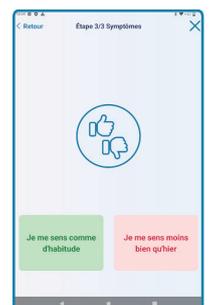

10

Envoyer les données



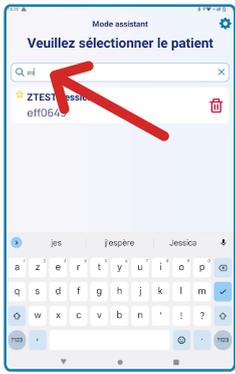

Rechercher un patient

Saisir le nom ou le prénom du patient dans la barre de recherche



Mettre un patient en favori

Cliquer sur l'étoile jaune : ★ les patients favoris remontent en haut de la liste des patients

Ajouter un patient dans la liste


Le cardiologue doit avoir inclus le patient au préalable (dans les critères du droit commun)

Aller sur la fiche patient dans la plateforme newcard et noter les 7 derniers caractères du lien web

Cliquez sur : « **Ajouter un patient** »




Renseigner les 7 caractères dans l'application et associer le patient

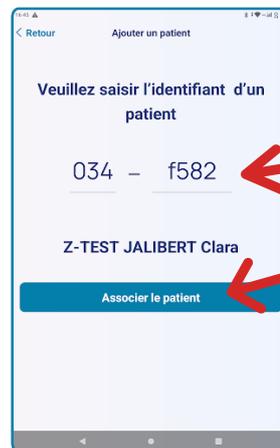


Retirer un patient de la liste

Cliquer sur : 

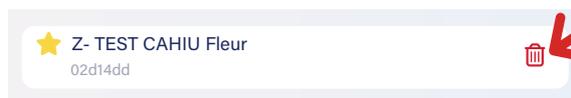

Cliquer sur : « **Oui, dissocier** »

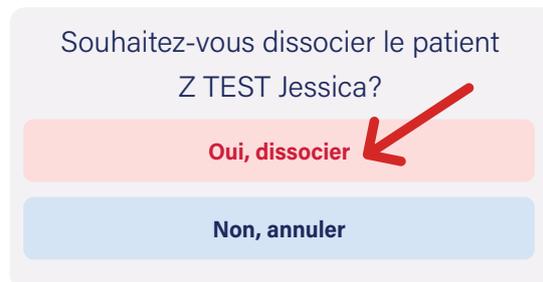

CONTACT :



Téléphone
03 20 14 71 14



SMS
07 57 90 27 24



Mail
cardio@newcard.io



Certification de conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques



Toutes les données de santé sont hébergées sur un serveur certifié HDS par ATE en France

CE DM de classe I, marqué CE au titre de la Directive 93/42/CEE

Création par : NEWCARD SAS, SIRET 821 766 961 R.C.S Lille Métropole
Imprimé par : Corep - Ne pas jeter sur la voie publique - Référence : MPC-NTU-MAS-00 - Date de création : 8 février 2024
Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.



NEWCARD

Parc du Moulin
391 Av. Clément Ader
59118 Wambrechies
www.newcard.fr