

1ÈRE UTILISATION DE L'APPLICATION NEWCARD : TÉLÉCHARGER, CONNECTER, COMMENCER





Bienvenue dans votre guide simple et rapide pour démarrer avec Newcard !

Étape 1 : Vérifier que le bluetooth de votre téléphone est activé



Étape 2 : Télécharger l'application Newcard depuis le Play Store

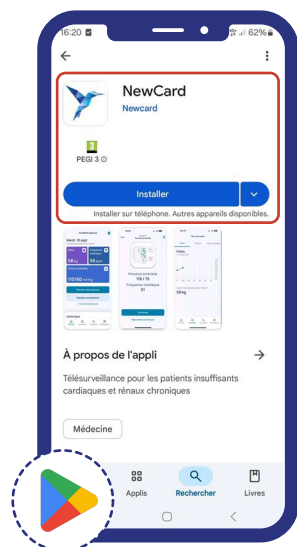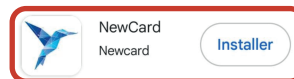

1 Ouvrir le Play Store sur votre appareil



2 Rechercher Newcard dans la barre de recherche



3 Télécharger l'application en cliquant sur



4 Confirmer le téléchargement

Étape 3 : Créer votre compte sur l'application

5 Ouvrir l'application depuis votre écran d'accueil



6 Cliquer sur :


Première connexion
pour commencer l'inscription

7 Entrer votre identifiant reçu par sms :
7 caractères. Ex : ef2702e

Mémoisez votre identifiant


Cliquer ensuite sur :

Continuer

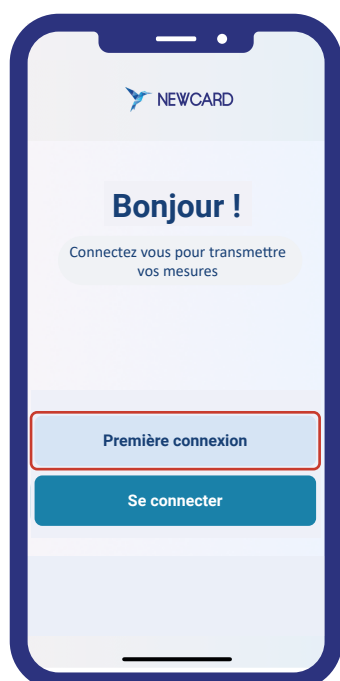


Je note mon identifiant

.....

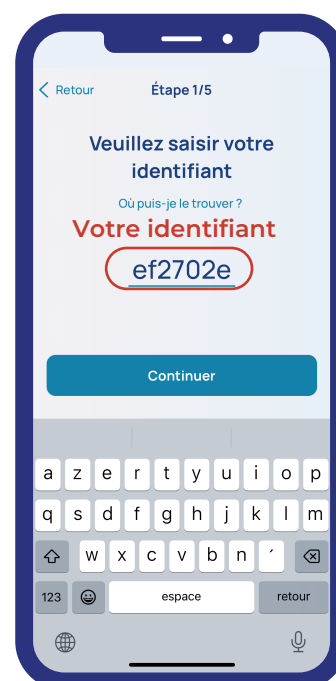


8 Saisir le code de validation SMS envoyé sur votre téléphone (6 chiffres)

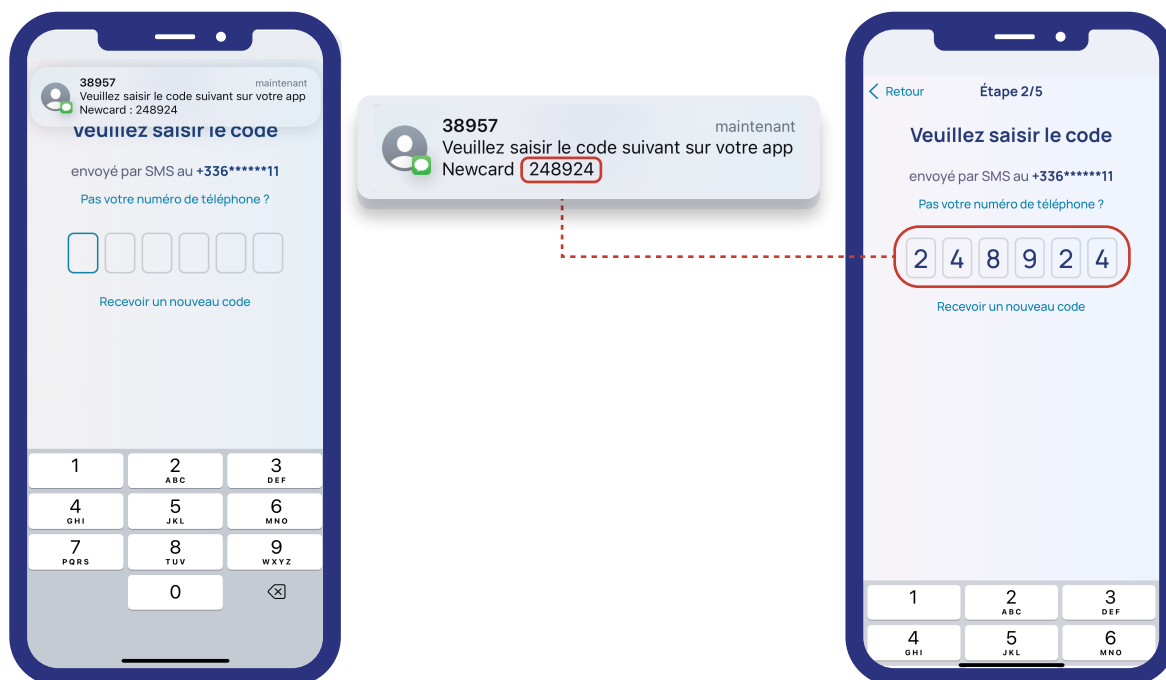

9 Créer un mot de passe sécurisé, qui doit contenir :

- ✓ Au moins 8 caractères
- ✓ Au moins une majuscule
- ✓ Au moins un caractère spécial (ex : #?!@\$%^&*~)
- ✓ Au moins un chiffre

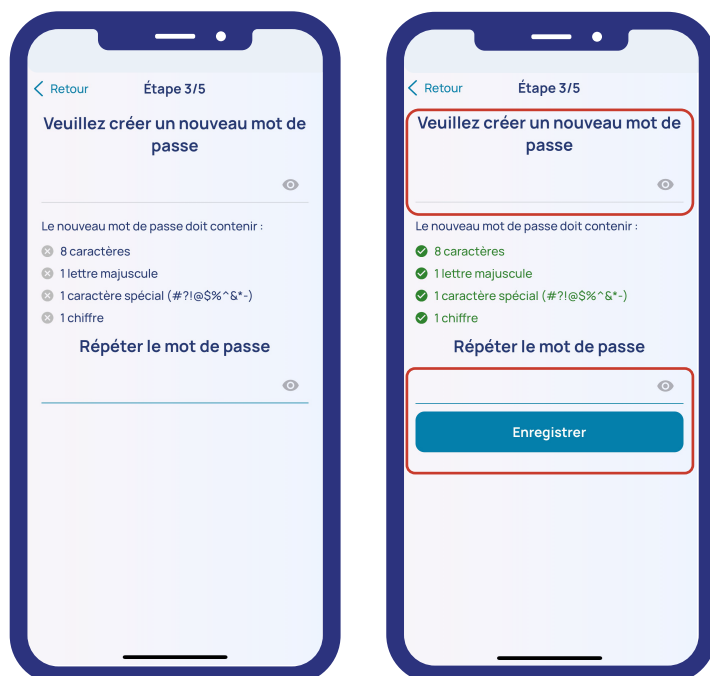

Je note mon mot de passe




Astuce : Garder bien en mémoire votre identifiant patient et mot de passe, vous en aurez besoin pour vous connecter à l'application chaque jour.

10 Finaliser l'inscription en cliquant sur **Enregistrer**

Félicitations, votre compte est créé !

Étape 4 : Accepter les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

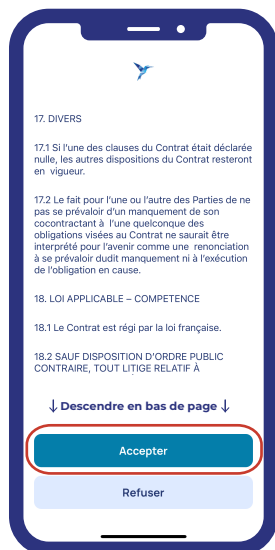


11 Lire attentivement les Conditions Générales d'utilisation et descendre en bas de la page, ↓ Descendre en bas de page ↓

12 Cliquer sur **Accepter** pour valider.


Étape 5 : Connecter / Configurer le kit Newcard (balance + tensiomètre)

! **Préparer vos appareils** : Vérifier que les piles sont bien insérées dans le tensiomètre et la balance.

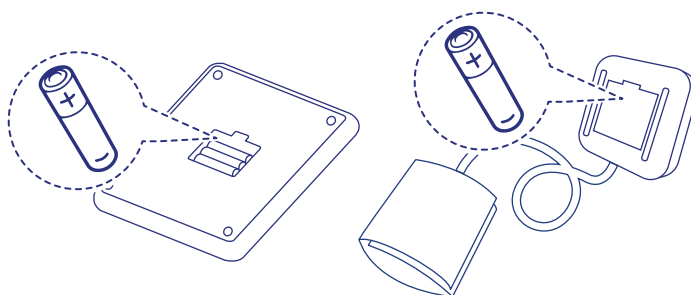


Étape 6 : Autoriser Newcard à utiliser le Bluetooth de votre téléphone

13 Cliquer sur :
Accéder à mes paramètres

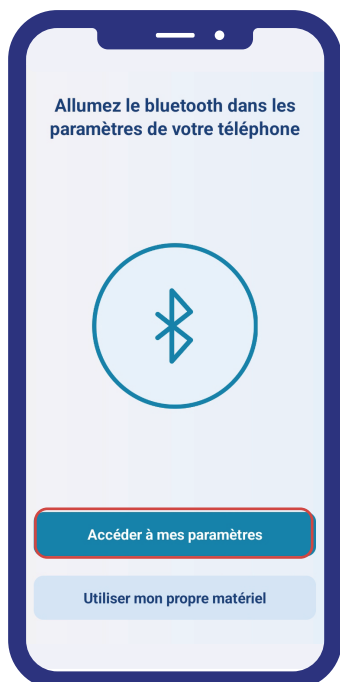

14 Cliquer sur :
Autoriser

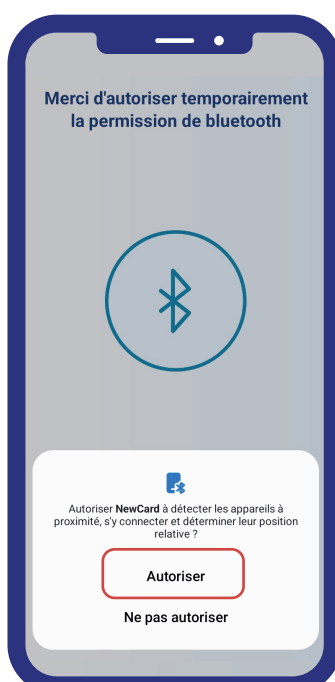

15 Cliquer sur :
D'accord




Étape 7 : Connecter le tensiomètre :

- 16 Cliquer sur :
Continuer
dans l'application




- 17 Appuyer sur le bouton
du tensiomètre physique

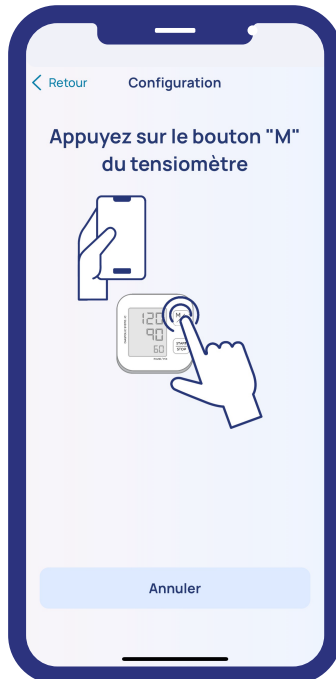

- ✓ **BRAVO !**
« Tensiomètre connecté
avec succès »

Cliquer sur :

Continuer

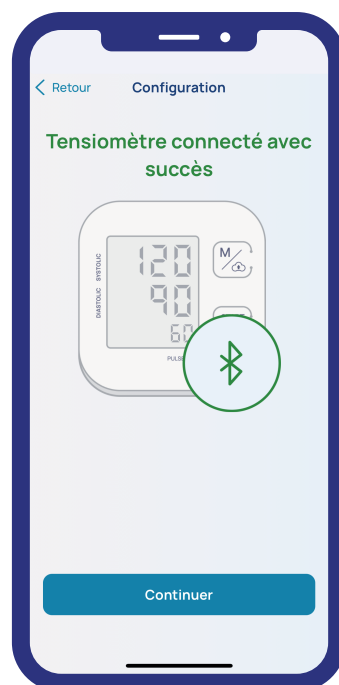


Étape 8 : Connecter la balance :

18

- ✓ **BRAVO !** « Balance connecté avec succès »



Cliquer sur :
Continuer
dans l'application

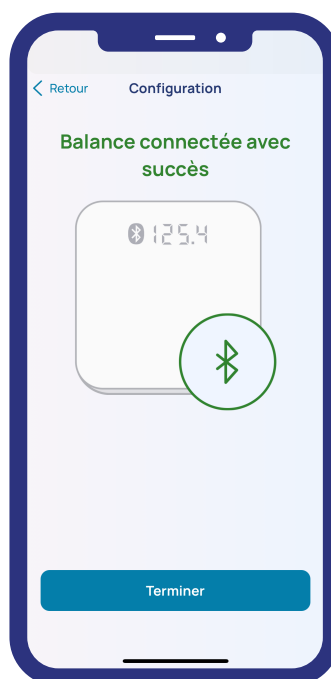


Cliquer sur :
Terminer

Félicitations, vous êtes prêt pour vos premières mesures !

 **Astuce :**


- 19** Se rendre dans l'onglet Paramètres (en bas à droite de l'écran)
- 20** Activer l'option utiliser un code PIN et taper sur le bouton
- 21** Créer un code PIN : Saisissez un code PIN à 4 chiffres, puis confirmez-le en le répétant

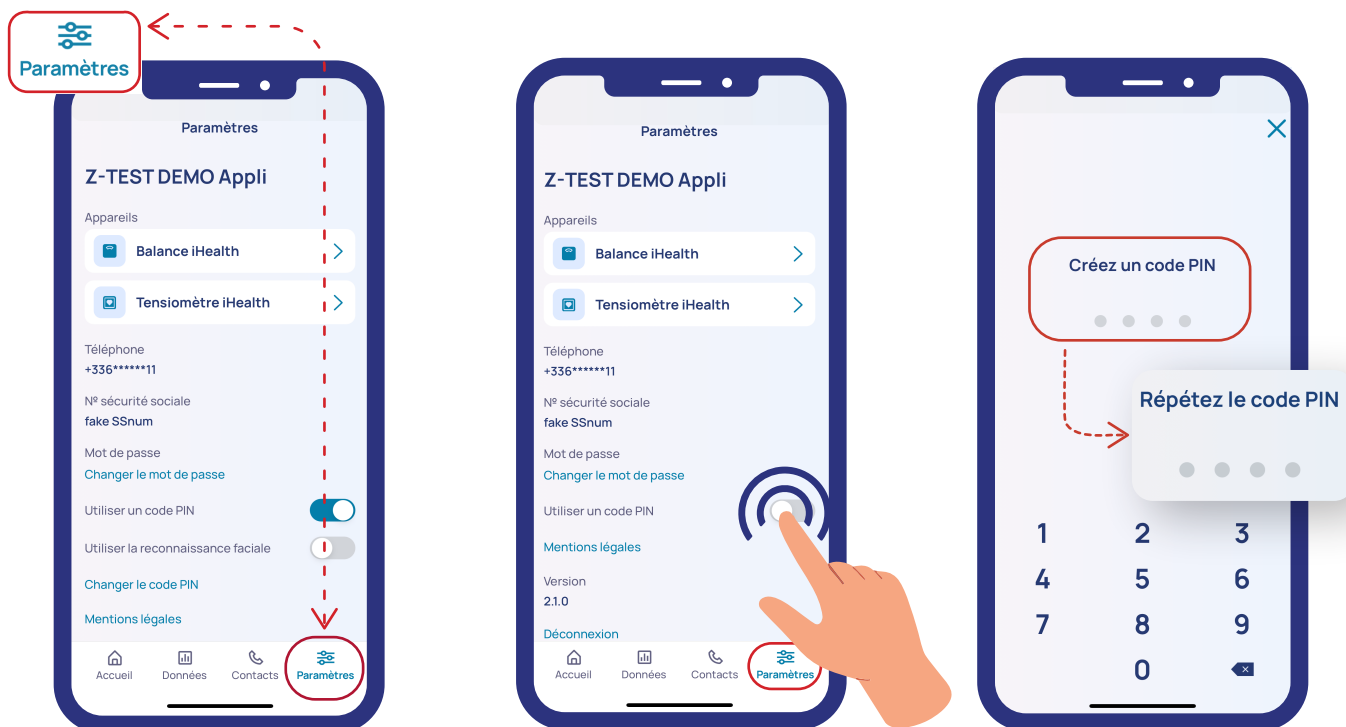

Félicitations ! Votre code PIN est activé !

 **Astuce :** Pour ne pas utiliser le code PIN activer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale (optionnel, si votre téléphone le permet)

- 22** Dans le même menu Paramètres, activer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale en glissant le bouton correspondant.
- 23** Suivre les instructions pour configurer Face ID ou Touch ID.

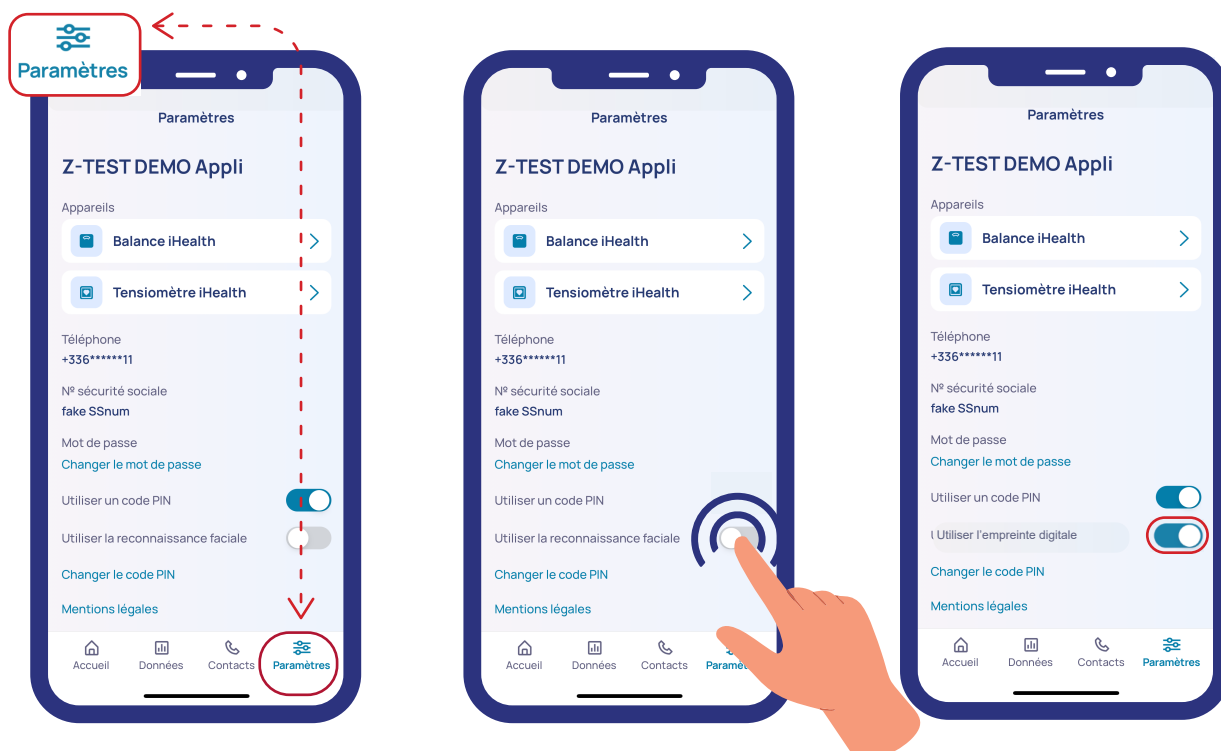


Votre connexion sera encore plus rapide et sécurisée !


Étape 9 : Se connecter

24 Cliquer sur :


Se connecter

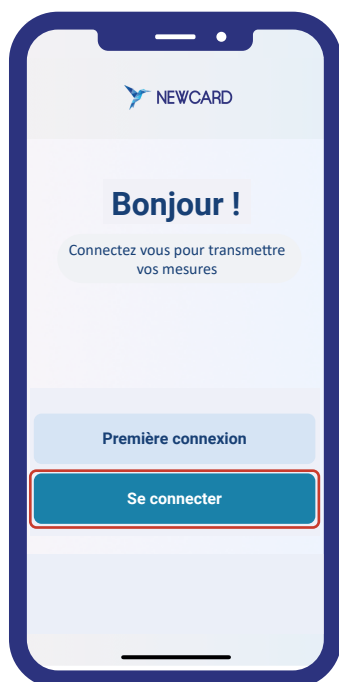

25 Enter votre identifiant et votre mot de passe

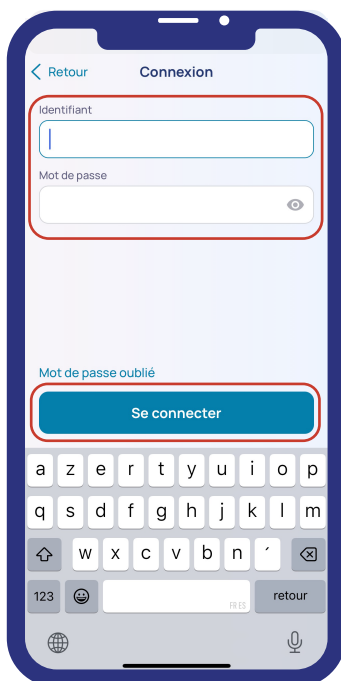

26 Saisir le code PIN

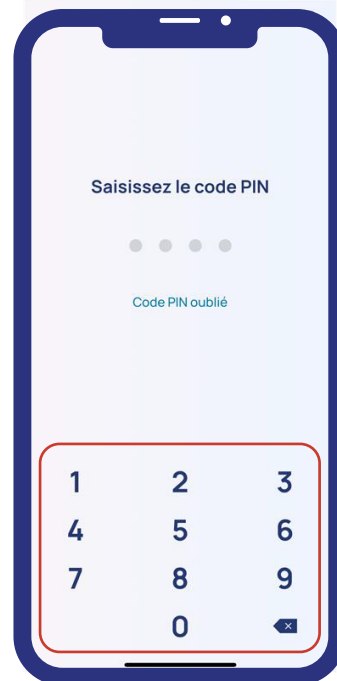

OU

Besoin d'aide ? N'hésitez pas à demander à vos proches,
votre aide à domicile ou votre voisin !



Téléphone :
03 20 14 71 14



1 Minute pour mon cœur :
cardio@newcard.io



1 Minute pour mes reins :
nephro@newcard.io

Création par NEWCARD SAS. – Ne pas jeter sur la voie publique – Référence : NEW-NTI-APP-AND-02.
Date de création : 15 mai 2025.

Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (2019).
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.