

1ÈRE UTILISATION DE L'APPLICATION NEWCARD : TÉLÉCHARGER, CONNECTER, COMMENCER




Bienvenue dans votre guide simple et rapide pour démarrer avec Newcard !

Étape 1 : Vérifier que le bluetooth de votre téléphone est activé



Étape 2 : Télécharger l'application Newcard : photographier le QR code

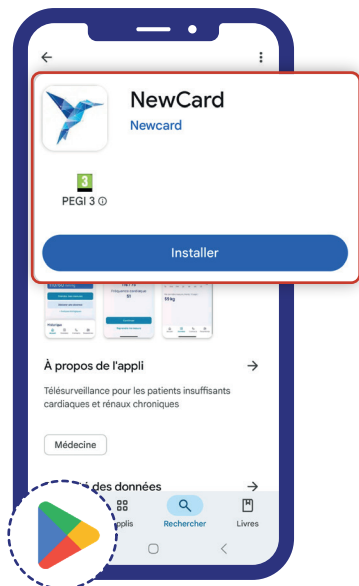

OU



- 1 Ouvrir le Play Store sur votre téléphone
- 2 Rechercher NewCard dans la barre de recherche
- 3 Télécharger l'application en cliquant sur
- 4 Confirmer le téléchargement



Installer

Étape 3 : Créer votre compte sur l'application

- 5 Ouvrir l'application NewCard




NewCard
📱 Installée

Désinstaller

Ouvrir

- 6 Cliquer sur :
- Première connexion**
pour commencer l'inscription

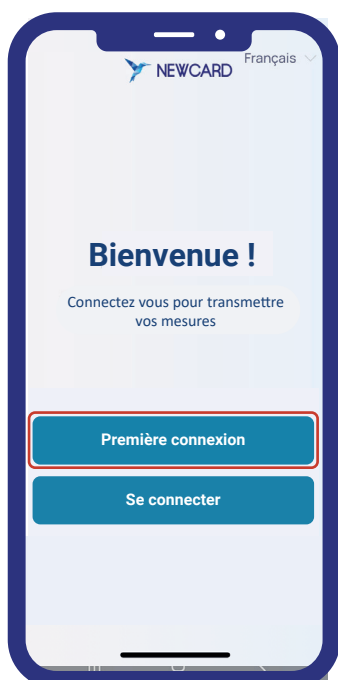

- 7 Entrer votre identifiant reçu par sms :
7 caractères. Ex : ef2702e




Félicitations, Newcard est sur
votre téléphone !
Cliquez sur "Première connexion"
et écrivez votre identifiant
ef2702e
...STOR 36035

Mémoriser votre identifiant

Je note mon identifiant


.....

8 Saisir le code de validation SMS envoyé sur votre téléphone (6 chiffres)

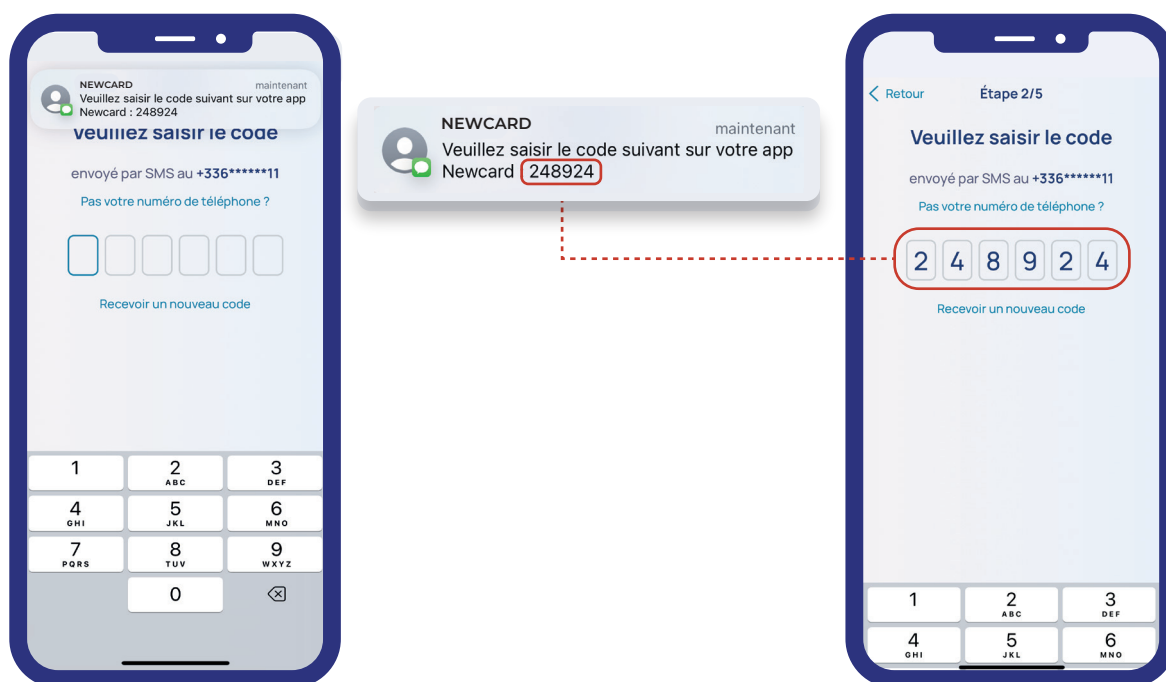

9 Créer un mot de passe sécurisé, qui doit contenir :

- ✓ Au moins 8 caractères
- ✓ Au moins une majuscule
- ✓ Au moins un caractère spécial (ex : # ? ! @ \$ % ^ & * -)
- ✓ Au moins un chiffre

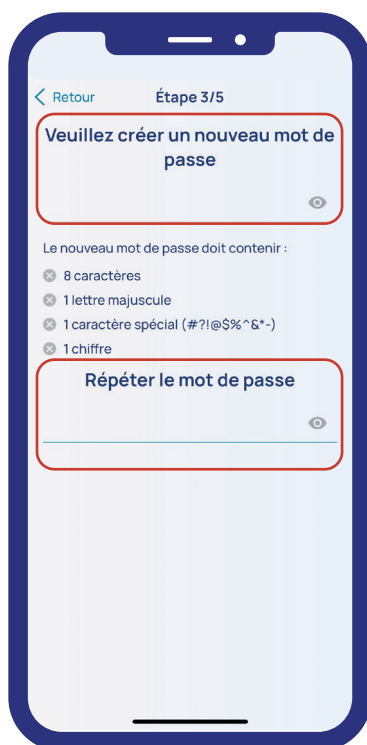

1. Créer un mot de passe

Je note mon mot de passe

.....

2. Répéter le mot de passe




Astuce : Garder bien en mémoire votre identifiant patient et mot de passe, vous en aurez besoin pour vous connecter à l'application chaque jour.

10 Enregistrer le mot de passe en cliquant sur :

Enregistrer

Étape 4 : Création du code secret

11 Créer un code secret (PIN) : code à 4 chiffres

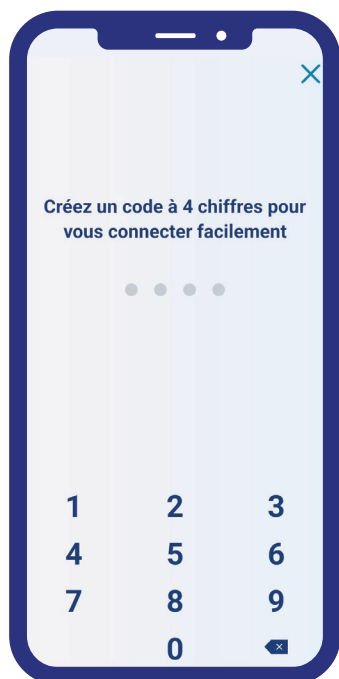


12 Confirmez-le à nouveau



Félicitations ! Votre compte est créé !

Étape 5 : Accepter les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

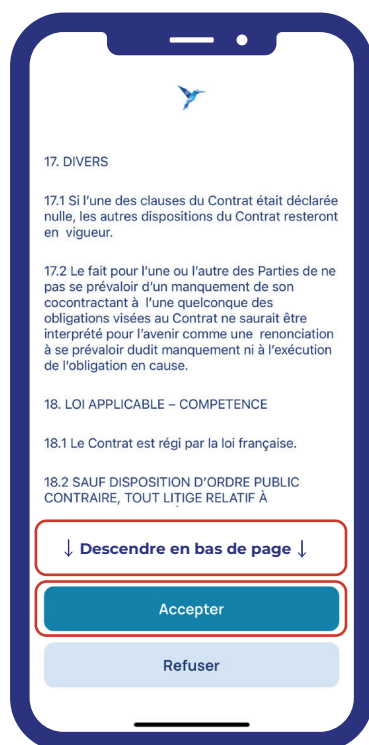


14 Lire attentivement les Conditions Générales d'utilisation et descendre en bas de la page, [↓ Descendre en bas de page ↓](#)

15 Cliquer sur [Accepter](#) pour valider.


Étape 6 : Connecter / Configurer le kit Newcard (balance + tensiomètre)

! Préparer vos appareils : Vérifier que les piles sont bien insérées dans le tensiomètre et la balance.

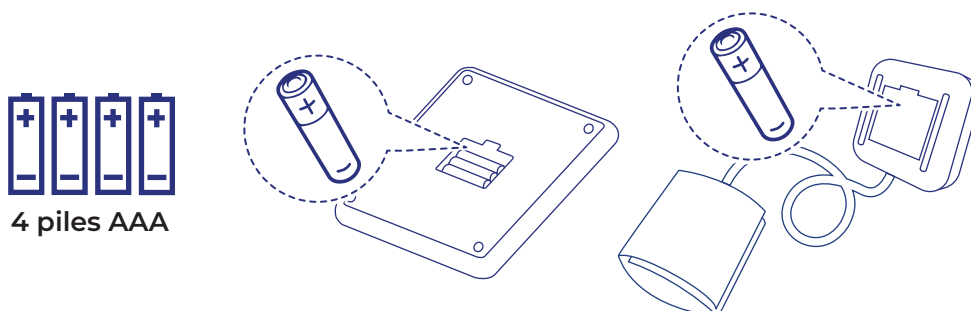


Étape 7 : Autoriser Newcard à utiliser le Bluetooth de votre téléphone

16 Cliquer sur :
Accéder à mes paramètres

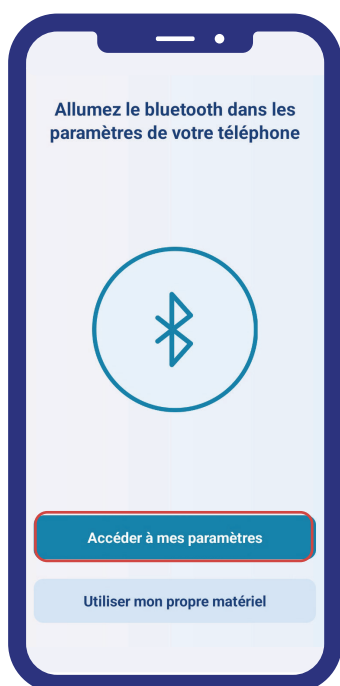

17 Cliquer sur :
Autoriser

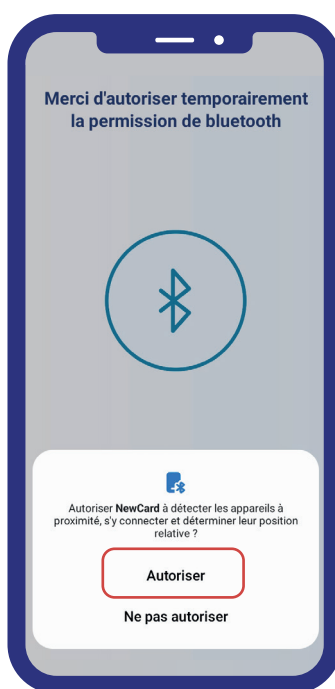

18 Cliquer sur :
D'accord




Étape 8 : Connecter le tensiomètre :

- 19 Cliquer sur :
Continuer
dans l'application



- 20 Appuyer sur le bouton
du tensiomètre physique

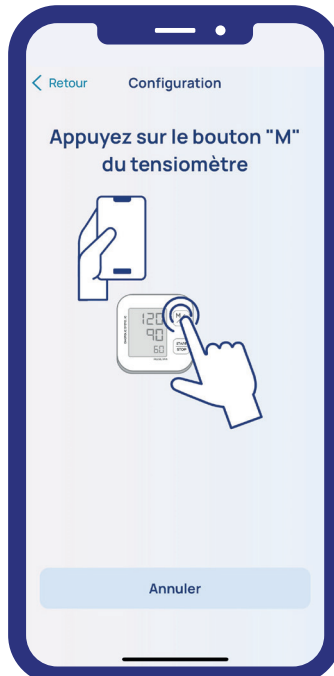

- ✓ **BRAVO !**
« Tensiomètre connecté
avec succès »

Cliquer sur :

Continuer



Étape 9 : Connecter la balance :

21

- ✓ **BRAVO !** « Balance connectée
avec succès »



Cliquer sur :
Continuer
sur votre téléphone



Cliquer sur :
Terminer

Félicitations, vous êtes prêt pour vos premières mesures !

Étape 10 : Mesurer votre poids et votre tension artérielle


22 Cliquer sur : **Prendre ses mesures** et suivre les instructions



Besoin d'aide ?

N'hésitez pas à demander à vos proches, votre aide à domicile ou votre voisin

OU En cas de fermeture de l'application cliquer sur : **Se connecter**

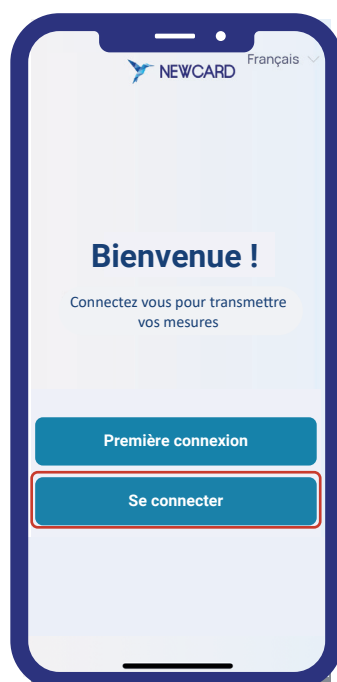

 Téléphone :
03 20 14 71 14



1 Minute pour mon coeur :
cardio@newcard.io



1 Minute pour mes reins :
nephro@newcard.io

Création par NEWCARD SAS. – Ne pas jeter sur la voie publique – Référence : NEW-NTI-APP-AND-03.

Date de création : 06 juin 2025.

Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (2019). Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.