


1ÈRE UTILISATION DE L'APPLICATION NEWCARD : TÉLÉCHARGER, CONNECTER, COMMENCER



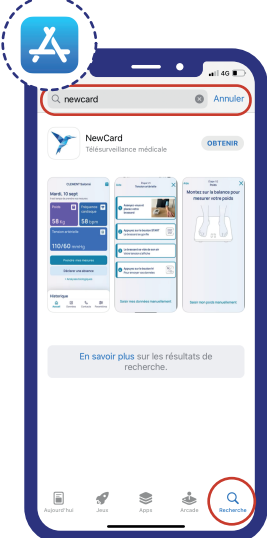


Bienvenue dans votre guide simple et rapide pour démarrer avec Newcard !

Étape 1 : Télécharger l'application Newcard depuis l'App Store



The screenshot shows the App Store search results for 'NewCard'. The app is listed with its icon and a description. A red circle highlights the search bar at the top, and another red circle highlights the 'Recherche' (Search) icon in the bottom dock.

- 1 Ouvrir l'App Store sur votre appareil 
- 2 Rechercher Newcard dans la barre de recherche 
- 3 Télécharger l'application en cliquant sur **OBTENIR** 
- 4 Confirmer le téléchargement

Étape 2 : Créer votre compte sur l'application

1

Ouvrir l'application depuis votre écran d'accueil




2

Cliquer sur :
Continuer
pour commencer l'inscription


3

Enter votre identifiant patient reçu par email :
7 caractères. **Ex : ef2702e**
Mémoisez votre identifiant patient
Cliquer ensuite sur : **Continuer**

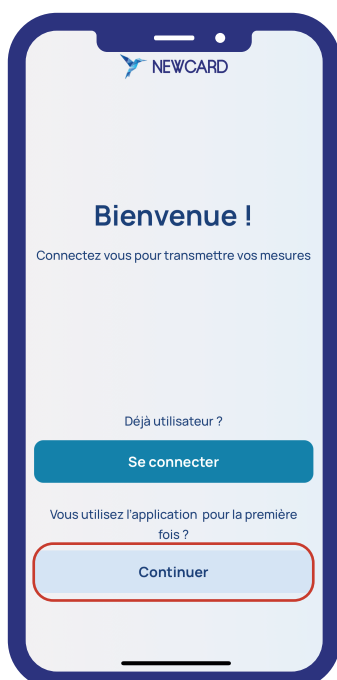

4

Saisir le code de validation SMS envoyé sur votre téléphone (6 chiffres)

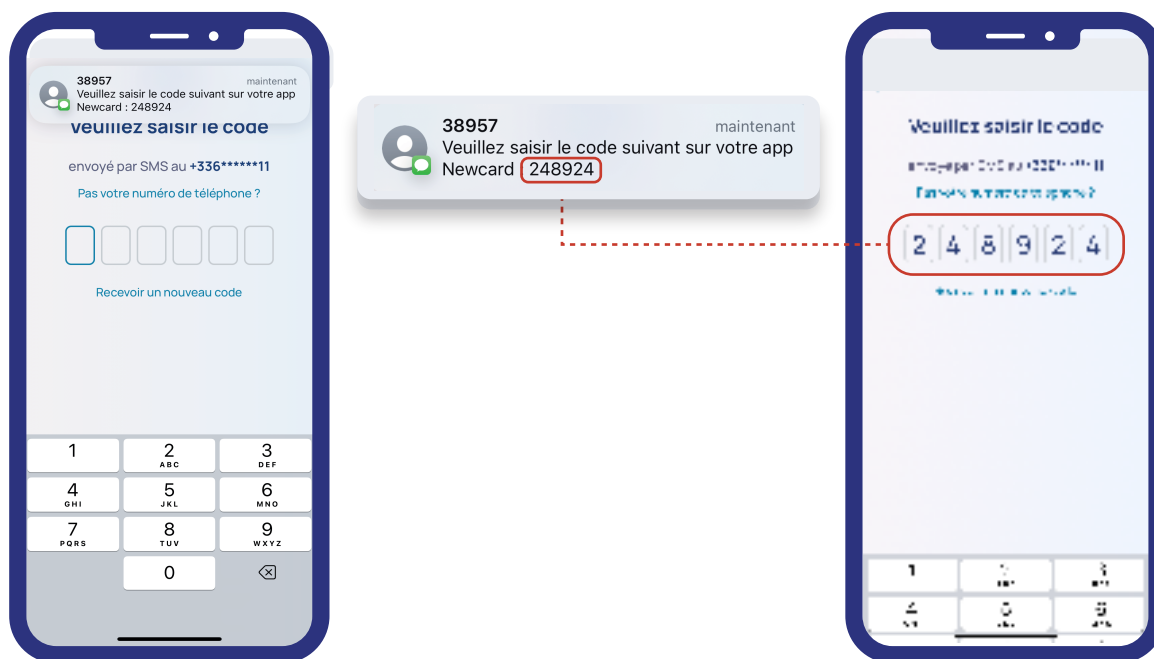

5

Créer un mot de passe sécurisé



Astuce : Garder bien en mémoire votre identifiant patient et mot de passe, vous en aurez besoin pour vous connecter à l'application chaque jour.


6

Finaliser l'inscription en cliquant sur

Enregistrer

Félicitations, votre compte est créé !


Étape 3 : Accepter les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

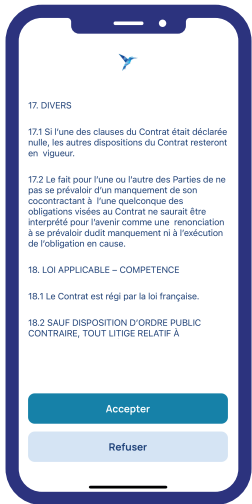

- 1 Lire attentivement les Conditions Générales d'utilisation et descendre en bas de la page, ↓ **Descendre en bas de page** ↓
- 2 Cliquer sur **Accepter** pour valider.

Étape 4 : Connecter / Configurer le kit Newcard (balance + tensiomètre)

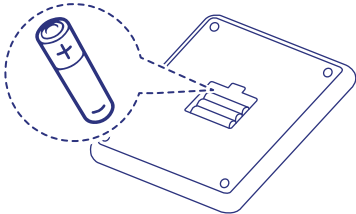

Préparer vos appareils : Vérifier que les piles sont bien insérées dans le tensiomètre et la balance.




Vérifier que le bluetooth de votre téléphone est activé




Connecter le tensiomètre :

- 1 Cliquer sur : **Connecter le tensiomètre Newcard** dans l'application
- 2 Appuyer sur le bouton  du tensiomètre
-  **BRAVO !**
« Tensiomètre connecté avec succès »
Cliquer sur : **Continuer**

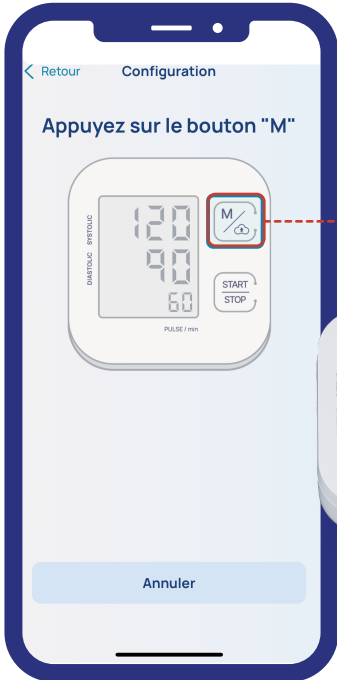

Connecter la balance :


1

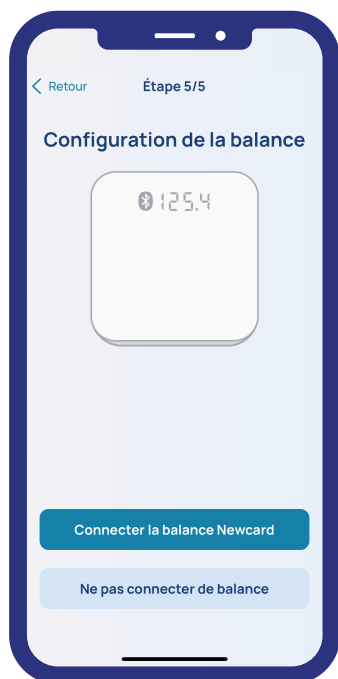

Cliquer sur :

Connecter la balance Newcard

dans l'application

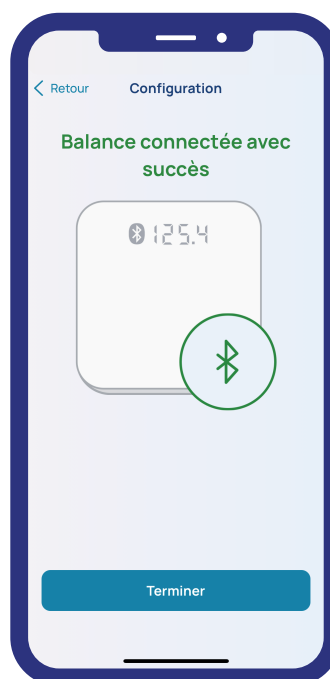

BRAVO !

« Balance connecté avec succès »

Cliquer sur :

Terminer


Félicitations, vous êtes prêt pour vos premières mesures !



Astuce :


1

Se rendre dans l'onglet **Paramètres** (en bas à droite de l'écran).

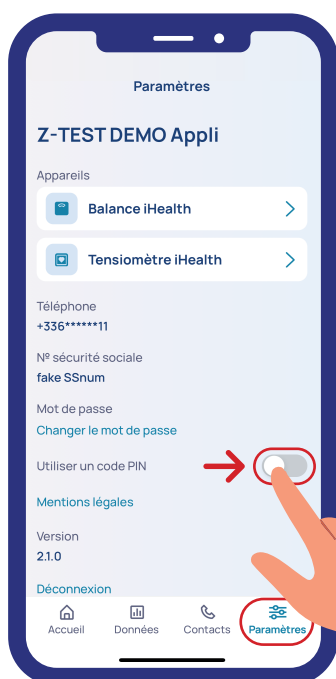

2

Activer l'option Utiliser un **code PIN** en faisant glisser le bouton vers la droite.

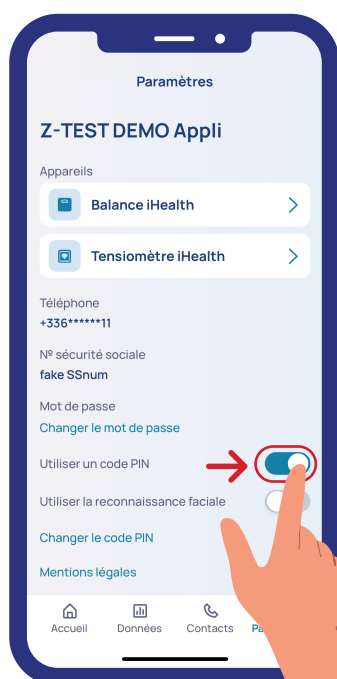

3

Créer un code PIN : Saisissez un code PIN à 4 chiffres, puis confirmez-le en le répétant




Félicitations ! Votre code PIN est activé !



Astuce : Pour ne pas utiliser le code PIN activer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale (optionnel, si votre téléphone le permet)


1

Dans le même menu Paramètres, activer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale en glissant le bouton correspondant.

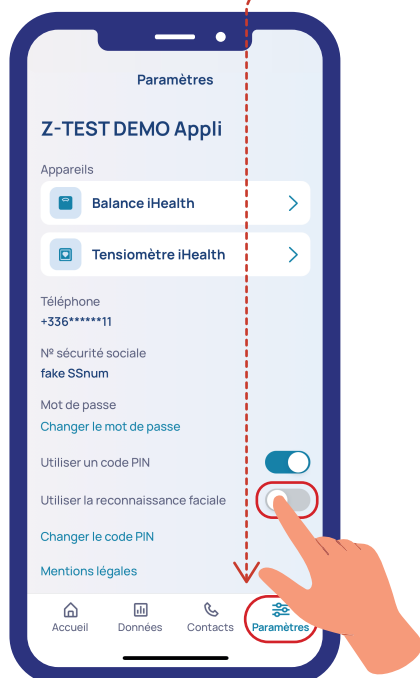

2

Suivre les instructions pour configurer Face ID ou Touch ID.

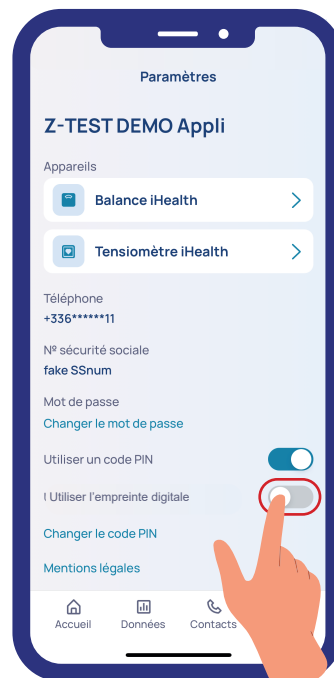

Votre connexion sera encore plus rapide et sécurisée !


Besoin d'aide ? N'hésitez pas à demander à vos proches, votre aide à domicile ou votre voisin !



1 MINUTE POUR
mon coeur



1 MINUTE POUR
mes reins

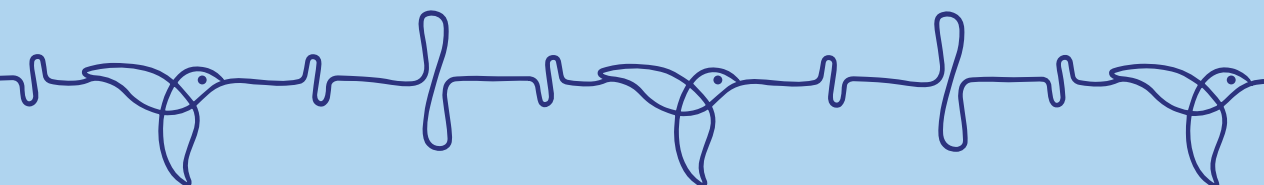

Téléphone :
03 20 14 71 14



1 Minute pour **mon coeur** :
cardio@newcard.io



1 Minute pour **mes reins** :
nephro@newcard.io