

1ÈRE UTILISATION DE L'APPLICATION NEWCARD : TÉLÉCHARGER, CONNECTER, COMMENCER





Bienvenue dans votre guide simple et rapide pour démarrer avec Newcard !

Étape 1 : Vérifier que le bluetooth de votre téléphone est activé



Étape 2 : Télécharger l'application Newcard depuis le Play Store

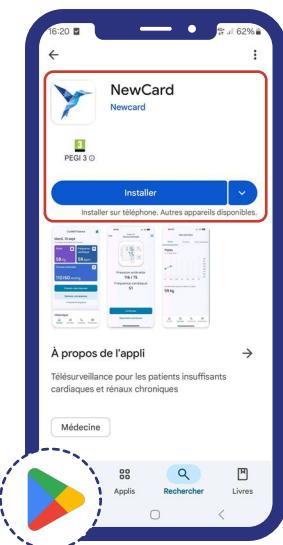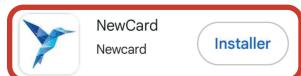

1 Ouvrir le Play Store sur votre appareil



2 Rechercher Newcard dans la barre de recherche



NewCard

3 Télécharger l'application en cliquant sur

Installer

4 Confirmer le téléchargement

Étape 3 : Créer votre compte sur l'application

5 Ouvrir l'application depuis votre écran d'accueil



6 Cliquer sur :

Continuer



pour commencer l'inscription

7 Entrer votre identifiant reçu par sms :
7 caractères. Ex : ef2702e


Mémorisez votre identifiant

Cliquer ensuite sur :

Continuer

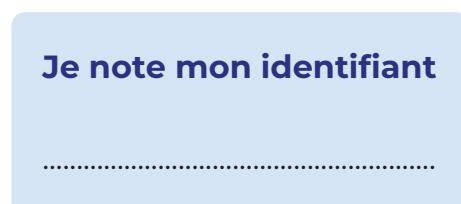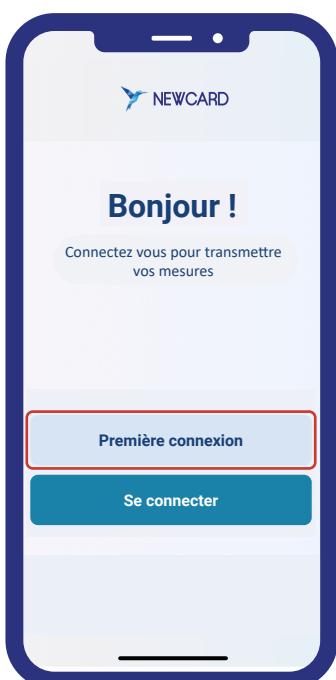


8 Saisir le code de validation SMS envoyé sur votre téléphone (6 chiffres)

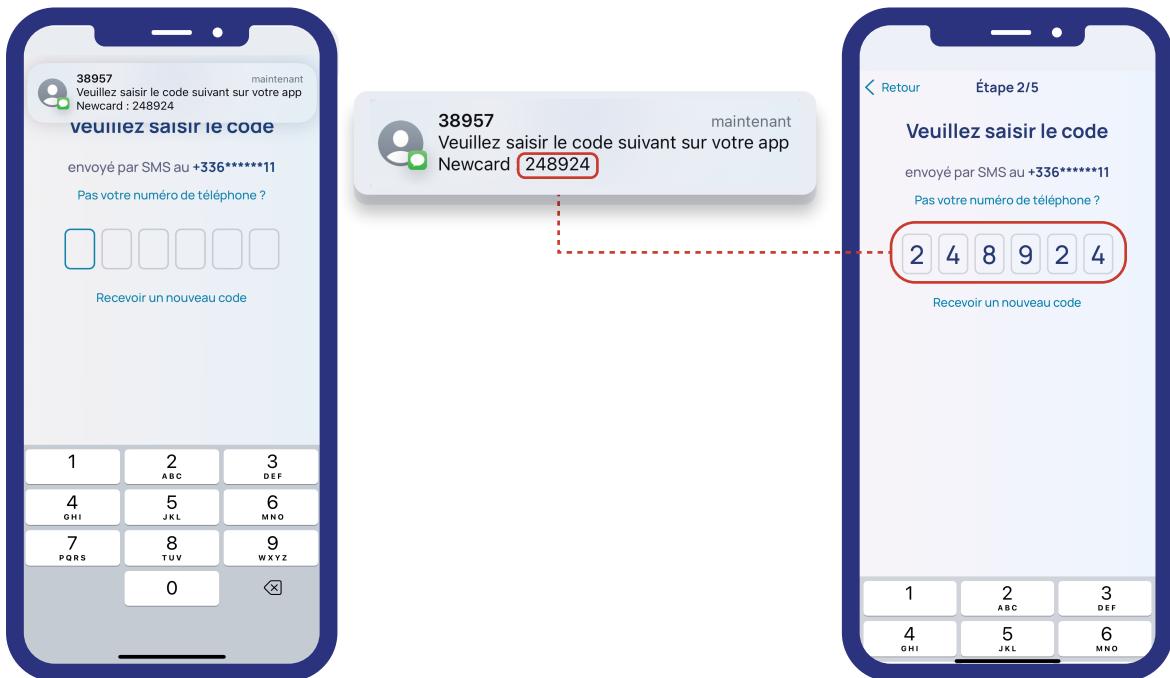

9 Créer un mot de passe sécurisé, qui doit contenir :

- ✓ Au moins 8 caractères
- ✓ Au moins une majuscule

- ✓ Au moins un caractère spécial (ex : #?!@\$%^&*- etc.)
- ✓ Au moins un chiffre

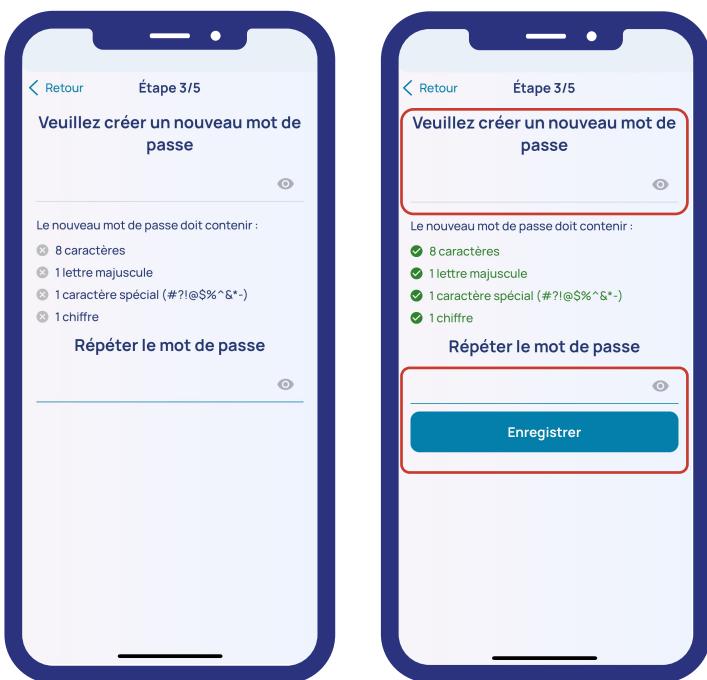

Je note mon mot de passe



Astuce : Garder bien en mémoire votre identifiant patient et mot de passe, vous en aurez besoin pour vous connecter à l'application chaque jour.


→ Cliquer sur **Continuer**

10 Finaliser l'inscription en cliquant sur

Enregistrer

Félicitations, votre compte est créé !

Étape 4 : Accepter les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

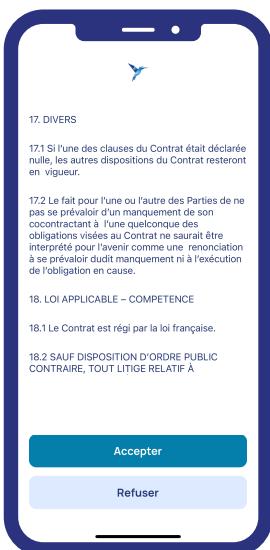


11 Lire attentivement les Conditions Générales d'utilisation et descendre en bas de la page, ↓ Descendre en bas de page ↓

12 Cliquer sur **Accepter** pour valider.

Étape 5 : Connecter / Configurer le kit Newcard (balance + tensiomètre)

! Préparer vos appareils : Vérifier que les piles sont bien insérées dans le tensiomètre et la balance.

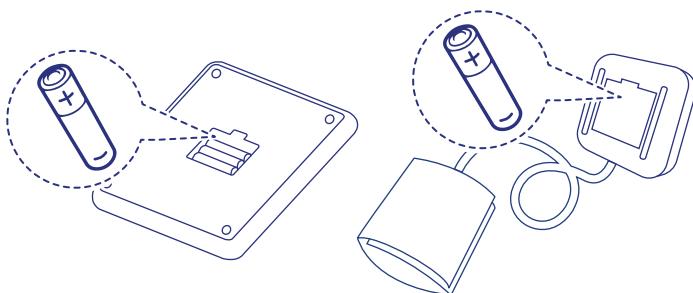

Étape 6 : Autoriser Newcard à utiliser le Bluetooth de votre téléphone

13 Cliquer sur :

Accéder à mes paramètres

Allumez le bluetooth dans les paramètres de votre téléphone



Accéder à mes paramètres

Utiliser mon propre matériel

14 Cliquer sur :

Autoriser

Merci d'autoriser temporairement la permission de bluetooth



Autoriser NewCard à détecter les appareils à proximité, s'y connecter et déterminer leur position relative ?

Autoriser

Ne pas autoriser

15 Cliquer sur :

D'accord

Merci d'autoriser temporairement la permission de bluetooth



Newcard a besoin de votre Bluetooth pour permettre la connexion initiale entre votre appareil et les objets connectés.

D'accord

Étape 7 : Connecter le tensiomètre :

16 Cliquer sur :

Connecter le tensiomètre Newcard
dans l'application

17 Appuyer sur le bouton
du tensiomètre physique





BRAVO !

« Tensiomètre connecté
avec succès »


Cliquer sur :

Continuer

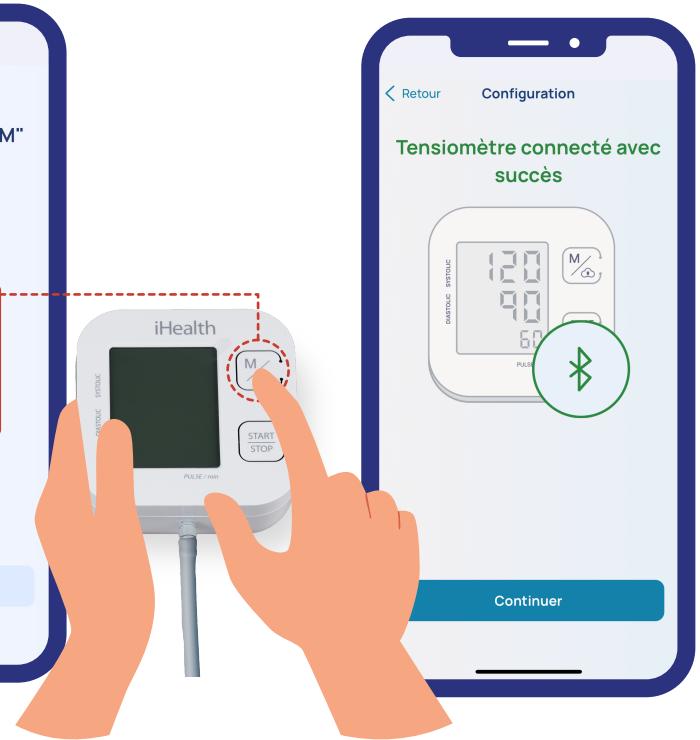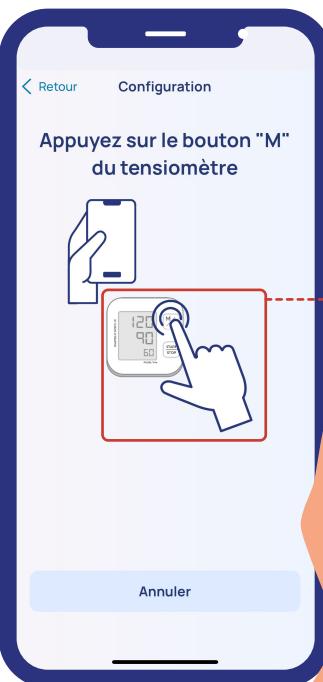

Étape 8 : Connecter la balance :

18

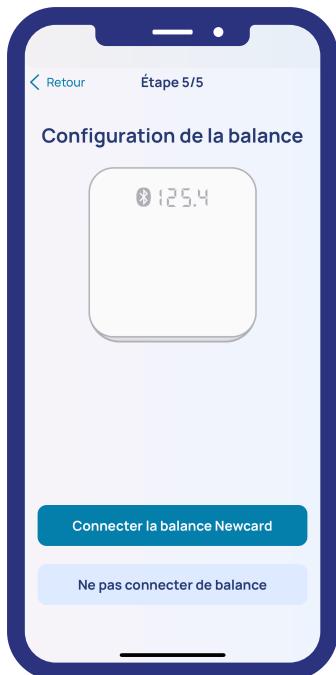


Cliquer sur :

Connecter la balance Newcard
dans l'application



BRAVO ! « Balance connecté avec succès »

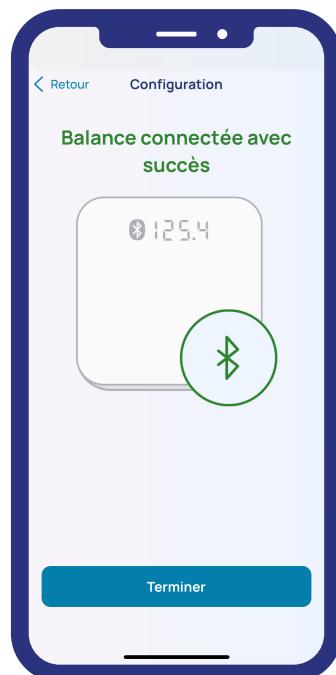

Cliquer sur :


Terminer

Félicitations, vous êtes prêt pour vos premières mesures !



Astuce :

- 19** Se rendre dans l'onglet Paramètres (en bas à droite de l'écran).
- 20** Activer l'option Utiliser un code PIN en appuyant sur le bouton.
- 21** Créer un code PIN : Saisissez un code PIN à 4 chiffres, puis confirmez-le en le répétant

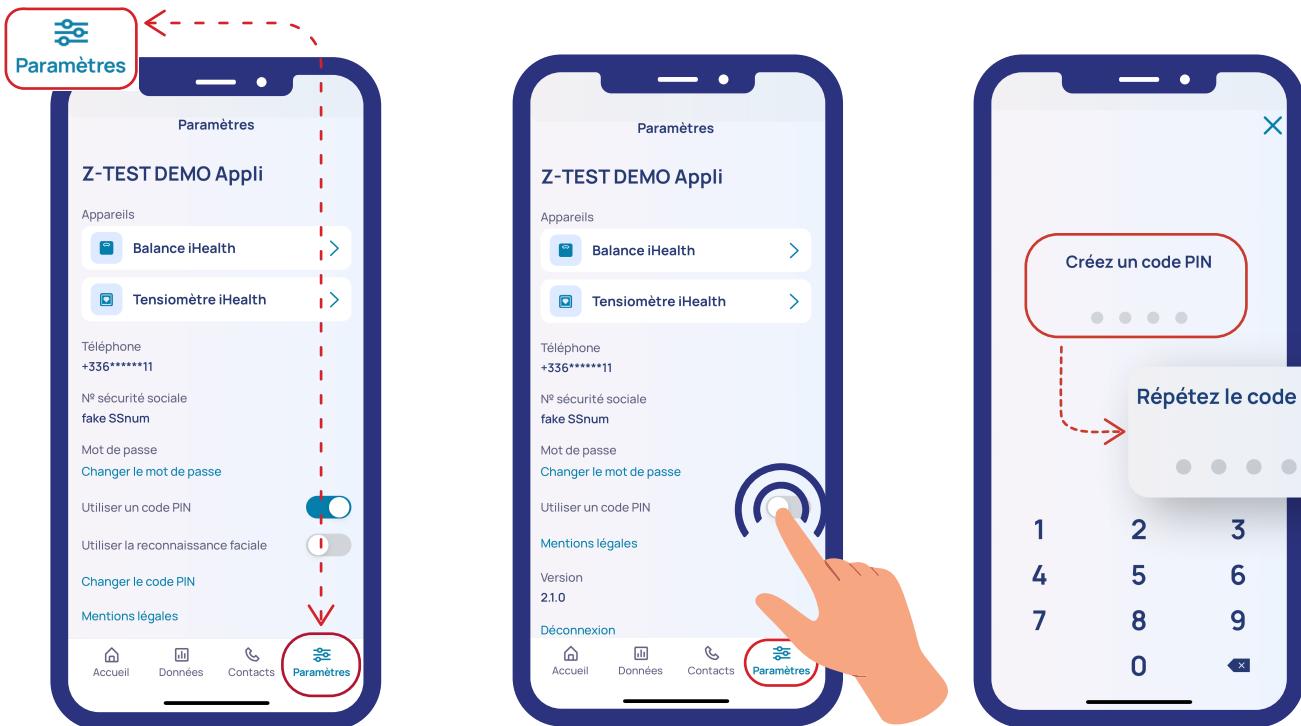


Félicitations ! Votre code PIN est activé !



Astuce : Pour ne pas utiliser le code PIN activer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale (optionnel, si votre téléphone le permet)

- 22** Dans le même menu Paramètres, activer la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale en glissant le bouton correspondant.
- 23** Suivre les instructions pour configurer Face ID ou Touch ID.

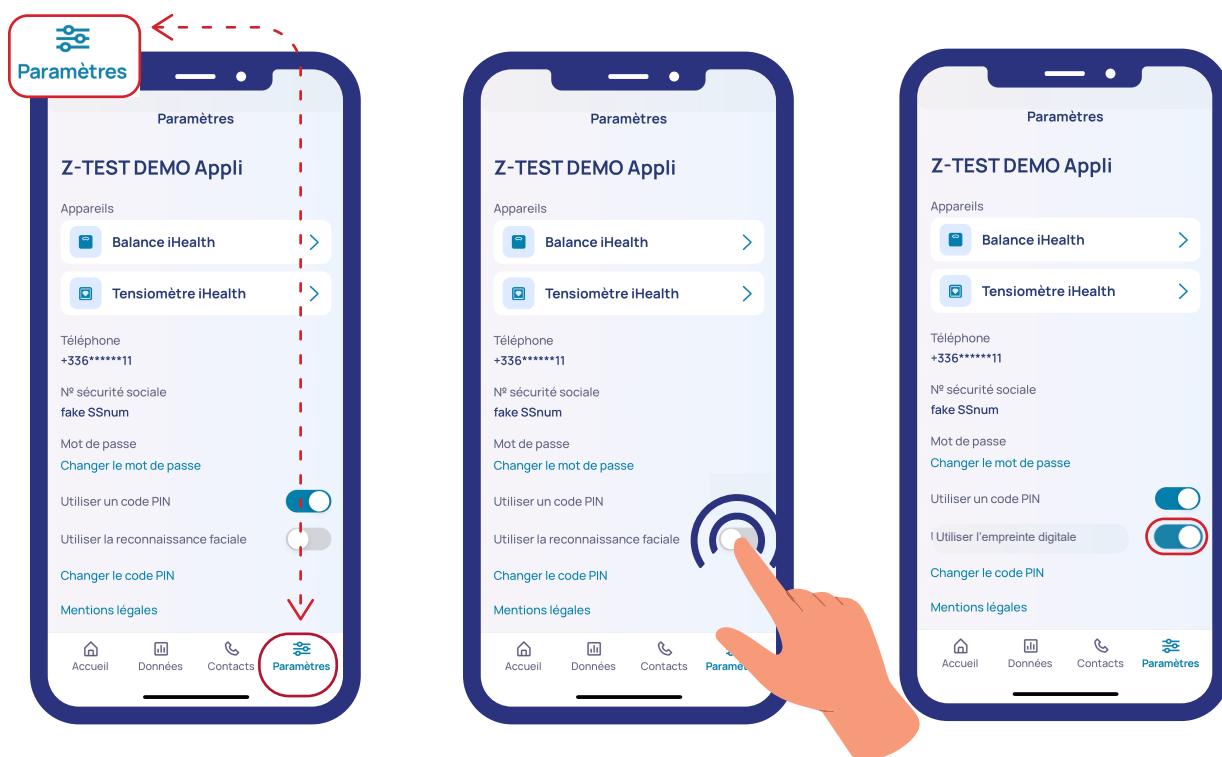


Votre connexion sera encore plus rapide et sécurisée !


Étape 9 : Se connecter

24 Cliquer sur :


Se connecter

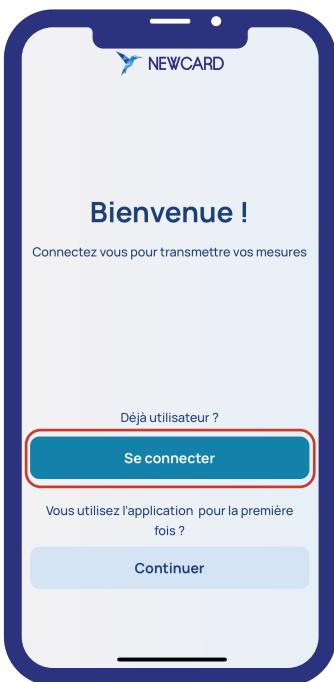

25 Entrer votre identifiant et votre mot de passe

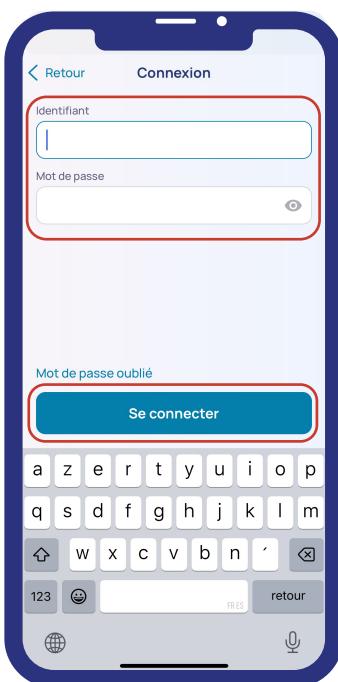


26 Saisir le code PIN

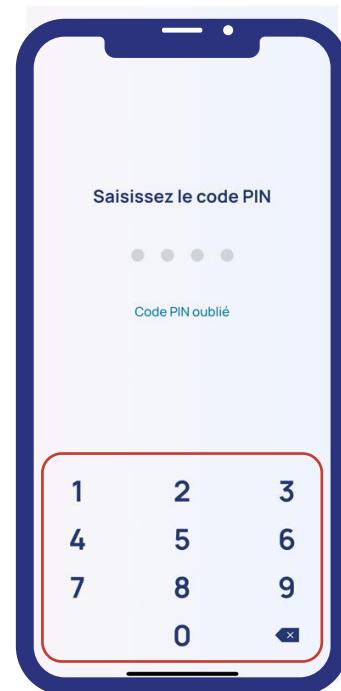

OU

Besoin d'aide ? N'hésitez pas à demander à vos proches,
votre aide à domicile ou votre voisin !

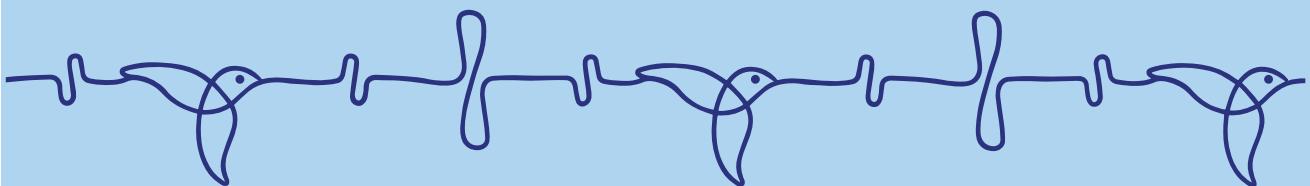

Téléphone :
03 20 14 71 14



1 Minute pour mon cœur :
cardio@newcard.io



1 Minute pour mes reins :
nephro@newcard.io