



NOTICE D'UTILISATION DE LA PLATEFORME POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

CE *Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (2019)*

MPC-NTU-MG-00

SOMMAIRE

I. 1^{ère} CONNECTION / P.2

II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PLATEFORME / P.3

III. LA FICHE PATIENT / P.4

IV. VISUALISER LES ALERTES / P.7

VI. NOUS CONTACTER / P.8



INTRODUCTION

Le guide fait partie intégrante du logiciel 1 Minute pour mon cœur. Il détaille la présentation du logiciel, son paramétrage et son utilisation. Il a pour but d'aider l'utilisateur à comprendre le fonctionnement de leur télésurveillance, et l'accompagnera tout au long de cette dernière.

En cas de besoin, une version imprimée peut-être fournie sur demande à l'adresse suivante : <https://newcard.io/contacts/> ou cardio@newcard.io.

Rappel que le patient doit être informé que la télésurveillance ne constitue pas une prise en charge d'urgence et que les données enregistrées ou alertes ne sont pas lues et interprétées instantanément, mais uniquement pendant les jours et les heures définies par l'opérateur de télésurveillance. Le patient est donc informé qu'en cas d'urgence, il doit contacter un numéro d'appel d'urgence.

Explication des symboles

	Dispositif médical
	Code d'identification unique du dispositif
	Nom et adresse du fabricant légal
	Numéro de lot
	Marquage CE
	Consulter le guide d'utilisation
	Référence commerciale
	Emballage et objets à ne pas jeter
	Fragile
	Tenir à l'écart de la chaleur

1 Minute Pour Mon Cœur est un logiciel en tant que dispositif médical destiné à la télésurveillance des patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique par la collecte, l'analyse, le stockage et la visualisation de données de santé. L'application patient permet la collecte de vos données pour leur traitement par l'algorithme Newcard.

Critères d'éligibilité

Les patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique, quels que soient le type et l'étiologie de la maladie et remplissant une des deux conditions suivantes :

- Hospitalisation au cours des 12 derniers mois pour une poussée d'insuffisance cardiaque ;
- Actuellement en classe NYHA 2 ou plus.

Une connexion internet est nécessaire pour l'utilisation du logiciel 1 Minute pour mon cœur :

Navigateur	Version compatible
Google Chrome	≥ 126.0
Hardware	
Ordinateur de bureau	Écran minimum 17 pouces avec résolution 1920 x 1080 (Full HD)
Ordinateur portable	Ecran minimum 15 pouces avec résolution 1920 x 1200 (Full HD+)
Tablettes	Taille de l'écran 10 pouces avec résolution 800 x 1280
Smartphones	• Taille de l'écran 6,5 avec résolution 412 x 915 : pour Android • Taille de l'écran 6,5 avec résolution 414 x 896 : pour iPhone.

En cas de matériovigilance

Tout incident ou risque d'incident grave ayant entraîné ou pouvant entraîner le décès ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers impliquant les services de Newcard doit être signalé sans délai à Newcard à l'adresse électronique suivante : **cardio@newcard.io** et à l'autorité compétente (en France, à L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - ANSM).

Dans le cadre des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance des patients insuffisants cardiaques chroniques éligibles, Newcard met à disposition des professionnels de santé un **accès permanent à une plateforme web sécurisée. Cette plateforme, en permettant aux professionnels de santé de consulter les mesures prises à domicile par leurs patients (poids, fréquence cardiaque et tension artérielle)**, a pour objet d'optimiser le suivi de la pathologie et de permettre la potentielle détection précoce de décompensation cardiaque de leurs patients.

I. 1^{ère} CONNEXION

Lors de votre première connexion sur la plateforme de télésurveillance, il vous sera demandé d'accepter les **Conditions Générales d'Utilisation**.

En acceptant ces dernières, vous certifiez avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du service, et vous vous engagez à :

- maintenir le caractère confidentiel de vos identifiants de connexion,
- utiliser la plateforme conformément à sa destination,
- ne pas tenter de nuire au bon fonctionnement du site.

Vous pouvez à tout moment retrouver ces CGU dans l'onglet «**Document**» de votre profil. Vous pouvez également vous connecter via le portail «**Pro Santé Connect**».




II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PLATEFORME

En première page de connexion à la plateforme, vous arrivez sur le tableau de bord qui vous donne une vue globale du service de télésurveillance.

Ces données sont cliquables et vous permettent d'accéder directement à l'information souhaitée.

Ces éléments sont également trouvables dans la **barre latérale gauche**.

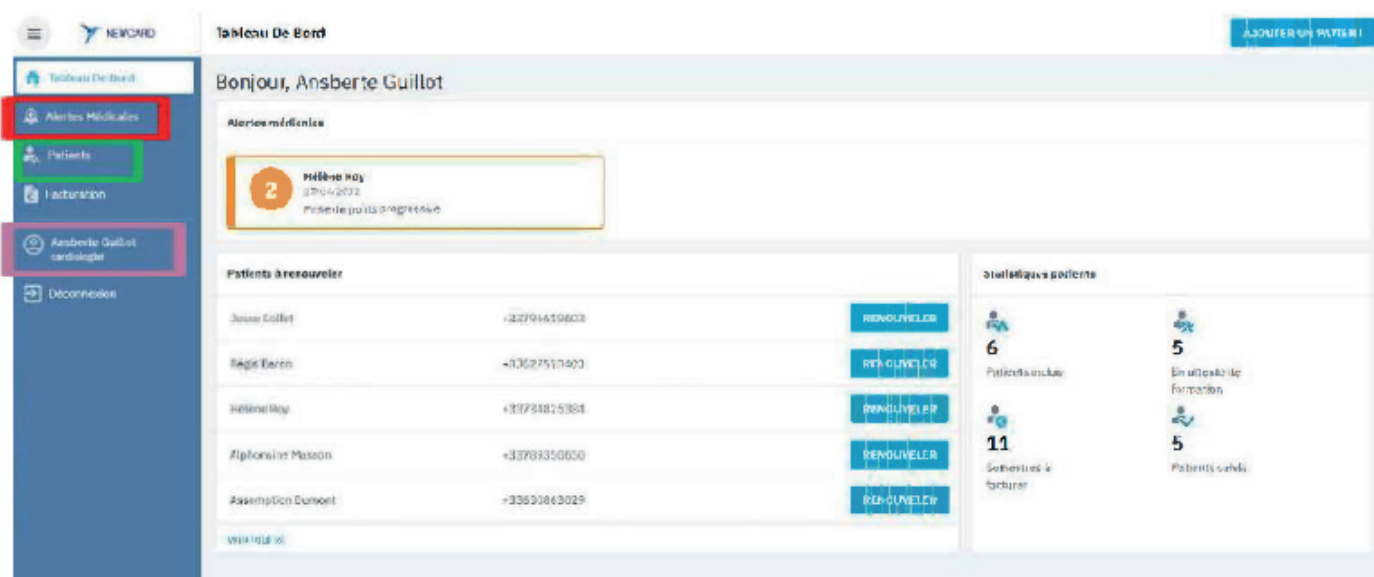

Si vous cliquez sur « **Alertes Médicales** » (ici entouré en **rouge**), vous avez une vue d'ensemble des alertes en cours. Lorsque vous cliquez sur « **Patients** » (ici entouré en **vert**), vous retrouvez la liste de l'ensemble de vos **patients suivis par Newcard**.

Enfin, vous accédez à vos données personnelles, que vous pouvez modifier en cliquant sur votre profil (entouré en **rose**). Pour vous **déconnecter**, veuillez cliquer sur « **Déconnexion** ».

Tout incident ou dysfonctionnement pouvant survenir lors de l'utilisation de la plateforme doit faire l'objet d'une notification à Newcard par l'utilisateur, afin que cela puisse être pris en charge dans les plus brefs délais.

III. LA FICHE PATIENT

Lorsque vous cliquez sur le nom d'un patient, sa fiche s'ouvre alors. Vous retrouvez toutes les informations essentielles au suivi du patient dans la colonne à droite de votre écran.

Si votre patient est en alerte, cette alerte est affichée en haut de sa fiche.



Sur la fiche de chaque patient, vous avez deux boutons en **haut à droite** qui vous permettent de :

- **Renseigner une hospitalisation** cardiaque ou non,
- **Ajouter un commentaire d'ordre médical**, ou qui concerne l'accompagnement thérapeutique du patient.

Sur la fiche patient, vous pouvez également visualiser les données grâce aux différents graphiques de poids, de tension artérielle et de fréquence cardiaque. Le patient indique s'il est plus ou moins essoufflé que la veille, cela correspond aux traits rouges et verts sur le graphique.


En haut à droite de chacun des graphiques, vous retrouvez une liste de potentielles actions:



Ces boutons vous permettent notamment de faire varier la période de visualisation des données. Celle-ci vous permet de naviguer sur l'ensemble des données du patient. La période de visualisation des données du patient par défaut est fixée à **un mois**.

Sous les graphiques du patient, vous avez accès à son **historique** :

- l'historique **médical**,
- l'historique d'**accompagnement thérapeutique**,
- et l'historique **technique**.

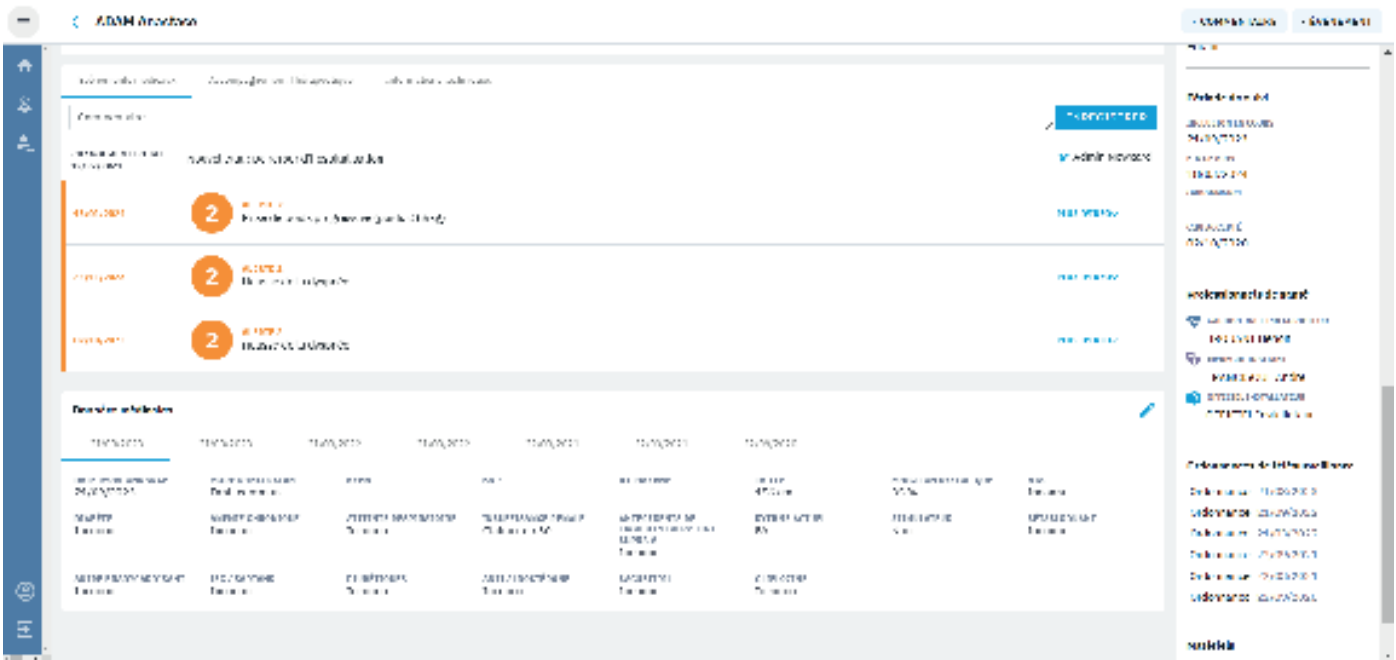

Vos commentaires sont inscrits dans l'historique du patient, et seront ensuite visibles par les autres professionnels de santé qui participent à la télésurveillance du patient (cardiologue et IDE en charge de l'accompagnement thérapeutique).

L'historique **médical** reprend l'ensemble des **alertes** de niveau 1 et 2 qui ont été déclenchées, l'évolution de la prise en charge de ces alertes ainsi que les commentaires qui ont été laissés à propos de cette dernière. Vous retrouvez les **changements d'état médical** du patient avec les dates associées : hospitalisations et retour d'hospitalisations.

L'**historique d'accompagnement thérapeutique** reprend les dates et thèmes des séances dont a bénéficié le patient. Vous avez également accès aux commentaires laissés par l'IDE.

L'historique technique du patient vous savez pourquoi le patient ne prend pas ses mesures, et vous pouvez suivre les actions menées par Newcard pour résoudre le problème.

Enfin, tout en bas de la fiche patient, vous retrouvez les **données médicales** qui ont été renseignées pour chaque période d'inclusion.

Personne à contacter en cas d'absence

NOM
Aldric Baron

EMAIL
Aldric_baron@Patient.Ncd

TÉLÉPHONE
+33212055980

NATURE DU LIEN
Enfant

Période de suivi

INCLUSION EN COURS
21/09/2023

FIN DE SUIVI
18/03/2024

ORDONNANCE
-

CGU ACCEPTÉ
02/10/2020

Professionnels de santé

 **CARDIOLOGUE PRESCRIPTEUR**
BROUANT Benoît

 **MÉDECIN TRAITANT**
FRANCISQUE Andre

 **OFFICIEL INSTALLATEUR**
OFFICIEL Installateur

Vous pouvez également retrouver sur la droite de la fiche plusieurs informations dont :

- Les coordonnées du patient,
- Son état médical,
- Un récapitulatif des professionnels de santé inclus dans le service de télésurveillance,
- Les informations sur son inclusion.

Pour rappel, les différents statuts médicaux qui existent sont :

- observant,
- hospitalisé,
- hospitalisé pour le coeur,
- de retour d'hospitalisation,
- absent,
- de retour d'absence.

L'algorithme est optimisé en fonction de cet état.

Si vous cliquez sur le nom de l'un des professionnels de santé, vous accédez à ses coordonnées.

Ordonnances de télésurveillance

Ordonnance 21/03/2023

Ordonnance 21/09/2022

Ordonnance 21/03/2022

Ordonnance 22/09/2021



IV. VISUALISER LES ALERTES

Vous retrouvez sur le tableau de bord l'ensemble des alertes en cours avec plusieurs éléments mis en avant :

- le **niveau de gravité** de l'alerte (1 ou 2),
- le **nom** du patient, la **date de déclenchement**,
- le **type de données** ayant déclenché l'alerte (poids, tension, fréquence cardiaque) ainsi que le **professionnel de santé ayant pris en charge l'alerte**.

Il existe **trois** états de l'alerte :

- **Déclenchée** : l'alerte a été envoyée, mais pas encore prise en compte;
- **Vue** : un professionnel de santé participant à la télésurveillance s'est connecté sur la plateforme et sur la fiche du patient en question, mais n'a pas pris en charge l'alerte
- **En cours** : l'alerte a été prise en charge, mais elle n'est pas terminée.

Pour accéder aux données d'un patient en alerte, **cliquez** sur le nom de ce patient. Vous arrivez alors sur la fiche patient : l'alerte est affichée tout en haut. Sous cette alerte, vous trouverez les graphiques de données du patient.

VI. NOUS CONTACTER



En cas de question, vous pouvez contacter la société **NEWCARD**, Société par Actions Simplifiée, au 03.20.14.71.17, dont le siège social est situé au 391 Avenue Clément Ader 59118 Wambrechies.

Cette notice d'utilisation (MPC-NTU-MG-00), révisée le 21 février 2024, peut être amenée à évoluer, en fonction des mises à jour de la plateforme. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous en communiquer les modifications.

Création par NEWCARD SAS. – Ne pas jeter sur la voie publique – Référence : MPC-NTU-MG-00. Date de création : 21 février 2024. Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (2019). Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.

