

# L'APPLICATION NEWCARD : TÉLÉCHARGER, CONNECTER, COMMENCER

Bienvenue dans votre guide simple et rapide pour démarrer avec Newcard !



# 1.

➤ Ouvrir le Play Store sur votre téléphone



➤ Rechercher NewCard dans la barre de recherche



Rechercher

➤ Télécharger l'application en cliquant sur

Installer

➤ Confirmer le téléchargement et ouvrir l'application

Ouvrir



# OU

Prendre en photo  
le QR code suivant :

Pour télécharger  
l'application




## 2.

> Cliquer sur :

**Première connexion**

pour commencer l'inscription

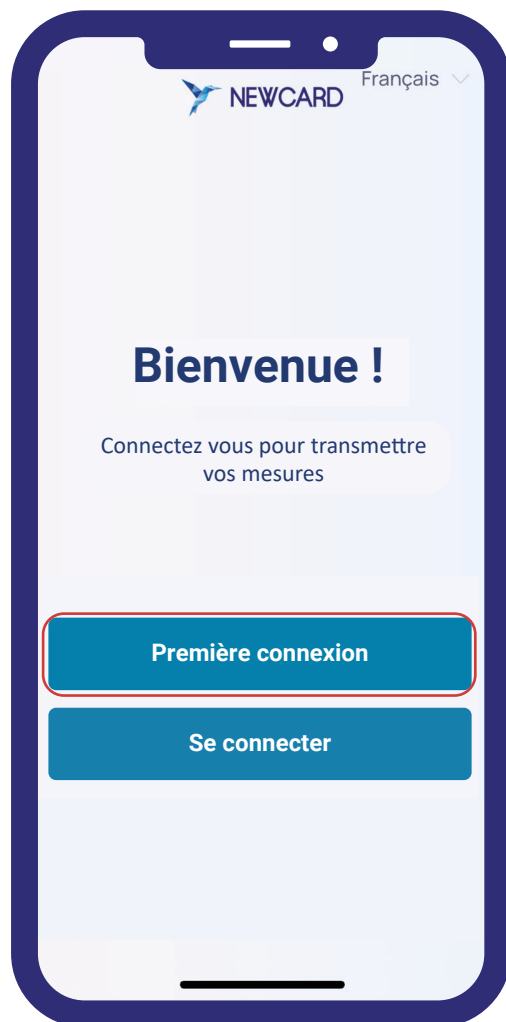

> Entrer votre identifiant :  
7 caractères



**Je note mon identifiant**

.....

**OU**

**Identifiant reçu par SMS :**




**NEWCARD**

Félicitations Newcard est sur votre téléphone !  
Cliquez sur Première connexion et écrivez votre  
identifiant : **xxxxxxx**

# 3.

➤ Saisir le code de validation, 6 chiffres. Reçu par SMS

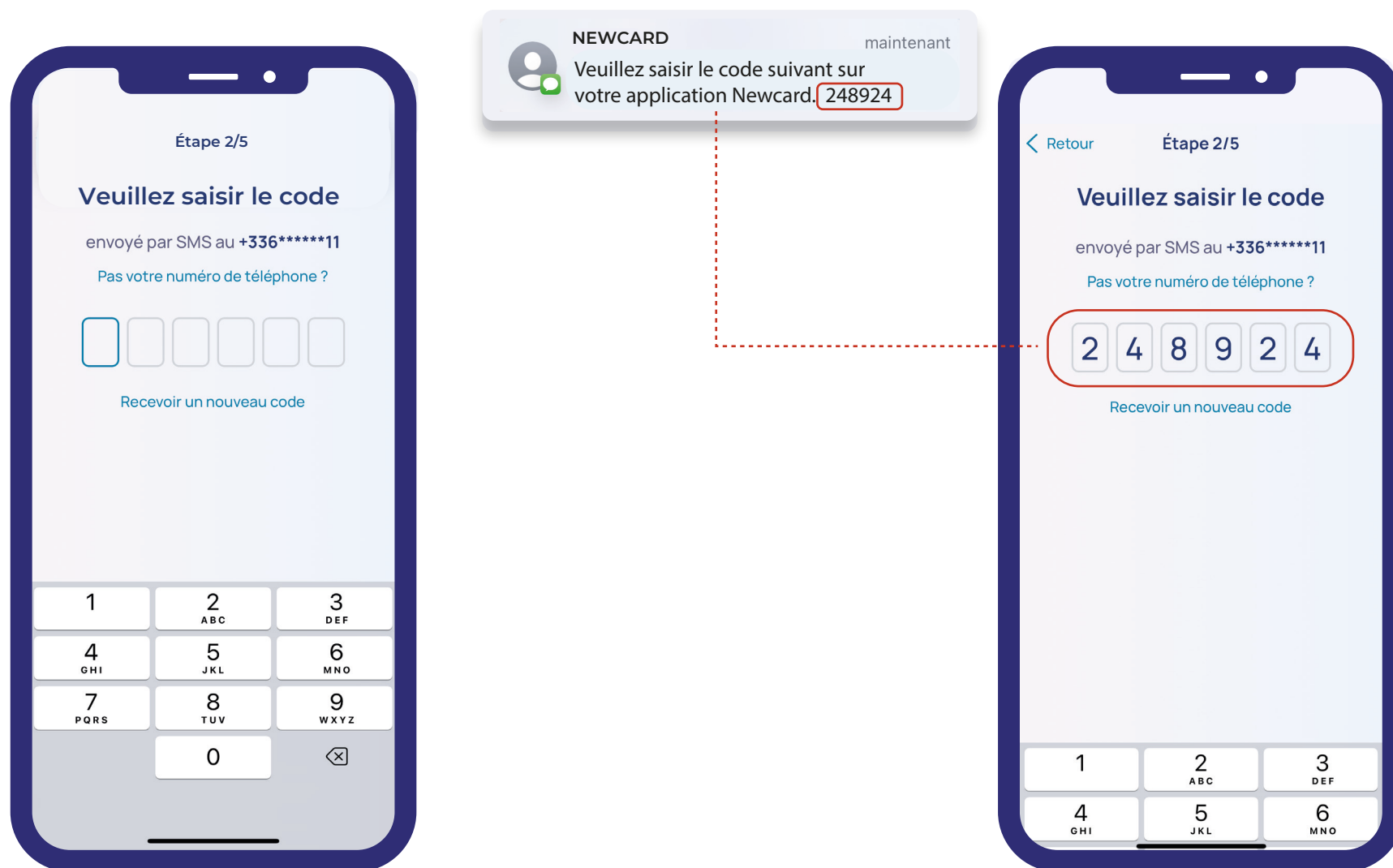

# 4.


> Créer un mot de passe secret.  
Il doit contenir :

- ✓ Au moins 8 caractères
- ✓ Au moins une majuscule
- ✓ Au moins un chiffre
- ✓ Au moins un caractère spécial  
(ex : # ? ! @ \$ % ^ & \* - )



**Je note mon mot de passe**

.....

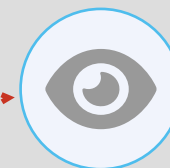

## Astuce

Appuyer sur voir  
pour afficher le  
mot de passe.


Les 2 mots de  
passe doivent être  
identiques.

> Enregistrer le mot de passe en cliquant sur :

**Enregistrer**

# 5.

- Créer un code secret (PIN) à 4 chiffres

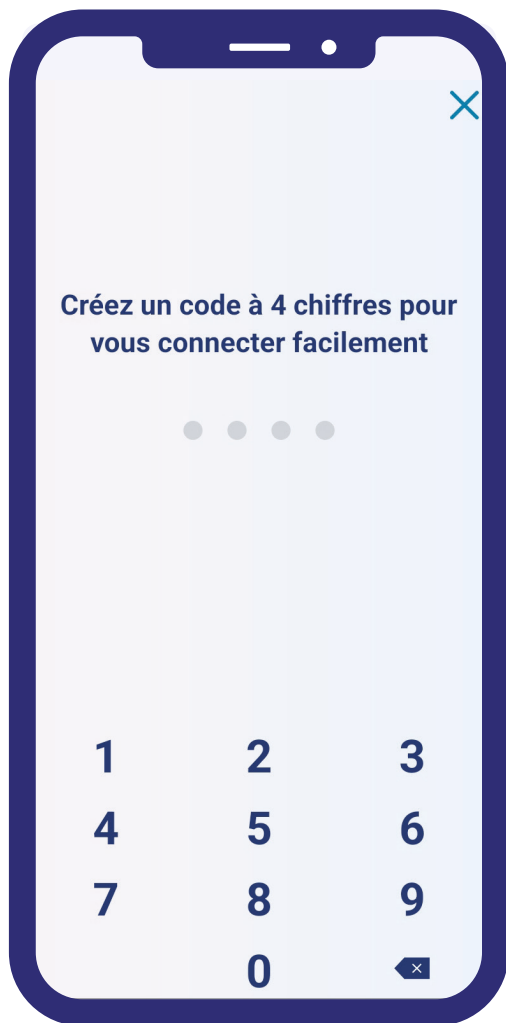

**Je note mon code secret**

.....

- Répétez le code à nouveau




## Astuce

Utilisez le même  
code secret que  
celui de votre  
téléphone

**Félicitations, votre compte est crée !**

# 6.

## > Accepter les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

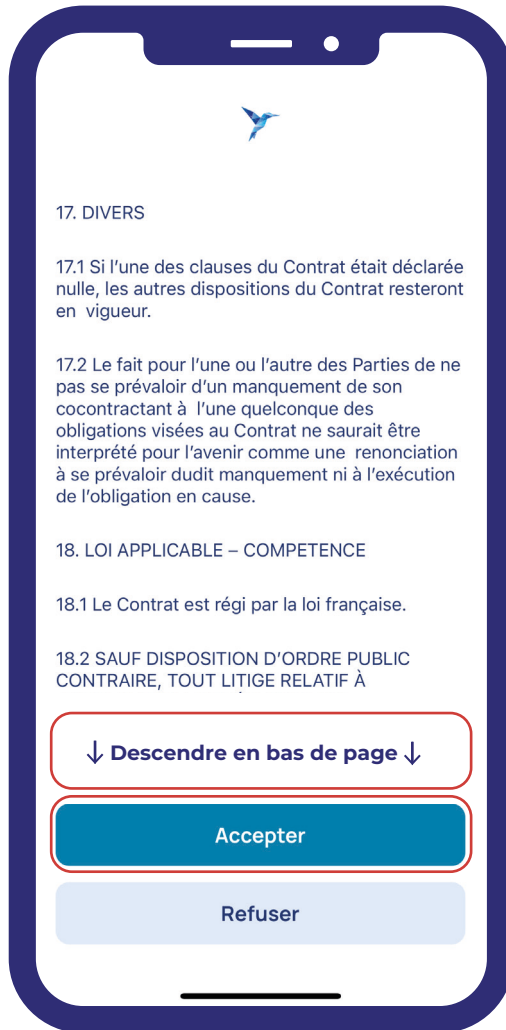

## > Lire attentivement les Conditions Générales d'utilisation et descendre en bas de la page

1 ↓ Descendre en bas de page ↓

## > Cliquer sur

2 Accepter  
pour valider


# 7.

> Autoriser Newcard à utiliser le Bluetooth de votre téléphone




> Cliquer sur :

Accéder à mes paramètres

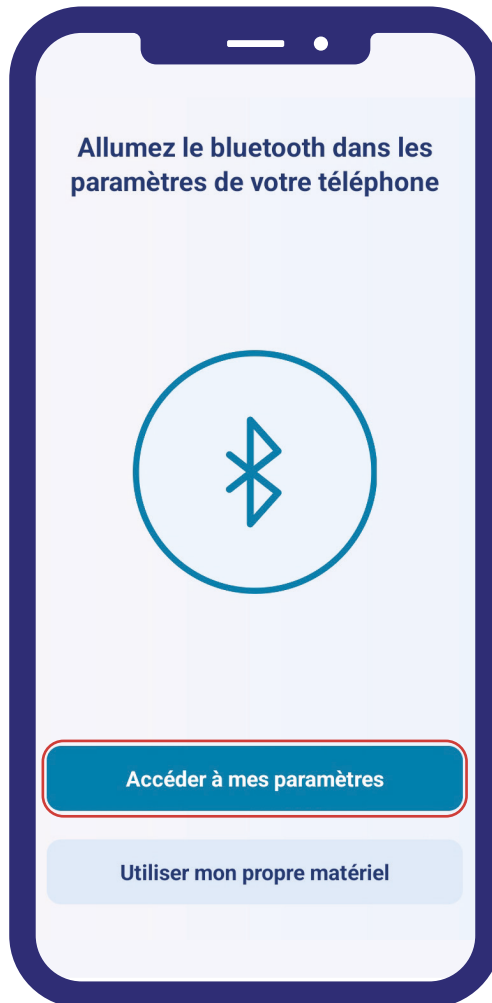

> Cliquer sur :

Autoriser

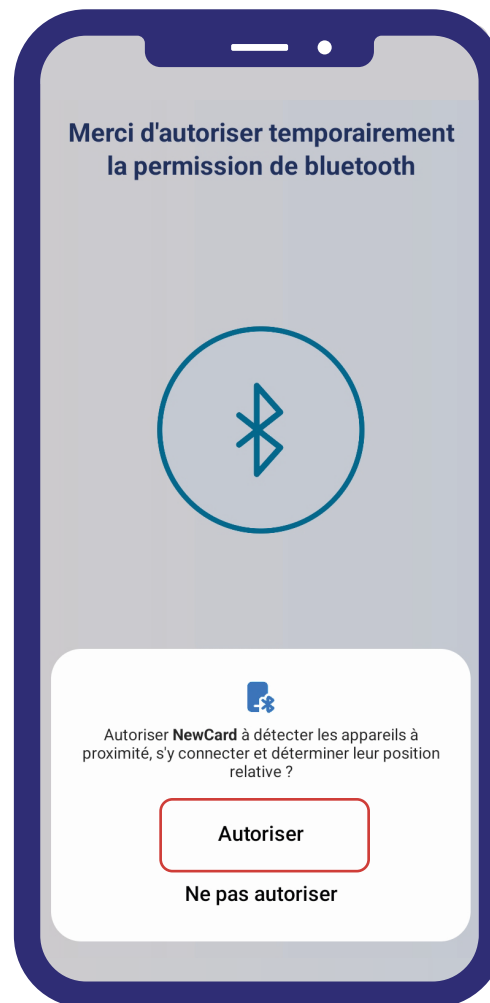

> Cliquer sur :

D'accord



# 8.

➤ Prendre votre tensiomètre. Vérifier que les piles sont bien insérées




➤ Cliquer sur :

Continuer



➤ Appuyer sur le bouton du tensiomètre physique

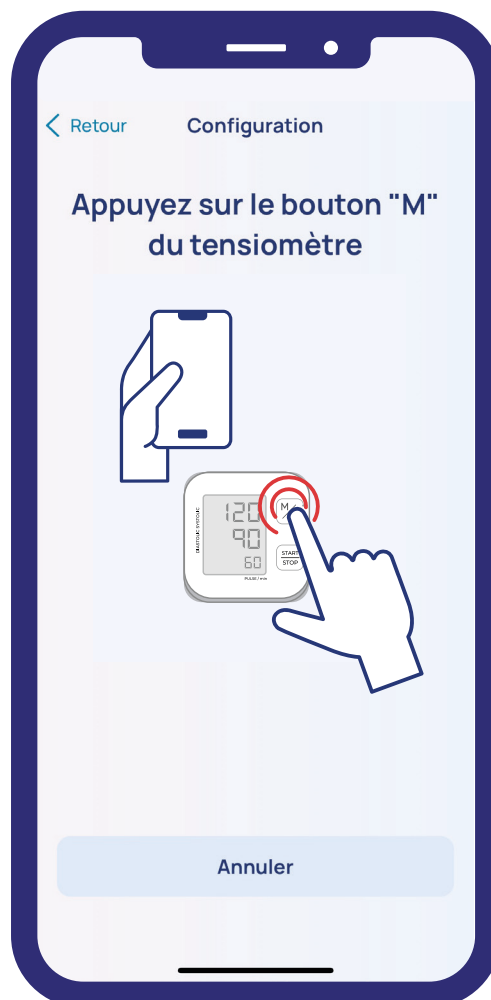

✓ **BRAVO !**  
« Tensiomètre connecté avec succès »

Cliquer sur :

Continuer



# 9.

➤ Prendre votre balance. Vérifier que les piles sont bien insérées



➤ Cliquer sur :

Connecter

➤ Connexion automatique





**BRAVO !**

« Balance connectée avec succès »

➤ Cliquer sur :

Terminer

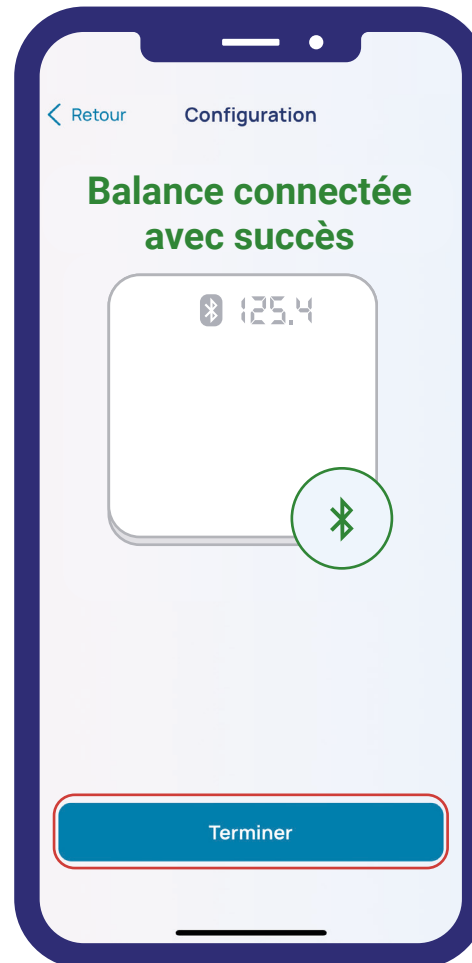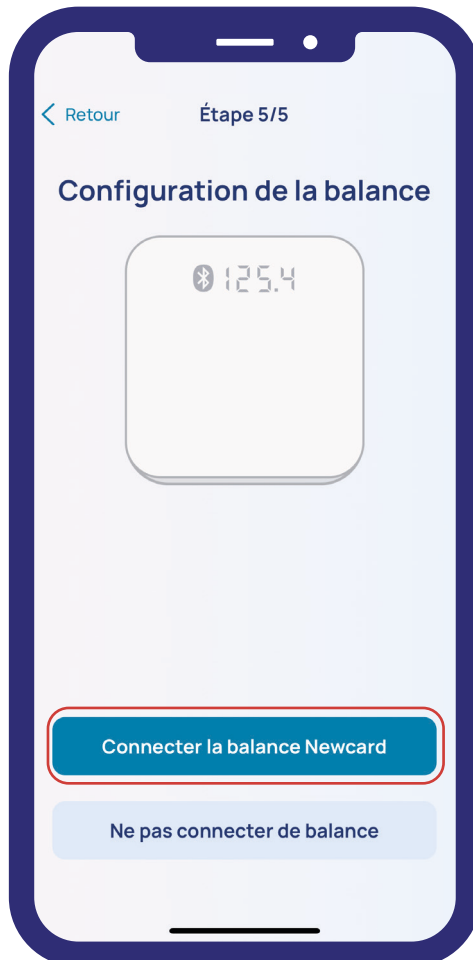

Félicitations, vous êtes prêts pour vos premières mesures !

# | 10.

➤ Prendre vos mesures : Poids, tension et symptômes

➤ Cliquer sur : **Prendre mes mesures**




**Besoin d'aide ?**

N'hésitez pas à demander à vos proches, votre aide à domicile ou votre voisin.

# | 11.

➤ En cas de fermeture de l'application cliquer sur : **Se connecter**

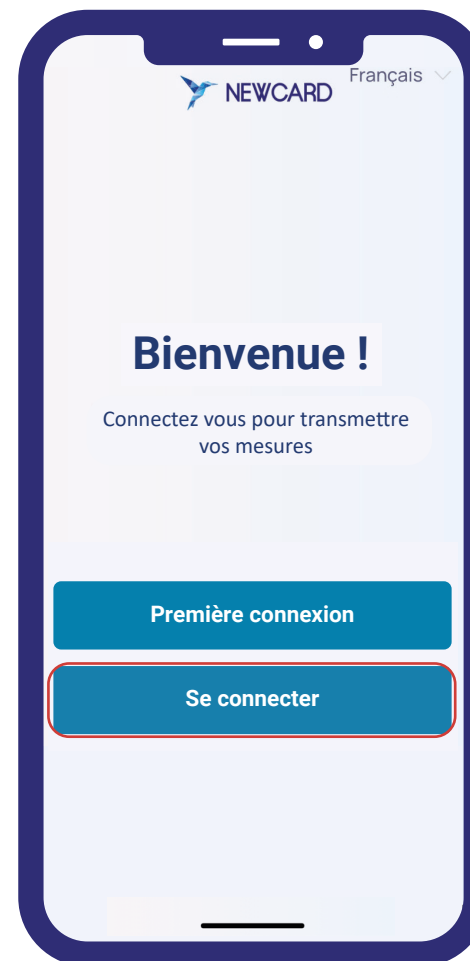

Utilisez :

➤ Code secret

**OU**

➤ Identifiant + Mot de passe



Téléphone :  
03 20 14 71 14



1 Minute pour mon coeur :  
[cardio@newcard.io](mailto:cardio@newcard.io)



1 Minute pour mes reins :  
[nephro@newcard.io](mailto:nephro@newcard.io)



