

L'APPLICATION NEWCARD : TÉLÉCHARGER, CONNECTER, COMMENCER

Bienvenue dans votre guide simple et rapide pour démarrer avec Newcard !



1.

➤ Ouvrir le Play Store sur votre téléphone



➤ Rechercher NewCard dans la barre de recherche



Rechercher

➤ Télécharger l'application en cliquant sur

Obtenir


➤ Confirmer le téléchargement et ouvrir l'application

Ouvrir

OU

Prendre en photo
le QR code suivant :

Pour télécharger
l'application

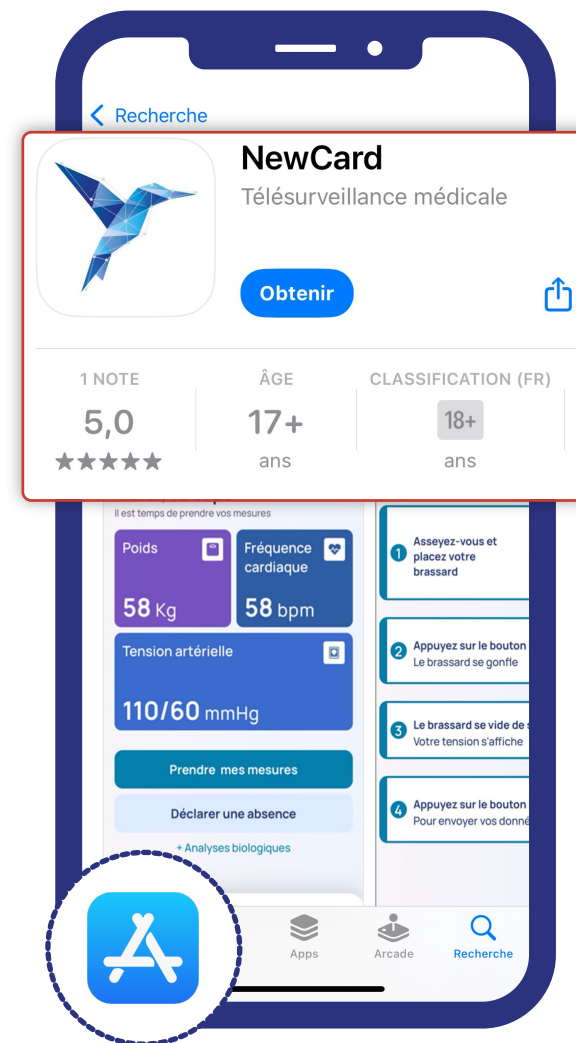


2.

> Cliquer sur :

Première connexion

pour commencer l'inscription

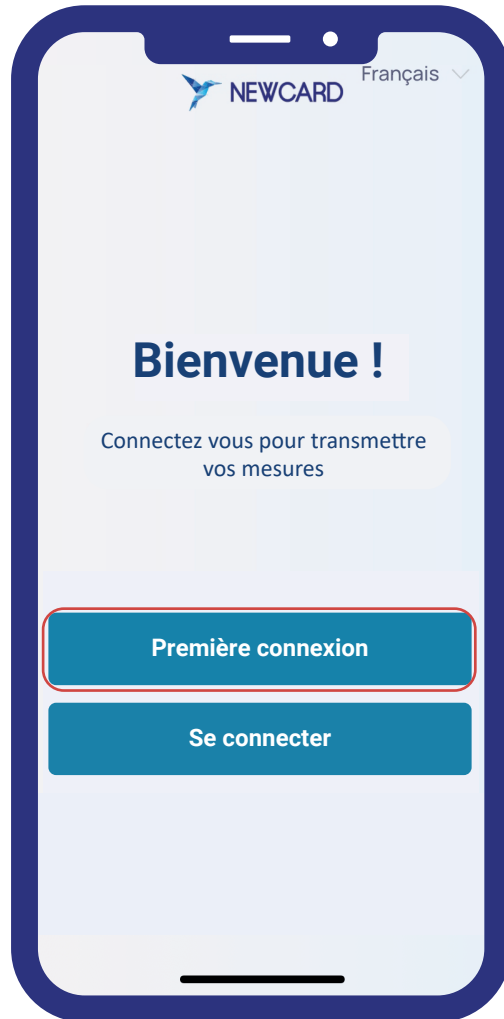

> Entrer votre identifiant :
7 caractères



Je note mon identifiant

.....

OU

Identifiant reçu par SMS :




NEWCARD

Félicitations Newcard est sur votre téléphone !

Cliquez sur Première connexion et écrivez votre identifiant : **XXXXXXXX**

3.

> Saisir le code de validation, 6 chiffres. Reçu par SMS

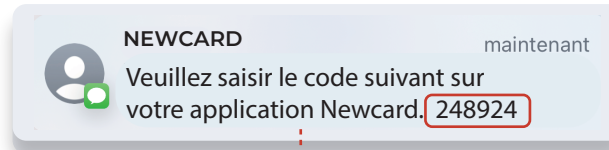

4.


> Créer un mot de passe secret.
Il doit contenir :

- ✓ Au moins 8 caractères
- ✓ Au moins une majuscule
- ✓ Au moins un chiffre
- ✓ Au moins un caractère spécial (ex : # ? ! @ \$ % ^ & * -)



Je note mon mot de passe

.....

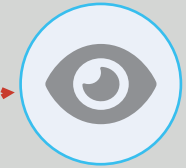

Astuce

Appuyer sur voir pour afficher le mot de passe.


Les 2 mots de passe doivent être identiques.

> Enregistrer le mot de passe en cliquant sur :

Enregistrer

5.

- > Créer un code secret (PIN) à 4 chiffres

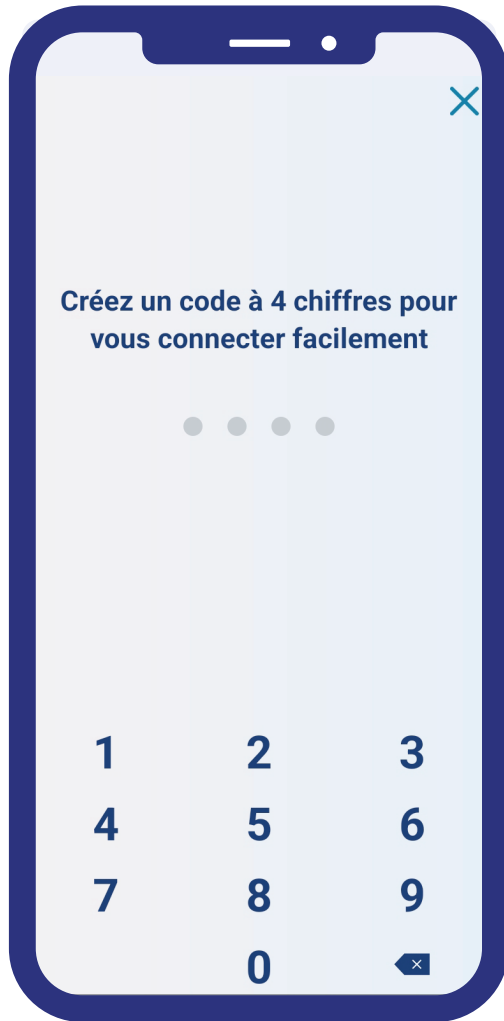

Je note mon code secret

.....


- > Répétez le code à nouveau



Félicitations, votre compte est créé !

6.

> Accepter les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

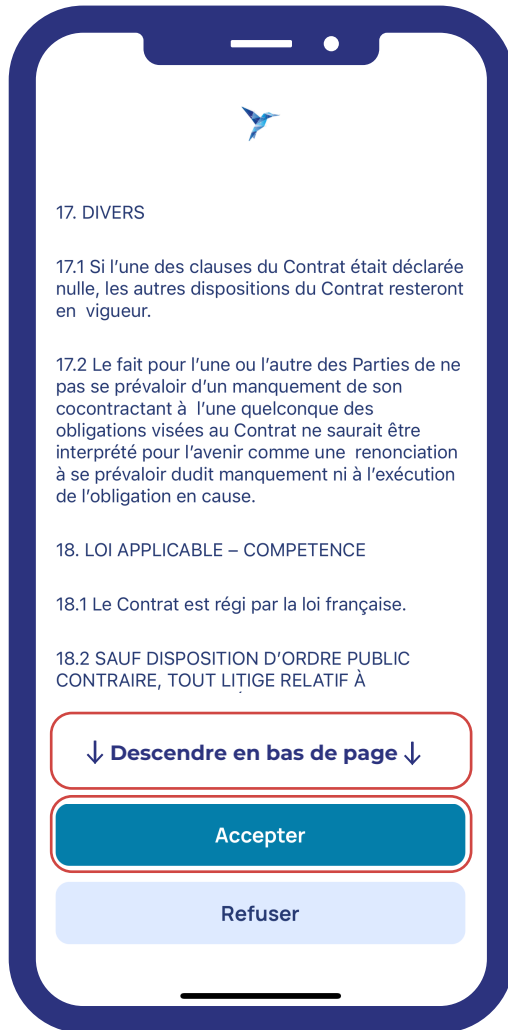

> Lire attentivement les Conditions Générales d'utilisation et descendre en bas de la page

1 ↓ Descendre en bas de page ↓

> Cliquer sur:-

2 Accepter
pour valider


7.

> Autoriser Newcard à utiliser le Bluetooth de votre téléphone



> Cliquer sur :

Accéder à mes paramètres

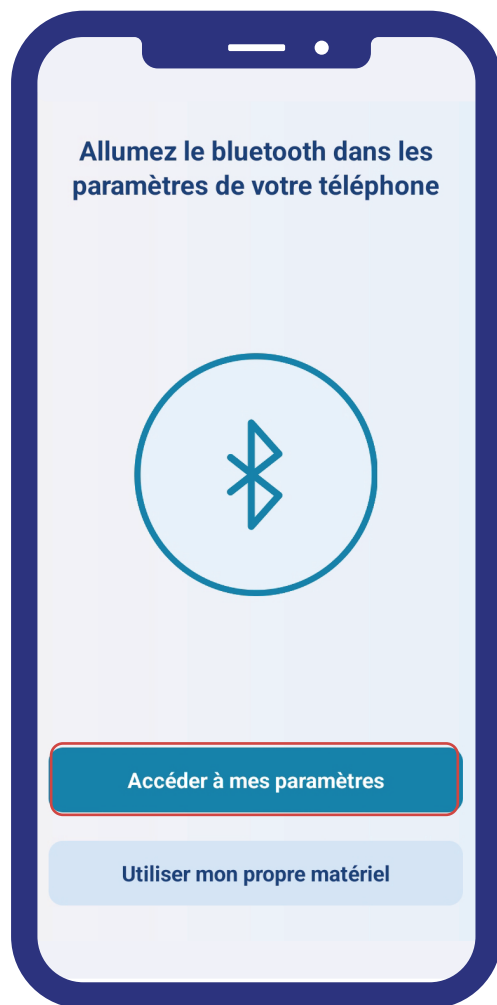


> Cliquer sur :

Autoriser



8.

> Prendre votre tensiomètre. Vérifier que les piles sont bien insérées

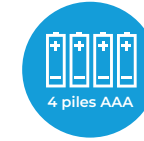


> Cliquer sur :

Continuer



> Appuyer sur le bouton "M" du tensiomètre physique

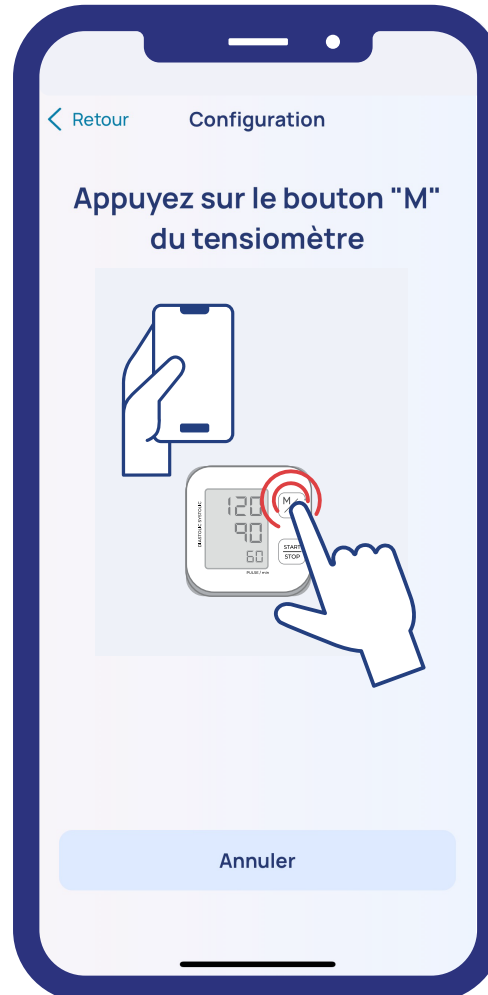

✓ **BRAVO !**
« Tensiomètre connecté avec succès »

Cliquer sur :

Continuer



9.

> Prendre votre balance. Vérifier que les piles sont bien insérées



> Cliquer sur :

Connecter

> Connexion automatique





BRAVO !

« Balance connectée avec succès »

> Cliquer sur :

Terminer

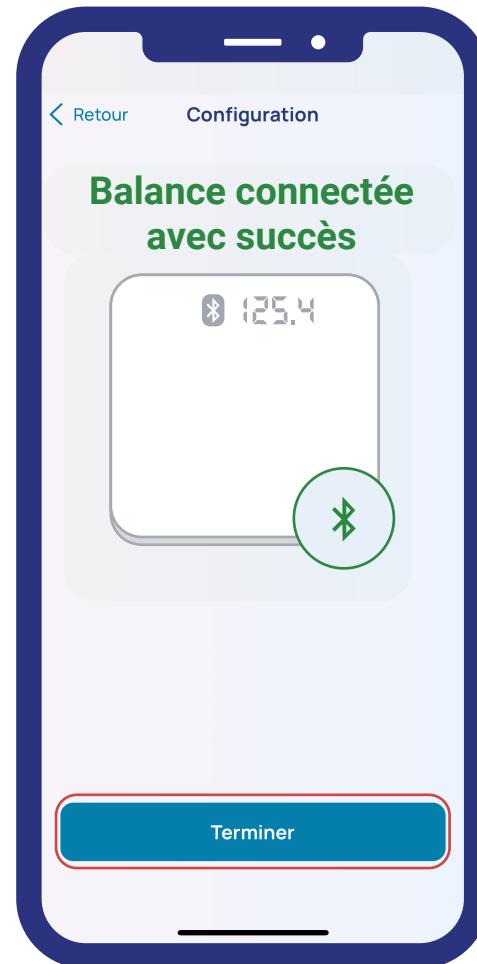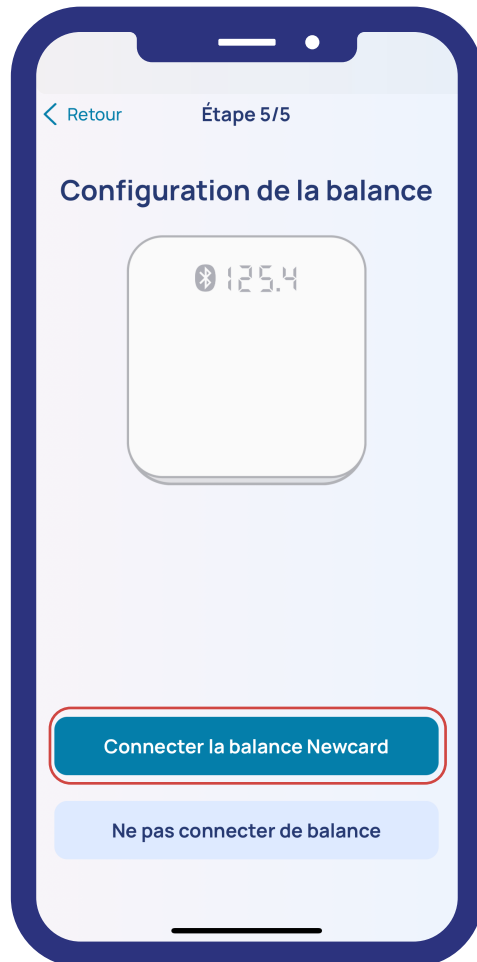

Félicitations, vous êtes prêts pour vos premières mesures !

10.

➤ Prendre vos mesures : Poids, tension et symptômes

➤ Cliquer sur : **Prendre mes mesures**




Besoin d'aide ?

N'hésitez pas à demander à vos proches, votre aide à domicile ou votre voisin.

11.

➤ En cas de fermeture de l'application cliquer sur : **Se connecter**

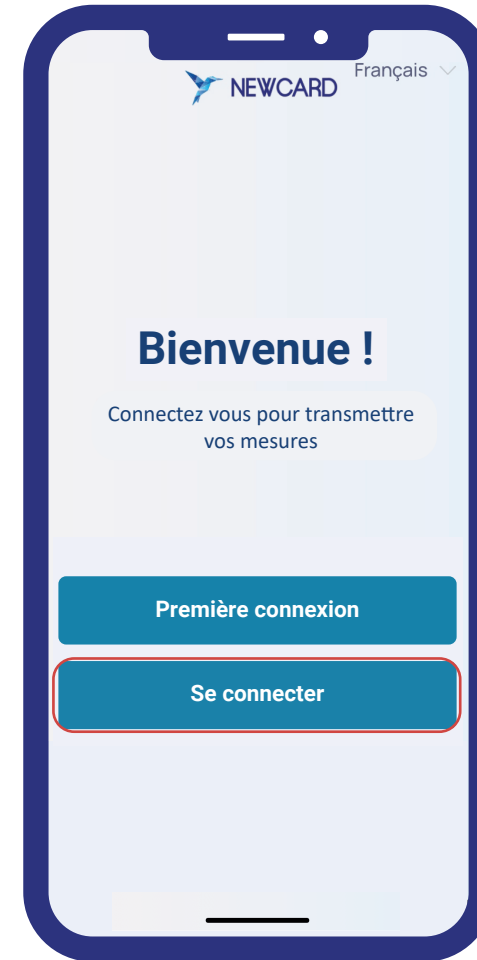

Utilisez :

➤ Code secret

OU

➤ Identifiant + Mot de passe

📞 Téléphone :
03 20 14 71 14

📧 1 Minute pour mon coeur :
cardio@newcard.io

📧 1 Minute pour mes reins :
nephro@newcard.io