



COMPRENDRE L'APPLICATION PATIENT ET S'IMPLIQUER DANS LA TÉLÉSURVEILLANCE AVEC LA PLATEFORME NEWCARD

Guide à destination
des médecins généralistes

Sommaire

Partie 1 : Introduction à la télésurveillance	2
a. Mot de bienvenue	2
b. L'essentiel de la télésurveillance	3
Partie 2 : L'environnement du patient	8
a. Le kit de télésurveillance mis à disposition du patient	8
b. Le parcours de télésurveillance du patient	10
c. Application patient : un suivi simple au quotidien	11
Partie 3 : L'environnement du médecin généraliste	17
a. Première connexion sur la plateforme	17
b. Présentation générale de la plateforme	18
c. La fiche patient	19
d. Visualiser les alertes	24
e. Nous contacter	26

Partie 1 : Introduction à la télésurveillance

a. Mot de bienvenue

Dans le cadre de la prise en charge par télésurveillance des patients insuffisants cardiaques chroniques éligibles, Newcard met à disposition des professionnels de santé une plateforme web sécurisée accessible à tout moment.

Cette plateforme permet de consulter les données transmises quotidiennement par les patients depuis leur domicile, telles que le poids, la fréquence cardiaque et la tension artérielle. L'objectif est d'optimiser le suivi de la pathologie et de favoriser la détection précoce d'éventuels signes de décompensation cardiaque.

Vous avez souhaité vous impliquer dans la télésurveillance médicale de votre patients avec NEWCARD. Ce guide a été conçu pour vous accompagner dans la prise en main de la plateforme et vous aider à mieux comprendre l'environnement de télésurveillance du patient :

- les équipements mis à sa disposition ;
- les mesures réalisées à domicile ;
- le fonctionnement global du suivi médical.

La télésurveillance médicale permet de détecter précocement les signes d'aggravation d'une pathologie chronique, afin d'anticiper les complications et d'adapter la prise en charge. Elle offre également un suivi plus rapproché des patients, grâce à la transmission régulière de données depuis leur domicile.

Ce dispositif ne se substitue pas à une prise en charge en situation d'urgence.

Chez Newcard, nous accordons une importance particulière à l'accompagnement humain en proposant un suivi personnalisé des patients, des aidants et des professionnels de santé.

Tout au long de votre expérience, vous pourrez compter sur l'expertise et la disponibilité de nos équipes paramédicales, administratives et commerciales.

A propos du guide

Le guide fait partie intégrante du logiciel 1 Minute pour mon Cœur (IUD-ID de base **3770034348MPC6G**). Il détaille la présentation du logiciel, son paramétrage et son utilisation.

En cas de besoin, une version imprimée peut-être fournie sur demande à l'adresse suivante : <https://newcard.io/contacts/> ou cardio@newcard.io.

Cette démarche n'entraîne aucun frais supplémentaire. Le manuel d'utilisation vous sera livré au plus tard dans les **sept jours civils** suivant la réception de la demande.

b. L'essentiel de la télésurveillance

Destination des solutions

"1 Minute Pour Mon Cœur est un logiciel en tant que dispositif médical destiné à la télésurveillance des patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique par la collecte, l'analyse, le stockage et la visualisation de données de santé. L'application patient permet la collecte de vos données pour leur traitement par l'algorithme Newcard."

Connexion à la plateforme

Vous disposez d'un accès à la plateforme Newcard afin de suivre vos patients en télésurveillance médicale.

Accès à la plateforme : <https://app.newcard.io>

Votre identifiant correspond à l'adresse e-mail que vous nous avez communiquée.

Vous pouvez également vous connecter *via* **Pro Santé Connect**.

Indication : critères d'éligibilité

La télésurveillance médicale est un acte pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie pour les patients en ALD.



Spécificités en cardiologie (insuffisance cardiaque) :

Les patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique, quels que soient le type et l'étiologie de la maladie et remplissant une des deux conditions suivantes :

- Hospitalisation au cours des 12 derniers mois pour une poussée d'insuffisance cardiaque ;
- OU actuellement en classe NYHA 2 ou plus avec un taux de peptides natriurétiques élevé (BNP > 100 pg/mL ou NT pro BNP > 100pg/mL).

Contre-indication : critères de non-éligibilité

Les patients présentant l'une des situations suivantes sont considérés comme non éligibles à la télésurveillance :

- Impossibilité physique ou psychique pour le patient ou l'aidant d'utiliser le DM numérique de télésurveillance médicale et/ou ses accessoires de collecte selon le jugement du médecin désignant le patient dans le projet de télésurveillance médicale ;

- Refus du patient à la transmission des données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle de l'utilisation effective du DMN et à l'obtention de résultats individualisés ou nationaux d'utilisation en vie réelle ;
- Refus du patient d'avoir un accompagnement thérapeutique.

Description de l'étiquetage /explication des symboles

	Dispositif médical
	Code d'identification unique du dispositif
	Nom et adresse du fabricant légal
	Numéro de lot
	Marquage CE
	Consulter le guide d'utilisation
	Référence commerciale
	Emballage et objets à ne pas jeter
	Fragile
	Tenir à l'écart de la chaleur

*Le marquage CE affiché dans cette maquette est présenté à titre illustratif. Le marquage définitif sera apposé après délivrance du certificat MDR par l'organisme notifié.

Précautions

- 1. Ce dispositif est à usage personnel uniquement.**
- 2. Le kit est un prêt qui vous est accordé par Newcard pour la durée de votre télésurveillance.** À la fin de votre suivi, vous êtes tenu de rendre le dispositif mis à votre disposition dans les meilleurs délais et dans l'état dans lequel vous l'avez reçu. Nous vous remercions également de **conserver les boîtes et le carton d'origine**, qui vous seront utiles pour la restitution du matériel.
- 3. Confidentialité et sécurité :** Confidentialité et sécurité : Les identifiants de connexion et mots de passe sont strictement personnels et ne doivent jamais être partagés avec un tiers. L'utilisateur est invité à utiliser un mot de passe sécurisé, à activer l'authentification à double facteur (2FA), et à veiller à la protection de ses équipements afin de garantir la confidentialité et la sécurité des

données. Toute utilisation suspecte ou non autorisée du compte doit être signalée rapidement au support concerné.

4. **Le service de Newcard n'est pas un service d'urgence**, il n'a pas vocation à se substituer aux interventions des professionnels de santé. Les données enregistrées ou alertes ne sont pas lues et interprétées instantanément, mais uniquement pendant les jours et les heures définies par l'opérateur de télésurveillance. En cas de question d'ordre médical ou d'aggravation brutale de votre état, veuillez contacter un professionnel de santé ou composez le 15.
5. **Opérations préventives et régulières de maintenance** : La société Newcard pourra modifier ou adapter l'application NEWCARD ou les Conditions Générales d'Utilisation. Dans ce cas, une mise à jour de votre part pourra être nécessaire. Conformément aux CGU, cette mise à jour devra intervenir dans de brefs délais.

Utilisateurs prévus

La plateforme 1 minute pour mon cœur de Newcard est destiné à être utilisé par :

- Les professionnels de santé impliqués dans le traitement et le suivi liés à l'insuffisance cardiaque chronique.

L'application patient est destinée à être utilisée par :

- Les patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique éligibles.

Populations cibles de patients

- Patients, homme et femme, patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique.

Bénéfices cliniques

La télésurveillance médicale a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à sa prise en charge. L'utilisation du logiciel Newcard présente les bénéfices cliniques suivants :

- **Amélioration de la survie des patients (baisse de la mortalité)**
(chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque suivis en télésurveillance)
- **Amélioration de l'autonomie des patients**
(dans le cadre de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance rénale)

Caractéristiques techniques et prérequis

Une connexion internet est nécessaire pour utiliser l'application.

Logiciel 1 Minute pour mon cœur :

Navigateur	Version compatible
Google Chrome	≥ 126.0
Hardware	
Ordinateur de bureau	Écran minimum 17 pouces avec résolution 1920 x 1080 (Full HD)
Ordinateur portable	Ecran minimum 15 pouces avec résolution 1920 x 1200 (Full HD+)
Tablettes	Taille de l'écran 10 pouces avec résolution 800 x 1280
Smartphones	• Taille de l'écran 6,5 avec résolution 412 x 915 : pour Android • Taille de l'écran 6,5 avec résolution 414 x 896 : pour iPhone.

Système d'exploitation mobile	Version compatible
Android	≥ 10
iOs	≥ 10
Hardware	
Tablettes	Taille de l'écran 10 pouces avec résolution 800 x 1280
Smartphones	• Taille de l'écran 6,5 avec résolution 412 x 915 : pour Android • Taille de l'écran 6,5 avec résolution 414 x 896 : pour iPhone.

En cas de matériovigilance

Tout incident ou risque d'incident grave ayant entraîné ou pouvant entraîner le décès ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers impliquant les services de Newcard doit être signalé sans délai à Newcard à l'adresse électronique suivante : contact@newcard.io et à l'autorité compétente (**en France, à L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé - ANSM**).

Risques résiduels

Le logiciel n'a pas de contact physique direct avec le patient et ne présente pas de risque mécanique, électrique ou biologique. Les risques résiduels identifiés sont de nature technique ou logicielle ; bien que rares, ils peuvent, dans certaines situations, avoir un impact indirect sur la prise en charge du patient. Les principaux risques résiduels associés à l'utilisation de ce logiciel sont décrits ci-dessous.

1. Des mesures techniques et organisationnelles appropriées ont été définies afin d'assurer la disponibilité de la plateforme. Malgré les contrôles appliqués, un risque résiduel d'indisponibilité temporaire de la plateforme jusqu'à son rétablissement (en cas de défaillance de la connexion Internet ou d'erreur technique, etc.) demeure possible.
2. La plateforme intègre des mécanismes visant à assurer la fiabilité des alertes générées. Néanmoins, un risque résiduel d'erreurs d'alertes, incluant notamment des faux positifs, des faux négatifs, des doublons ou l'absence d'affichage d'une alerte, ne peut être totalement exclu.

-
3. Malgré les contrôles appliqués, des erreurs de transmission des mesures des patients (absence de transmission ou données inexactes ou non fiables) peuvent se produire.
 4. Newcard a mis en œuvre des mesures de cybersécurité appropriées afin de garantir la sécurité de l'ensemble des données transmises. Néanmoins, un risque résiduel de perte, d'altération ou d'accès non autorisé à ces données ne peut être totalement exclu. Dans tous les cas, Newcard s'engage à garantir la protection de la vie privée des utilisateurs et le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données, notamment le RGPD.

Inclusion des patients

L'inclusion des patients se fait directement depuis la plateforme par le cardiologue.

Après l'inclusion du patient, Newcard se charge :

- de contacter le patient ;
- d'organiser sa formation à l'utilisation du matériel ;
- d'assurer son suivi de l'observance (régularité de la prise de mesures) ;
- de gérer ses potentiels problèmes techniques.

Partie 2 : L'environnement du patient

a. Le kit de télésurveillance mis à disposition du patient

Dans le cadre de son suivi en télésurveillance médicale, le patient reçoit directement chez lui un kit de télésurveillance fourni par Newcard (ou transmis par le cardiologue).

Votre cardiologue choisit les équipements du kit en fonction de votre suivi.



LA TÉLÉSURVEILLANCE EST RÉALISABLE DEPUIS VOTRE SMARTPHONE VIA L'APPLICATION DÉDIÉE.*

*Pas de smartphone ? Un besoin spécifique ?

Nous pouvons mettre à votre disposition une tablette connectée 4G.



Elle sera exclusivement dédiée à la télésurveillance et ne pourra être utilisée à des fins personnelles.



Une **balance** connectée en Bluetooth



Un **tensiomètre** connecté en Bluetooth et un brassard



Un **manuel d'utilisation**



Assemblés dans un kit de transport

La télésurveillance médicale a pour objectif d'anticiper les signes de décompensation cardiaque et n'est donc pas un système d'urgence !



Adaptation du dispositif selon le profil du patient

Afin de faciliter l'adhésion et l'utilisation quotidienne de la télésurveillance, certaines options de simplification peuvent être mises en place selon :

- les habitudes de suivi du cardiologue ;
- les capacités numériques du patient ;
- son état clinique.

Les adaptations possibles comprennent notamment :

- **Désactivation du tensiomètre**
Le suivi peut être simplifié en désactivant la prise quotidienne de tension artérielle lorsque cela est jugé pertinent par le médecin.
- **Accompagnement téléphonique renforcé**
Pour les patients rencontrant des difficultés avec les outils numériques, un accompagnement téléphonique renforcé peut être proposé par les équipes Newcard.
- **Mise à disposition d'une tablette 4G**
Pour les patients en situation d'illectronisme ou ne disposant pas d'un accès Internet adapté, une tablette équipée d'une connexion 4G peut être fournie.

b. Le parcours de télésurveillance du patient

1 Prescription

Mon cardiologue me prescrit la télésurveillance médicale pour un suivi de ma maladie.



2 Réception

Je reçois un kit adapté à ma télésurveillance.



3 Formation

Je suis accompagné(e) à distance sur la prise en main du matériel.



4 Mon action quotidienne

(Au repos idéalement toujours à la même heure)



Toutes mes données de santé sont sécurisées.

5 Transmission

En cas d'anomalie dans mes données, mon équipe de soins est automatiquement avertie.

Ma prise en charge est alors adaptée en fonction de la situation.



6 Consultation par mon cardiologue des données transmises

Mon cardiologue peut consulter mes données à tout moment.



c. Application patient : un suivi simple au quotidien


(Parcours classique sans simplification particulière demandée par le cardiologue)

L'application patient guide quotidiennement le patient dans la réalisation de ses mesures de santé.

Chaque jour, le patient est invité à :

- mesurer son poids ;
- mesurer sa tension artérielle ;
- mesurer sa fréquence cardiaque ;
- répondre à un questionnaire de symptômes.

L'application a été conçue pour être simple d'utilisation et accompagner le patient étape par étape lors de sa prise de mesures.

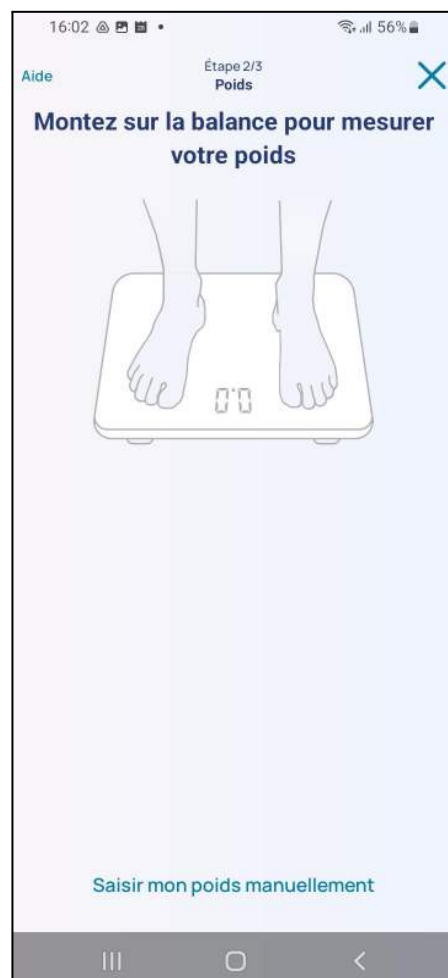

Questionnaire de symptômes

Après la réalisation de ses mesures, le patient répond à une question portant sur son état général.

Deux réponses sont possibles :

- « Je me sens comme d'habitude » ;
- « Je me sens moins bien qu'hier ».

Si le patient indique se sentir comme d'habitude, le questionnaire se termine.

En revanche, s'il signale une aggravation de son état, un questionnaire complémentaire apparaît afin de préciser les symptômes ressentis.

16:02 56%

Étape 3/3
Symptômes

< Retour

Je me sens comme d'habitude

Je me sens moins bien qu'hier

16:03 56%

Étape 3/3
Symptômes

< Retour

Par rapport à hier, quelle gêne nouvelle ressentez-vous ?

1 ou plusieurs réponses possibles

☐ Je tousse plus


☐ Je suis plus essoufflé

☐ Je rajoute un oreiller pour dormir

☐ Je suis plus fatigué

☐ J'ai les chevilles plus gonflées

Rien à signaler

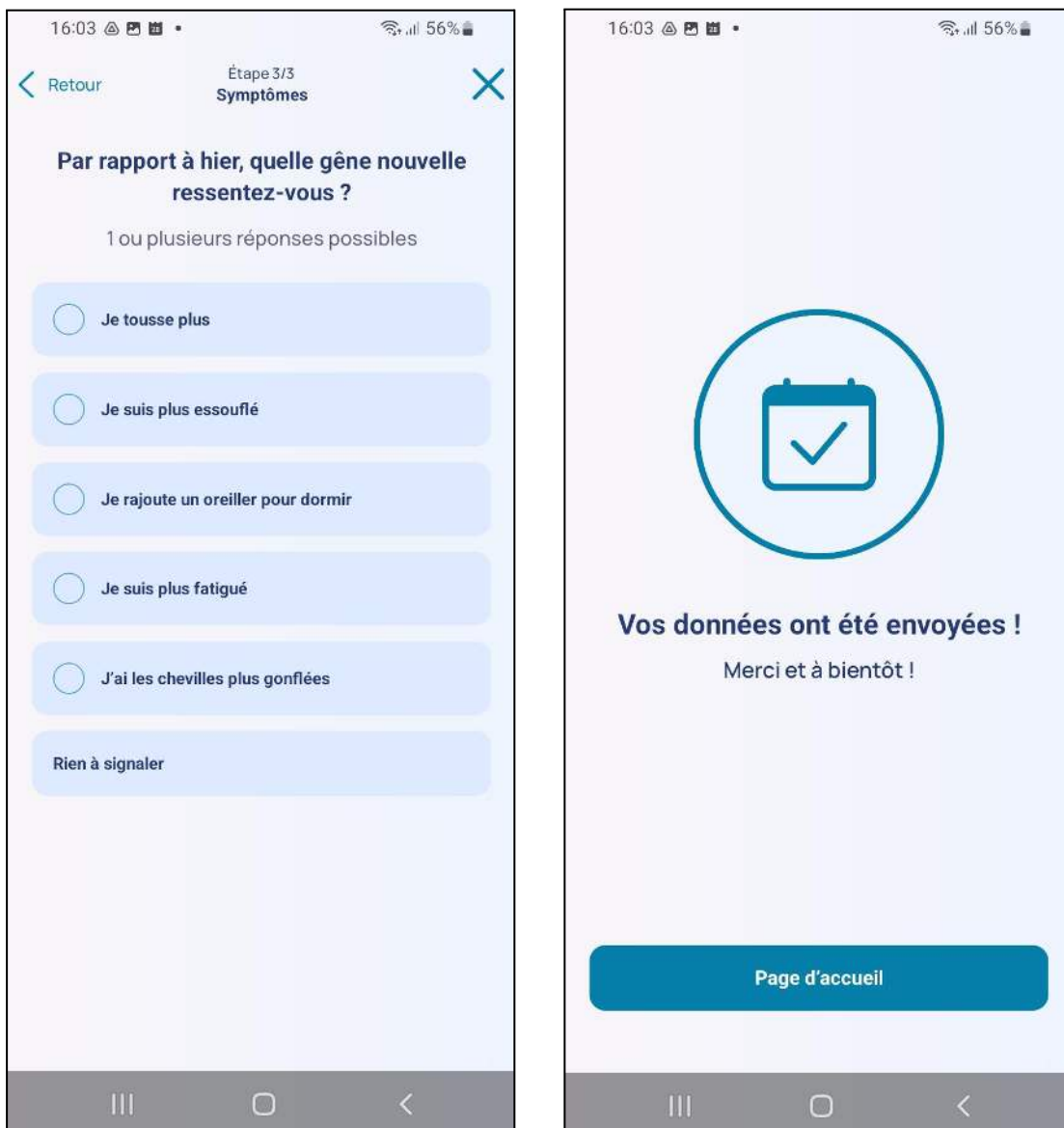

Transmission automatique des données

Une fois les mesures et le questionnaire complétés, l'ensemble des données est automatiquement transmis à la plateforme sécurisée Newcard.

Les professionnels de santé impliqués dans le suivi peuvent alors consulter les informations directement depuis leur espace professionnel.



Autres fonctionnalités de l'application patient

L'application propose également plusieurs fonctionnalités complémentaires permettant au patient :






- de consulter ses statistiques ;
- de saisir une analyse biologique ;
- de signaler une absence ;
- de saisir manuellement certaines données si nécessaire ;
- d'accéder à ses paramètres.

Consulter ses statistiques

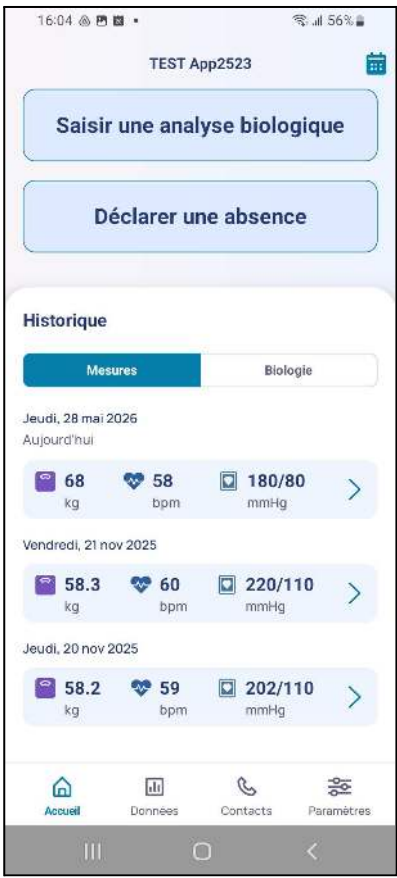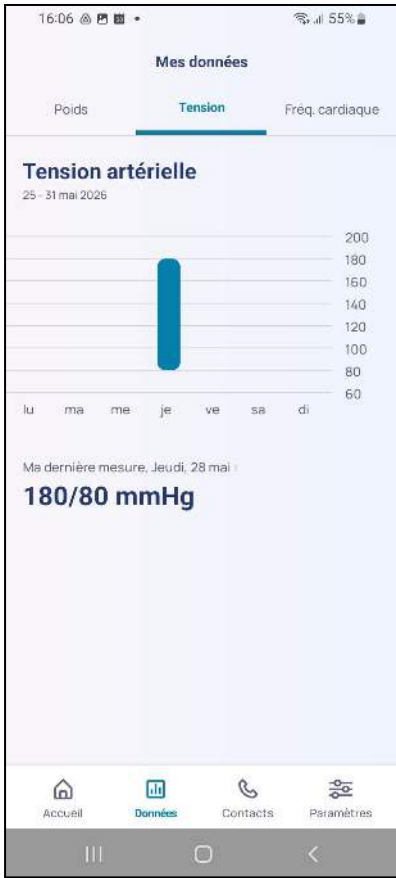

Saisir une analyse biologique

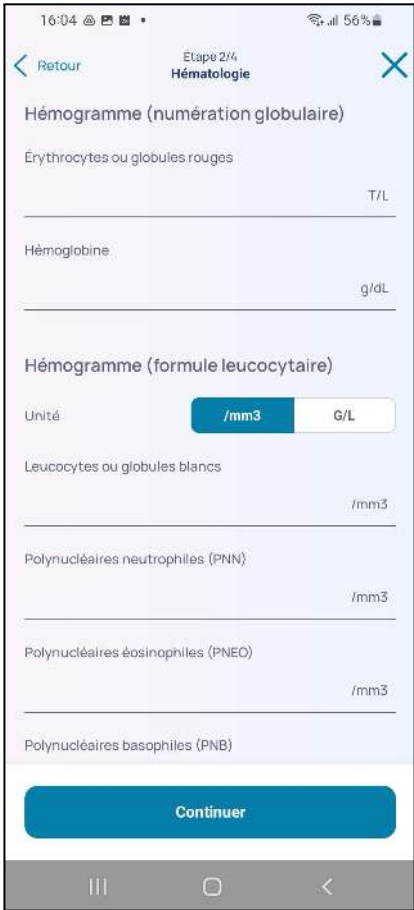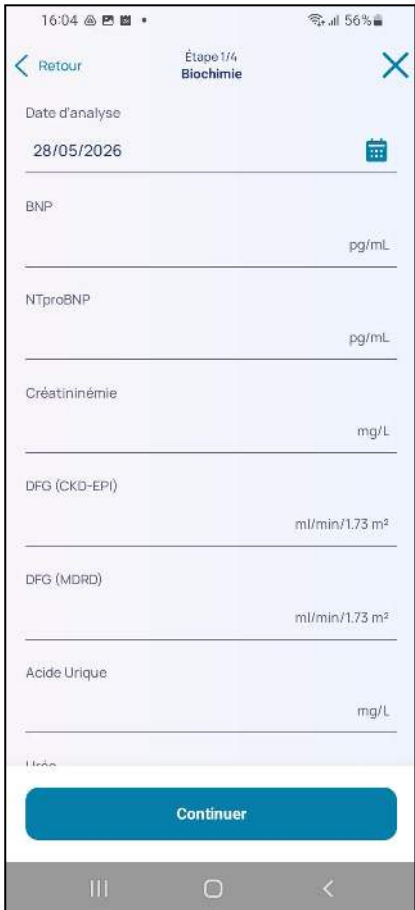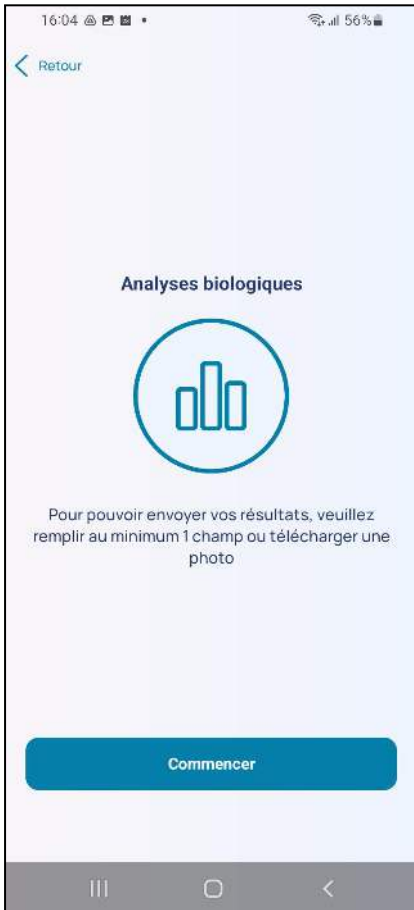

16:04 56%

Étape 3/4
Autres

Hématurie

☒ Je ne sais pas ☐ Oui ☐ Non

Ou renseigner la valeur

_____ hematies/mm3 v

Protéinurie sur 24h

_____ mg/24h

Protéinurie sur échantillon

_____ mg/g

Calcium

_____ mg/L

Continuer

16:05 55%

Étape 4/4
Photo

Merci d'ajouter les photos de chaque page de vos résultats d'analyses biologiques



Ajouter une photo

Continuer

Signaler une absence

16:05 55%

Retour Absence

Indiquez la raison de votre absence

 Hospitalisation pour le cœur

 Autre hospitalisation

 Raison personnelle

16:05 55%

Retour Absence

Veillez saisir les dates de votre absence

du

29/05/2026 


au



optionnelle

Envoyer mon absence

Accéder à ses paramètres

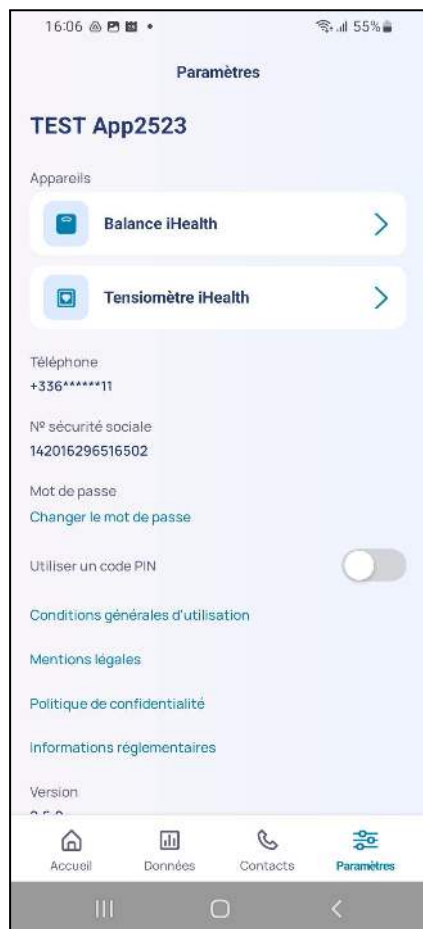

L'ensemble de ces fonctionnalités est présenté au patient lors de sa formation initiale. Elles sont également détaillées dans le guide d'utilisation remis avec le matériel.

Partie 3 : L'environnement du médecin généraliste

a. Première connexion sur la plateforme

Lors de votre première connexion à la plateforme de télésurveillance Newcard, il vous suffit de renseigner vos identifiants de connexion.

Il vous sera ensuite demandé d'accepter les **Conditions Générales d'Utilisation** (CGU).

En acceptant ces CGU, vous reconnaissez avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du service et vous vous engagez à :

- maintenir la confidentialité de vos identifiants de connexion ;
- utiliser la plateforme conformément à sa destination ;
- ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Les CGU sont accessibles à tout moment dans l'onglet « **Documents** » de votre profil.

Vous pouvez également vous connecter *via* le portail « **Pro Santé Connect** ».




b. Présentation générale de la plateforme

La plateforme Newcard est un outil numérique sécurisé qui vous permet :

- d'accéder aux données de vos patients télésurveillés,
- de consulter les alertes générées
- d'accéder aux informations relatives aux professionnels de santé impliqués dans le suivi.

Dès la page d'accueil, le tableau de bord vous offre une vue globale de l'activité de télésurveillance.

Les différentes informations sont interactives et accessibles directement depuis ce tableau ou via la barre latérale gauche de navigation.

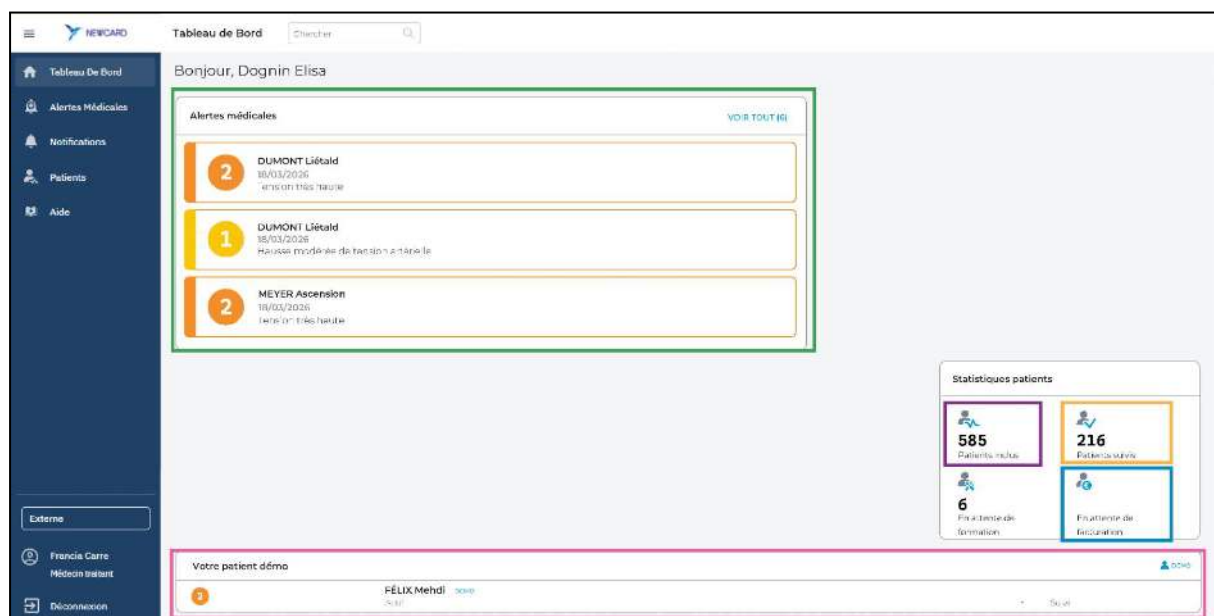

Ainsi vous pouvez directement retrouver :

- ✓ Les **alertes médicales** en cours,
- ✓ Le nombre de **patients inclus**,
- ✓ Le nombre de **patients suivis**,
- ✓ La liste de vos **patients « démo »**.

Toutes ces données sont cliquables et vont permettre d'accéder directement aux pages concernées. Ces éléments sont également trouvables dans les catégories sur la **barre latérale** de votre plateforme.

c. La fiche patient

La fiche patient est l'élément central du suivi en télésurveillance de vos patients.

Elle regroupe l'ensemble des informations nécessaires à leur prise en charge : les données transmises régulièrement par le patient, l'historique des alertes, les périodes d'hospitalisation ou d'absence, ainsi que la période de télésurveillance.

En cliquant sur le nom d'un patient, vous accédez à sa fiche dédiée :

- Toutes les informations essentielles au suivi du patient sont accessibles dans la colonne située à droite de l'écran.
- Si le patient présente une alerte en cours, celle-ci apparaît clairement en haut de sa fiche afin de faciliter son identification.



Sur la fiche patient, vous pouvez consulter simultanément plusieurs graphiques permettant de suivre l'évolution des données de santé du patient :

- le poids,
- la tension artérielle,
- la fréquence cardiaque,
- ainsi que le suivi des symptômes.

À chaque prise de mesure, le patient indique son état général en sélectionnant l'une des options suivantes :

- « Je me sens comme d'habitude »,
- « Je me sens moins bien qu'hier »


Si le patient signale qu'il se sent moins bien, une liste de symptômes lui est proposée afin de préciser son état :

- Je tousse plus,
- Je suis plus essoufflé,
- Je rajoute un oreiller pour dormir,
- Je suis plus fatigué,
- J'ai les chevilles plus gonflées,
- Rien à signaler.

Lorsque le patient indique se sentir « comme d'habitude », ou sélectionne « Rien à signaler », la prise de mesure se termine sans renseignement complémentaire.

Les indicateurs affichés sur le graphique permettent de visualiser rapidement ces réponses :

- Un indicateur bleu signifie que le symptôme n'a pas été signalé ;
- Un indicateur rouge indique que le patient a déclaré ce symptôme lors de sa prise de mesure.

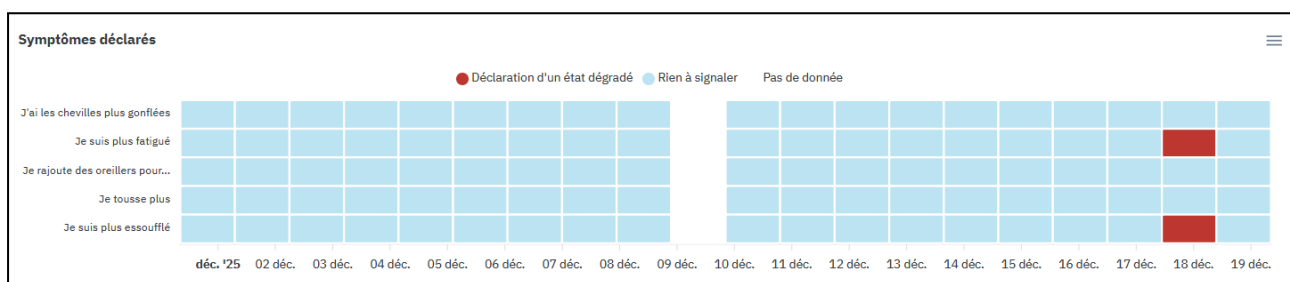

Vous pouvez ajuster la période d'affichage des données directement depuis les graphiques. Pour cela, maintenez le clic gauche de votre souris sur l'un des graphiques puis faites glisser le curseur afin de sélectionner la période souhaitée.

Tous les graphiques étant synchronisés, la période sélectionnée s'applique automatiquement à l'ensemble des courbes affichées.

Des périodes prédéfinies (semaine, mois, etc.) sont également accessibles au-dessus des graphiques. Un calendrier permet par ailleurs de choisir précisément les dates à visualiser. Par défaut, l’affichage est configuré sur une période d’un mois.



Enfin, en haut à droite de chaque graphique, plusieurs actions sont disponibles pour faciliter la navigation dans l’historique des données du patient.

En haut à droite de chacun des graphiques, vous retrouvez une liste de potentielles actions :



-  Zoom positif ou négatif sur les graphiques afin de pouvoir voir le détail d'une période.
-  Sélection d'une période précise que vous souhaitez agrandir sur tous les graphiques.
-  Variation de la période de visualisation des données.
-  Remise sur la période de visualisation des données par défaut : 1 mois.
-  Téléchargement de chaque graphique individuellement dans 3 formats visuels différents :
 - Le format SVG qui correspond à une image web
 - Le format PNG qui correspond à une image classique
 - Le format CSV qui correspond au format Excel (exportation de données brutes)

Sous les graphiques du patient, vous avez accès d’autres informations supplémentaires :

Commentaires et historique :

Vous retrouvez tout l’historique médical, et d’accompagnement thérapeutique.. Zone dans laquelle vous pouvez également laisser des commentaires.

Pour laisser un commentaire, vous pouvez directement cliquer sur le bouton en haut à droite de la fiche patient.



Evènements médicaux		Accompagnement Thérapeutique	
Commentaire			ENREGISTRER
19/12/2025 15:59	1 ALERTE 1 Dégradation clinique	PLUS D'INFO	
12/11/2025 09:52	1 ALERTE 1 Dégradation clinique	PLUS D'INFO	
11/01/2025 14:51	2 ALERTE 2 ★★★★☆ Hausse de dyspnée	PLUS D'INFO	
12/12/2024 11:55	2 ALERTE 2 Hausse de dyspnée	PLUS D'INFO	

Données médicales					
12/04/2026					
DATE D'ORDONNANCE 12/04/2026	MODE D'INCLUSION Droit commun	NYHA -	BNP -	NT PRO BNP -	TAILLE 150 cm
FONCTION SYSTOLIQUE -	HTA -	DIABÈTE -	ANÉMIE CHRONIQUE -	ATTEINTE RESPIRATOIRE -	INSUFFISANCE RÉNALE -
ANTÉCÉDENTS DE TROUBLES DU RYTHME SUPRA V -	RYTHME ACTUEL Sinusal	STIMULATEUR	BÉTABLOQUANT -	AUTRE BRADYCARDISANT -	IEC / SARTANS -
DIURÉTIQUES -	ANTI ALDOSTÉRONE -	SACUBITRIL -	GLIFLOZINE -		
AFFICHER MOINS					

Données médicales du patient :

Enfin, tout en bas de la fiche patient, vous retrouvez les données médicales qui ont été renseignées pour chaque période d'inclusion.

Informations patient et suivi

Vous pouvez également retrouver sur la droite de la fiche plusieurs informations dont :

- Les coordonnées du patient,
- Son état médical,
- Un récapitulatif des professionnels de santé inclus dans le service de télésurveillance (en cliquant sur un nom, vous accédez à ses coordonnées),
- Les informations sur son inclusion.

Pour rappel, les différents statuts médicaux qui existent sont :

- observant,
- hospitalisé,
- hospitalisé pour le coeur,
- de retour d'hospitalisation,
- absent,
- de retour d'absence.

L'algorithme est optimisé en fonction de cet état.

Période de suivi

ORDONNANCE EN COURS

12/04/2026

FIN DE VALIDITÉ DE L'ORDONNANCE

08/10/2026

ORDONNANCE

-

CGU ACCEPTÉ

03/12/2025

Identité

STATUT

Suivi Actif

SEXE *

Femme

DATE DE NAISSANCE *

24/02/1969 - 57 ans

RÉF. INST.

BA-468e

NOUVELLE RÉF. INST.

e46-468e

NIR

269029551678064

CODE DE L'ORGANISME DE RATTACHEMENT

02 759 4029

CODE DE FACTURATION

Niveau 1 - TVB 2 - 56€ / Mois

DÉLAI MOYEN ENTRE DEUX PRISES

1.6 jour(s)

Contact

PORTABLE

+33659520811

FIXE

-

EMAIL

Arabelle_bonnet59@Patient.Ncd

ADDRESS

106 Passage Du Sommerard 81506
Rueil-Malmaison

Personne à contacter en cas d'absence

NOM

Julie Marie

EMAIL

Julie20@Patient.Ncd

TÉLÉPHONE

+33659520811

NATURE DU LIEN

Enfant

Encadrement



ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

LEROY ET LEMOINE



PRESCRIPTEUR TLS

ROY Jeannel



INSTALLATEUR

INSTALLATEUR Officiel



MÉDECIN TRAITANT

CARRE Francia



ACCOMPAGNANT THÉRAPEUTIQUE

BLANC Cyrielle


d. Visualiser les alertes

Vous retrouvez sur le tableau de bord l'ensemble des alertes en cours avec plusieurs éléments mis en avant :

- le niveau de gravité de l'alerte (1, 2 ou 3),
- le nom du patient, la date de déclenchement,
- le type de données ayant déclenché l'alerte (poids, tension, fréquence cardiaque)
- ainsi que le professionnel de santé ayant pris en charge l'alerte.

Il existe trois états de l'alerte :

- *Déclenchée* : l'alerte a été envoyée, mais pas encore prise en compte;
- *Vue* : un professionnel de santé participant à la télésurveillance s'est connecté sur la plateforme et sur la fiche du patient en question, mais n'a pas pris en charge l'alerte
- *En cours* : l'alerte a été prise en charge, mais elle n'est pas terminée.

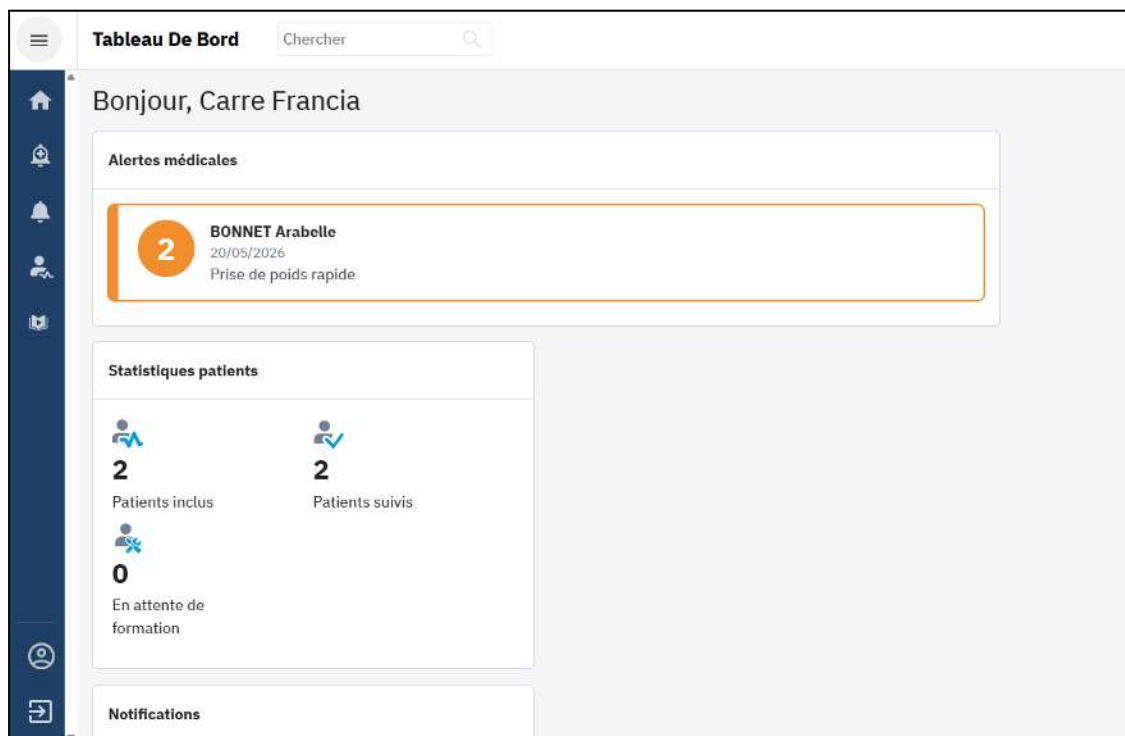

Pour accéder aux données d'un patient en alerte, cliquez sur le nom de ce patient. Vous arrivez alors sur la fiche patient : l'alerte est affichée tout en haut. Sous cette alerte, vous trouverez les graphiques de données du patient.



e. Nous contacter

*En cas de question, vous pouvez contacter la société NEWCARD, Société par Actions Simplifiée, au **03 20 14 71 14**, dont le siège social est situé au 236 Avenue Clément Ader 59118 Wambrechies.*



Newcard



Newcard-TLS

La solution 1 Minute pour mon cœur est un dispositif médical de classe IIa destiné à la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Fabriqué par Newcard, ce produit de santé réglementé porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Newcard met également à la disposition des patients du matériel en complément du logiciel de télésurveillance, afin de faciliter la récolte et l'analyse des données. Ce dispositif n'est pas un système d'urgence et doit être utilisé conformément aux instructions figurant dans la notice d'utilisation. Il est pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie.



*Le marquage CE affiché dans cette maquette est présenté à titre illustratif. Le marquage définitif sera apposé après délivrance du certificat MDR par l'organisme notifié.

Siège social : Wambrechies - 821 766 961 - Immatriculée au Registre Commerce et des Sociétés de Lille Métropole B.

Date de création : 23/06/2026 - Image : Newcard - Ne pas jeter sur la voie publique - MPC-NTU-MG-01