


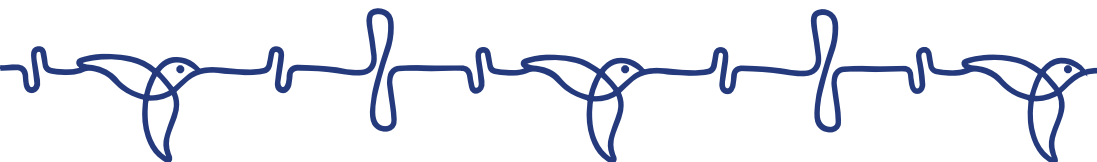

1 MINUTE POUR *mon cœur*

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

Application mobile




PRENDRE VOS MESURES

En 1 minute chrono

1 Ouvrir l'application Newcard

Disponible sur :

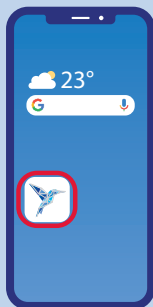

2 Sélectionner


Prendre mes mesures

3 Vous peser



(balance posée sur sol dur et stable)

4 Répondre aux questions

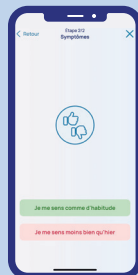

5



Vos données sont surveillées par votre infirmi(ère) Newcard et votre cardiologue

INDIQUER UNE ABSENCE

Sélectionner

Declarer une absence

sur la
page d'accueil



Indiquer la raison
de l'absence



Sélectionner les dates
de l'absence et


Envoyer mon absence



NOS CONSEILS

- Vérifier que les piles sont présentes dans la balance
- Poser votre balance sur sol dur et stable
- Si votre tablette n'a plus de batterie, brancher la au chargeur sur une prise secteur

Pour la première mesure, n'hésitez pas à demander à vos proches, votre aide à domicile, ou votre voisin !

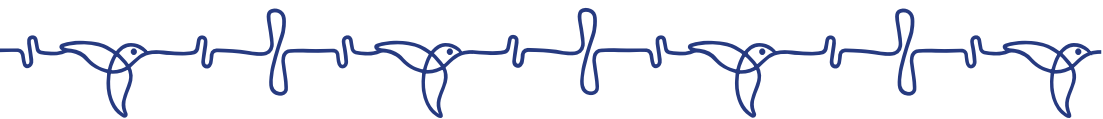

CONTACTS



Téléphone

+32 78 48 16 93



Mail

ic-be@newcard.io

En cas d'urgence médicale :
appeler le 112

EN SAVOIR PLUS



[http://26570142.hs-sites-eu1.com/
guide-dutilisation-complet](http://26570142.hs-sites-eu1.com/guide-dutilisation-complet)

Nous vous remercions de conserver les emballages d'origine pour transporter le kit ou nous le renvoyer.

Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (2019).
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.

Création par NEWCARD SAS - Dernière modification : 28 avril 2026 - Imprimé par : Référence Directe

Ne pas jeter sur la voie publique – Référence : MPC-NTU-APP-PAT-ST-BEL-00



Parc du Moulin
236 Av. Clément Ader
59118 Wambrechies
www.newcard.fr