


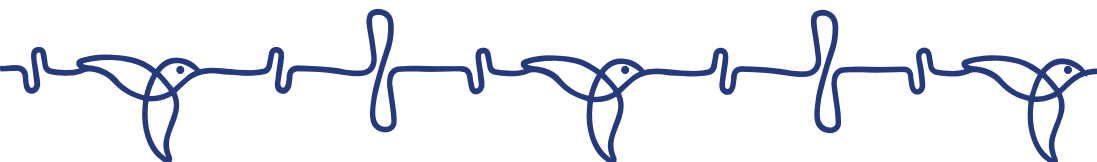

1 MINUUT VOOR *mijn hart*

Snelle gebruiksgids
Mobiele applicatie




UW METINGEN OPNEMEN

In 1 minuut tijd

1 De Newcard-app openen

Beschikbaar op :

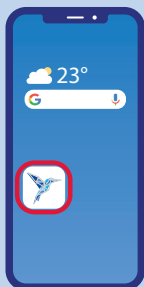

2 Selecteren


Mijn metingen nemen

3 Uw gewicht aangeven



(weegschaal op een harde en stabiele vloer plaatsen)

4 Beantwoord de vragen

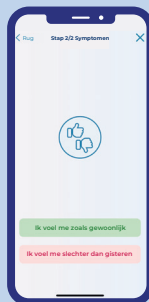

5



Uw gegevens worden bewaakt door uw Newcard-verpleegkundige en uw cardioloog.

EEN AFWEZIGHEID AANGEVEN

Selecteren

Een afwezigheid melden

Op de
startpagina



De reden van de
afwezigheid aangeven



Selecteer de data van
de afwezigheid en

Stuur mijn afwezigheid



ONZE TIPS

- Controleer of de batterijen in de weegschaal zitten.
- De weegschaal moet op een harde en stabiele vloer worden geplaatst.
- Als de batterij van je tablet leeg is, sluit deze dan met de oplader aan op een stopcontact.

Voor de eerste meting, aarzel niet om uw familie, uw thuiszorgmedewerker of uw buurman/buurvrouw om hulp te vragen!



CONTACTEN



Telefoon

+32 78 48 16 93



E-mail

ic-be@newcard.io

**Bij medische noodsituatie,
bel 112**

MEER INFORMATIE



[http://26570142.hs-sites-eu1.com/
volledige-gebruikershandleiding](http://26570142.hs-sites-eu1.com/volledige-gebruikershandleiding)

**Wij danken u om de originele verpakking te bewaren om de kit
te vervoeren of naar ons terug te sturen.**

Dit medisch hulpmiddel van klasse I is een gezondheidsproduct dat, overeenkomstig deze regelgeving, het CE-markering (2019) draagt. Lees aandachtig de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Gecreëerd door NEWCARD SAS - Laatste wijziging: 29 april 2026 - Afgedrukt door: Référence Directe

Niet op de openbare weg gooien – Referentie : MPC-NTU-APP-PAT-ST-NL-BEL-01



Parc du Moulin
236 Av. Clément Ader
59118 Wambrechies
www.newcard.fr