

L'APPLICATION NEWCARD : TÉLÉCHARGER, CONNECTER, COMMENCER

Bienvenue dans votre guide simple et rapide pour démarrer avec Newcard !



1.

➤ Ouvrir le Play Store sur votre téléphone



➤ Rechercher NewCard dans la barre de recherche



➤ Télécharger l'application en cliquant sur


Installer

➤ Confirmer le téléchargement et ouvrir l'application

Ouvrir

OU


Utilisez le mode photo pour lire le QR code suivant :

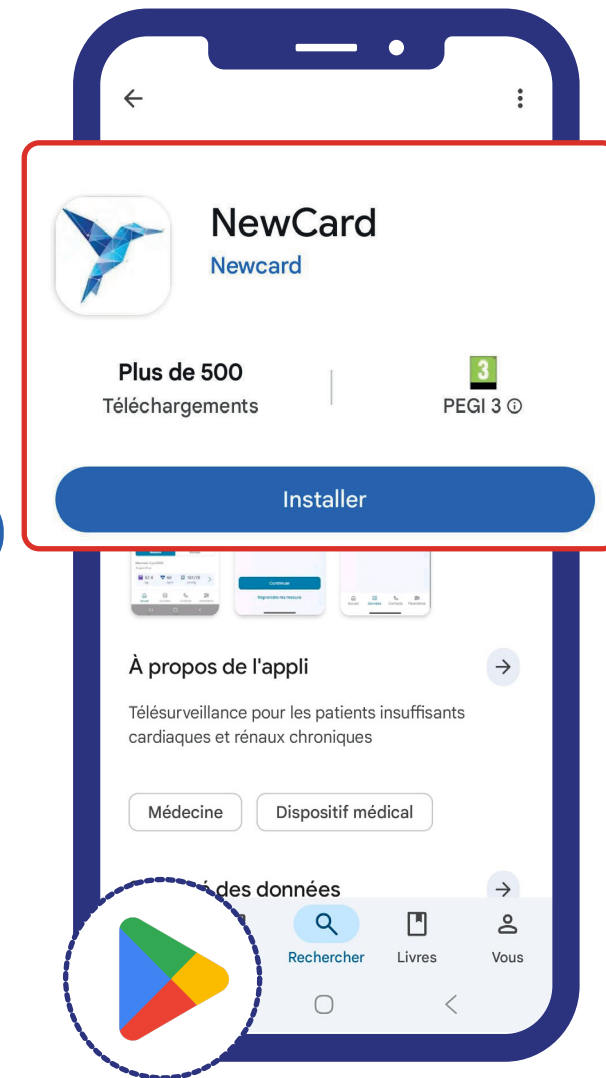

2.

> Cliquer sur :

Première connexion
pour commencer l'inscription

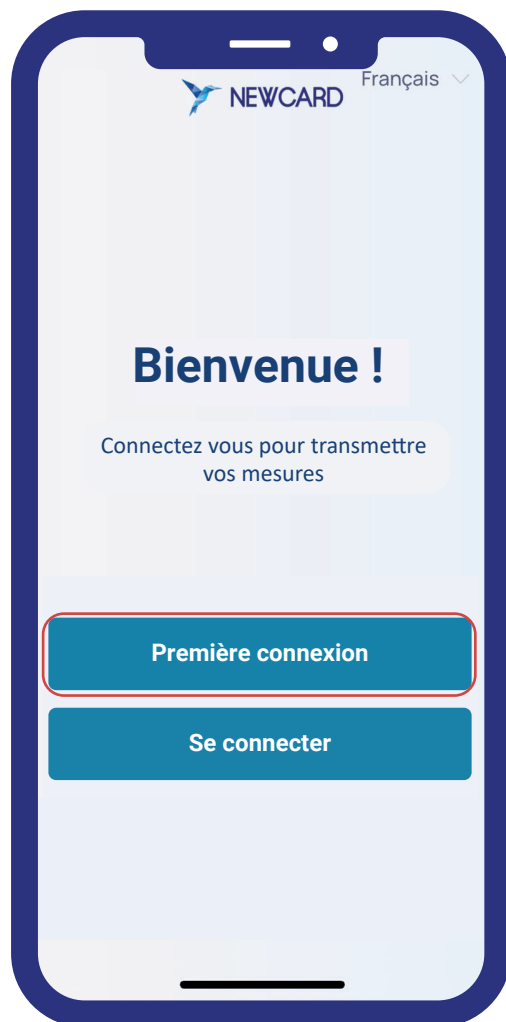

> Entrer votre identifiant :
7 caractères



Je note mon identifiant

.....


OU

Identifiant reçu par SMS :

NEWCARD
Félicitations Newcard est sur votre téléphone !
Cliquez sur Première connexion et écrivez votre
identifiant : **xxxxxxx**

3.

➤ Saisir le code de validation, 6 chiffres. Reçu par SMS

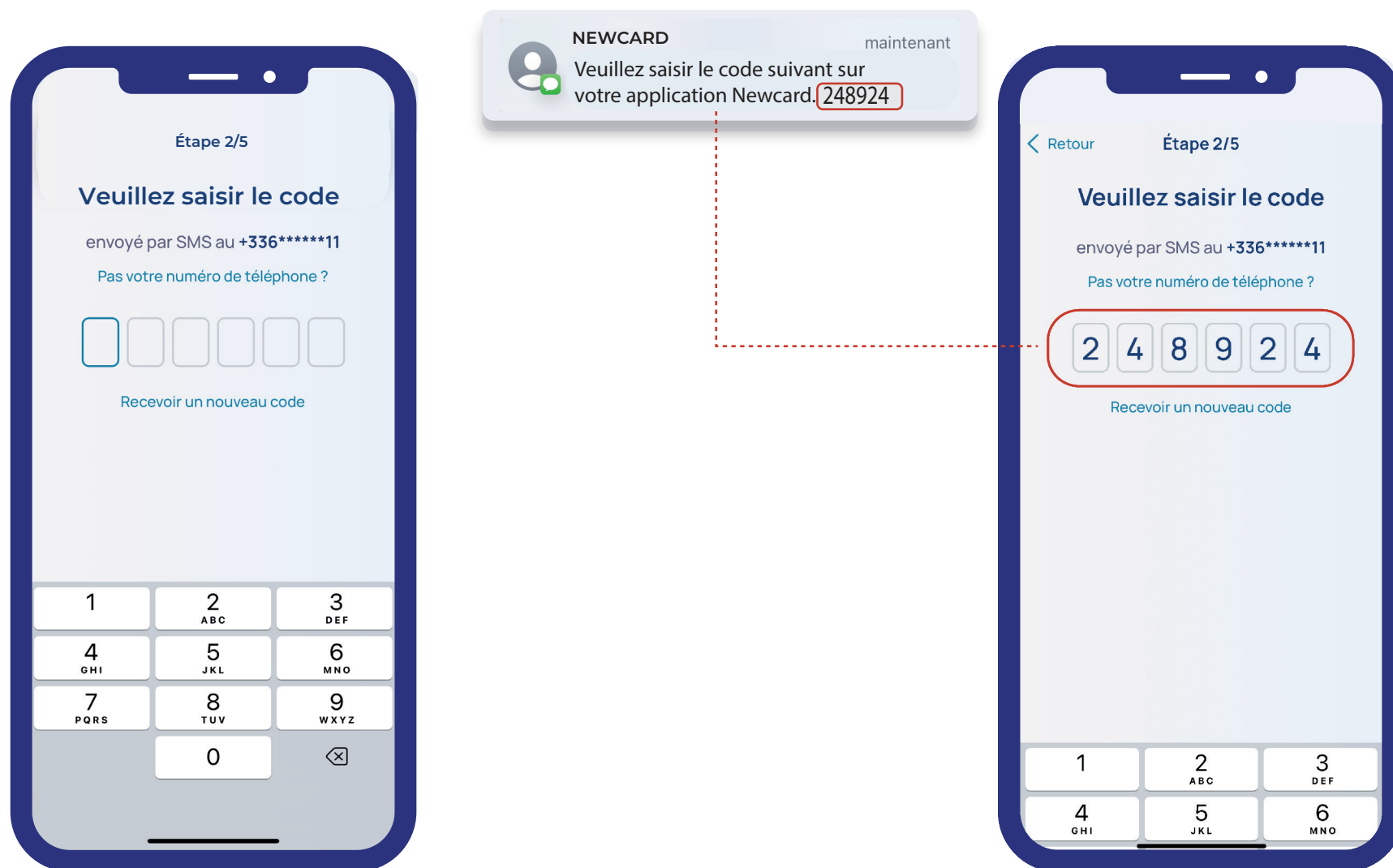

4.

> Créer un mot de passe secret.
Il doit contenir :

- ✓ Au moins 8 caractères
- ✓ Au moins une majuscule
- ✓ Au moins un chiffre
- ✓ Au moins un caractère spécial
(ex : # ? ! @ \$ % ^ & * -)



Je note mon mot de passe

.....

Étape 3/5


Veuillez créer un mot de passe

Le nouveau mot de passe doit contenir :

- × 8 caractères
- × 1 lettre majuscule
- × 1 caractère spécial (#?!@\$%^&* -)
- × 1 chiffre

Répéter le mot de passe

Enregistrer

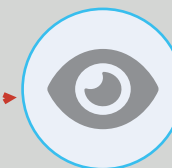

Astuce

Appuyer sur voir
pour afficher le
mot de passe.


Les 2 mots de
passe doivent être
identiques.

> Enregistrer le mot de passe en cliquant sur :

Enregistrer

5.

- Créer un code secret (PIN) à 4 chiffres

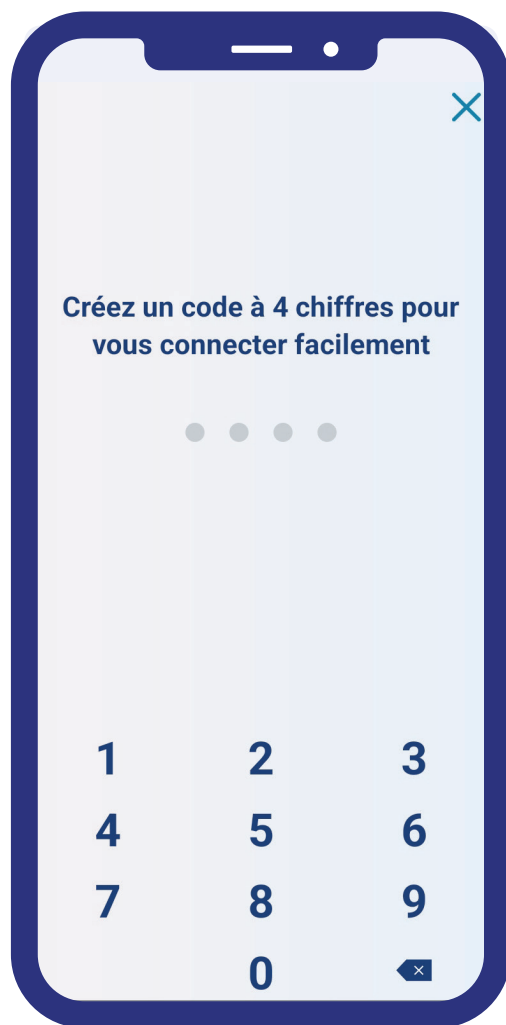

Je note mon code secret

.....

- Répétez le code à nouveau




Astuce

Utilisez le même
code secret que
celui de votre
téléphone

Félicitations, votre compte est crée !

6.

> Accepter les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

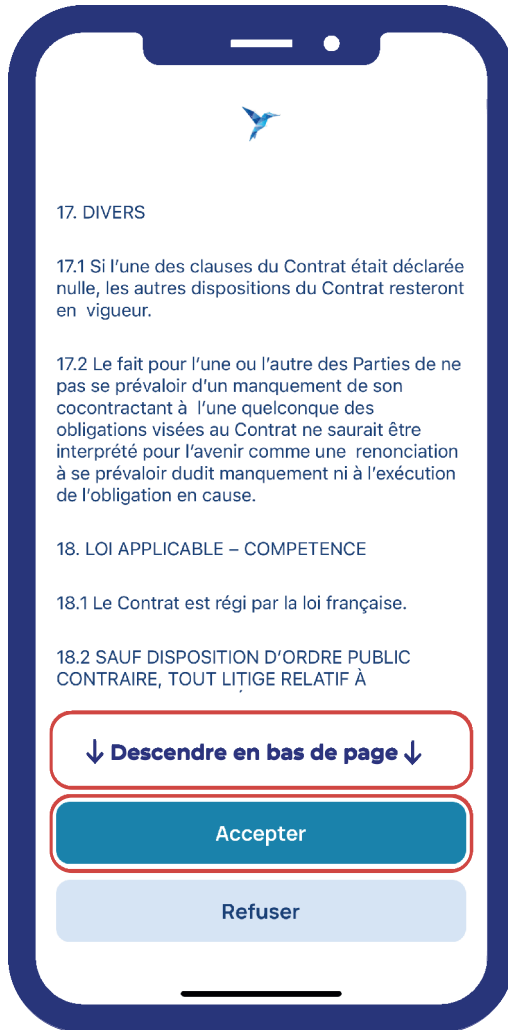

> Lire attentivement les Conditions Générales d'utilisation et descendre en bas de la page

1 ↓ Descendre en bas de page ↓

> Cliquer sur

2 Accepter
pour valider


7.

> Autoriser Newcard à utiliser le Bluetooth de votre téléphone




> Cliquer sur :

Accéder à mes paramètres

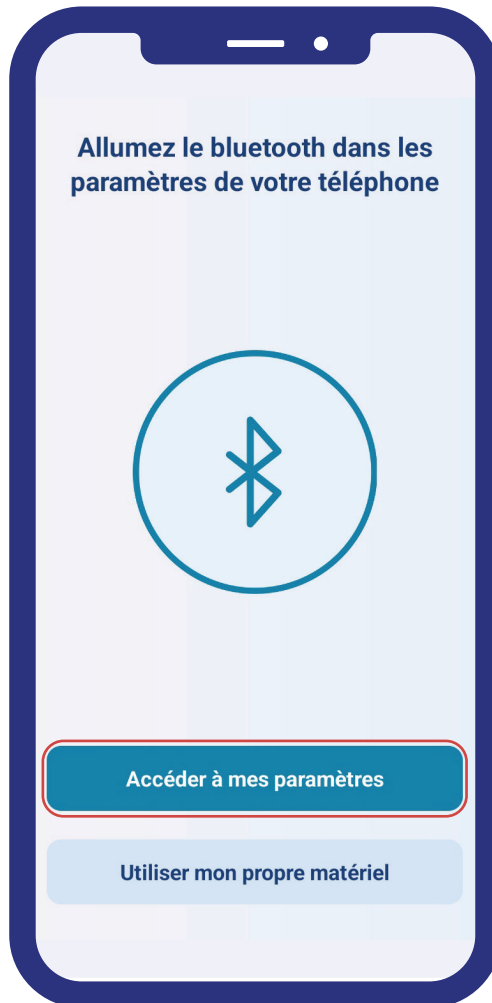

> Cliquer sur :

Autoriser

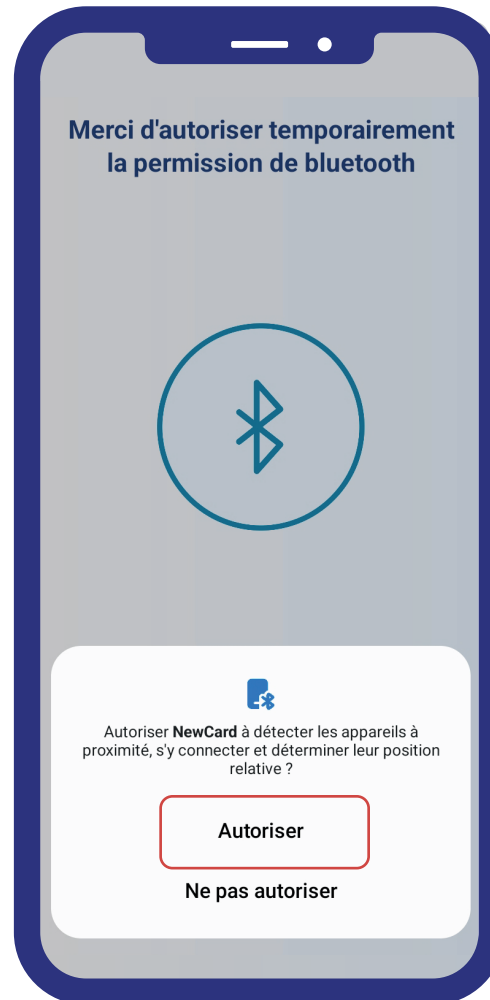

> Cliquer sur :

D'accord



8.

➤ Prendre votre tensiomètre. Vérifier que les piles sont bien insérées



➤ Cliquer sur :

Continuer



➤ Appuyer sur le bouton du tensiomètre physique



✓ **BRAVO !**
« Tensiomètre connecté avec succès »


Cliquer sur :

Continuer




9.

➤ Prendre votre balance. Vérifier que les piles sont bien insérées

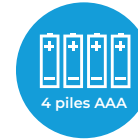

➤ Cliquer sur :

Connecter

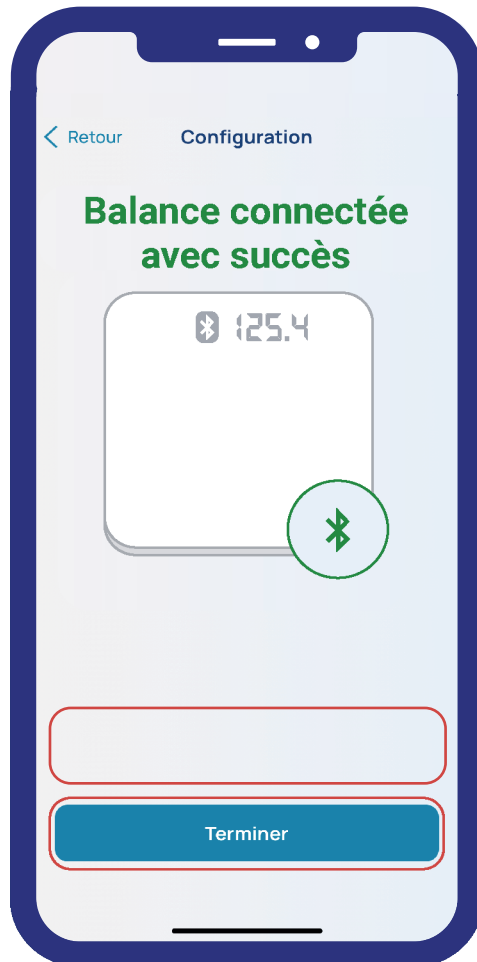


➤ Connexion automatique



BRAVO !

« Balance connectée avec succès »

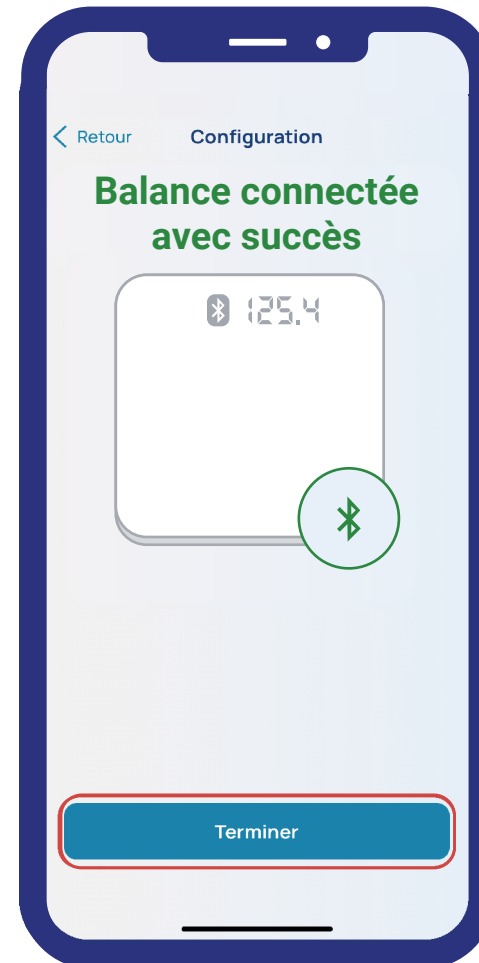

➤ Cliquer sur :

Terminer

Félicitations, vous êtes prêts pour vos premières mesures !

10.

- Prendre vos mesures : Poids, tension et symptômes
- Cliquer sur : **Prendre mes mesures**




Besoin d'aide ?

N'hésitez pas à demander à vos proches, votre aide à domicile ou votre voisin.

11.

- En cas de fermeture de l'application cliquer sur : **Se connecter**

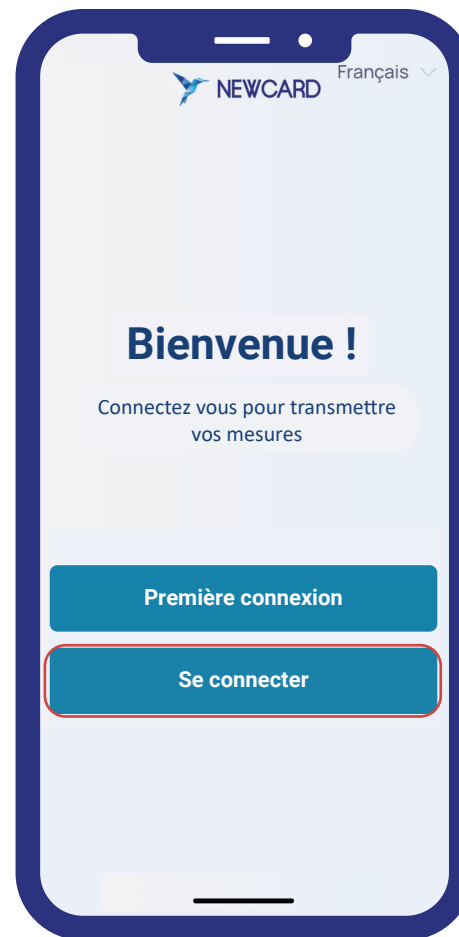

Utilisez :

- Code secret

OU

- Identifiant + Mot de passe



Téléphone : 03 20 14 71 14



1 Minute pour mon cœur : cardio@newcard.io



1 Minute pour mes reins : nephro@newcard.io

1 Minute pour mon cœur et 1 Minute pour mes reins – Fabriqués par Newcard, ces dispositifs sont destinés à la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance rénale, incluant les patients présentant une MRC stade IV ou V, ainsi que les patients transplantés rénaux greffés depuis plus de trois mois. Newcard met également à la disposition des patients du matériel en complément du logiciel de télésurveillance, afin de faciliter la récolte et l'analyse des données. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation. Ces dispositifs ne sont pas des systèmes d'urgence. En cas de problème, veuillez contacter votre médecin ou le cas échéant, le 15. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Création par NEWCARD SAS. – Ne pas jeter sur la voie publique – Référence : NEW-NTI-APP-AND-06 Date de création : 10 juin 2026 - Imprimé par : Référence Directe
Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.