


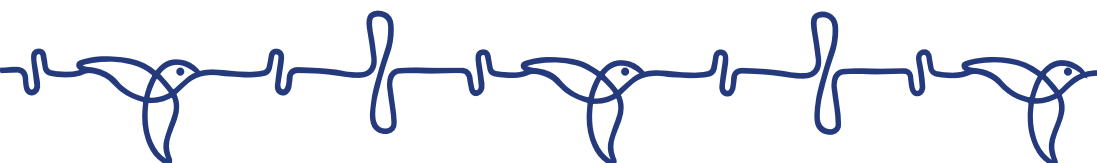

1 MINUTE POUR *mon cœur*


GUIDE RAPIDE D'UTILISATION
Application mobile



PRENDRE VOS MESURES

En 1 minute chrono


1 Ouvrir l'application Newcard

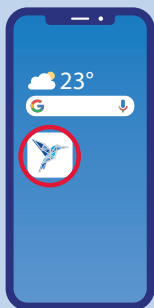

2 Sélectionner

Prendre mes mesures

4 Pour transmettre ma tension

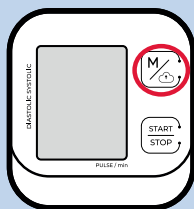

Appuyer sur le bouton



5 Vous peser



(balance posée sur sol dur et stable)

INDIQUER UNE ABSENCE

Sélectionner

Declarer une absence

sur la
page d'accueil



Indiquer la raison
de l'absence



Sélectionner les dates
de l'absence et

Envoyer mon absence

3 Bien prendre votre tension

En 4 étapes



1. S'asseoir et passer le brassard autour du **bras gauche**.
2. Le **bandeau rouge** doit être placé à l'intérieur du pli du coude.
3. Placer le bras gauche sur une table, la **paume de la main orientée vers le ciel**.


4. Appuyer sur **start**



6 Répondre aux questions



7 Envoyer vos données

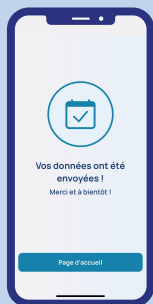

8



Vos données sont surveillées par votre infirmier(ère) Newcard et votre cardiologue



NOS CONSEILS

- Vérifier que les piles sont présentes dans la balance et dans le tensiomètre.
- Pour la tension, asseyez vous confortablement et dans un endroit calme.
- Ne déroulez/dépliez pas entièrement le brassard, glissez votre bras dedans.
- Placez le brassard sur votre bras, au même niveau que votre cœur.
- La marque rouge doit être dans le creux de votre coude.

Pour la première mesure, n'hésitez pas à demander à vos proches, votre aide à domicile, ou votre voisin !



CONTACTS



Téléphone



SMS



Mail

IC-Belgique@newcard.io

En cas d'urgence médicale
appeler le 112

Nous vous remercions de conserver les emballages d'origine pour transporter le kit ou nous le renvoyer.

EN SAVOIR PLUS



[http://26570142.hs-sites-eu1.com/
-guide-dutilisation-complet](http://26570142.hs-sites-eu1.com/-guide-dutilisation-complet)

Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (2019).
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.

Création par NEWCARD SAS - Dernière modification : 20 décembre 2024 - Imprimé par : Pixartprinting

Ne pas jeter sur la voie publique – Référence : MPC-NTU-APP-PAT-00



Parc du Moulin
391 Av. Clément Ader
59118 Wambrechies
www.newcard.fr