


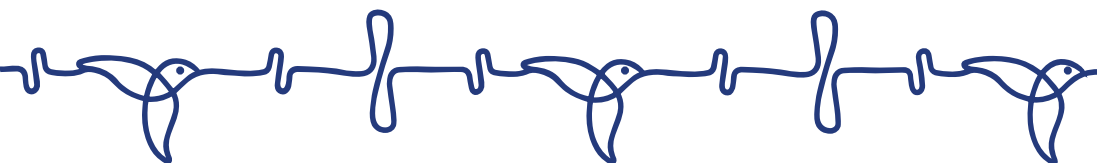

1 MINUUT VOOR *mijn hart*

Snelle gebruiksgids
Mobiele applicatie



UW METINGEN OPNEMEN

In 1 minuut tijd

1 De Newcard-app openen

Beschikbaar op :

App Store


Google Play



2 Selecteren

Mijn metingen nemen

4 Om mijn bloeddruk door te geven

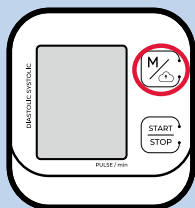

Druk op de knop



5 Uw gewicht aangeven



(weegschaal op een harde en stabiele vloer plaatsen)

EEN AFWEZIGHEID AANGEVEN

Selecteren

Een afwezigheid melden

Op de
startpagina



De reden van de
afwezigheid aangeven



Selecteer de data van
de afwezigheid en

Stuur mijn afwezigheid

3 Meet uw bloeddruk correct

In 4 stappen




- a. Ga zitten en doe de bloeddrukband om rond de **linkerarm**.
- b. Het **rode band** moet aan de binnenkant **van de elleboogploo**i worden geplaatst.
- c. Leg de linkerarm op een tafel, met de handpalm naar boven.

d. Druk op start

START
STOP

6 Beantwoord de vragen

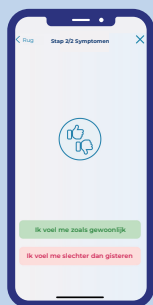

7



**Uw gegevens worden
bewaakt door uw
Newcard-verpleegkundige
en uw cardioloog.**



ONZE TIPS

Controleer of de batterijen in de weegschaal en de bloeddrukmeter aanwezig zijn.

Voor de bloeddruk, ga comfortabel zitten op een rustige plaats.

Rol/klap de manchet niet helemaal uit, schuif uw arm erin.

Plaats de manchet op uw arm, ter hoogte van uw hart.

Het rode merkteken moet in de plooï van uw elleboog zitten.

Voor de eerste meting, aarzel niet om uw familie, uw thuiszorgmedewerker of uw buurman/buurvrouw om hulp te vragen!



CONTACTEN



Telefoon

+32 78 48 16 93



E-mail

ic-be@newcard.io

**Bij medische noodsituatie,
bel 112**

MEER INFORMATIE



[http://26570142.hs-sites-eu1.com/
volledige-gebruikershandleiding](http://26570142.hs-sites-eu1.com/volledige-gebruikershandleiding)

**Wij danken u om de originele verpakking te bewaren om de kit
te vervoeren of naar ons terug te sturen.**

Dit medisch hulpmiddel van klasse I is een gezondheidsproduct dat, overeenkomstig deze regelgeving, het CE-markering (2019) draagt. Lees aandachtig de instructies in de gebruiksaanwijzing."

Gecreëerd door NEWCARD SAS - Laatste wijziging: 4 maart 2025 - Afgedrukt door: Pixartprinting

Niet op de openbare weg gooien – Referentie : MPC-NTU-APP-PAT-NL-BEL-00



Parc du Moulin
391 Av. Clément Ader
59118 Wambrechies
www.newcard.fr