

L'APPLICATION NEWCARD : TÉLÉCHARGER, CONNECTER, COMMENCER

Bienvenue dans votre guide simple et rapide pour démarrer avec Newcard !



1.

➤ Ouvrir l'Apple Store sur votre téléphone



➤ Rechercher NewCard dans la barre de recherche



➤ Télécharger l'application en cliquant sur


Obtenir

➤ Confirmer le téléchargement et ouvrir l'application

Ouvrir

OU

Prendre en photo
le QR code suivant :
Pour télécharger
l'application

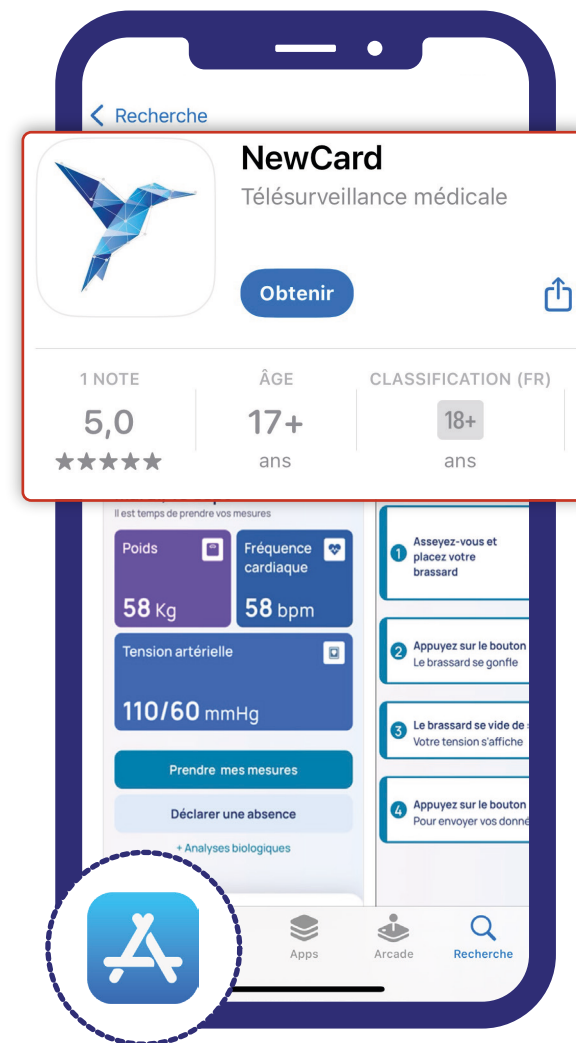


2.

> Cliquer sur :

Première connexion

pour commencer l'inscription

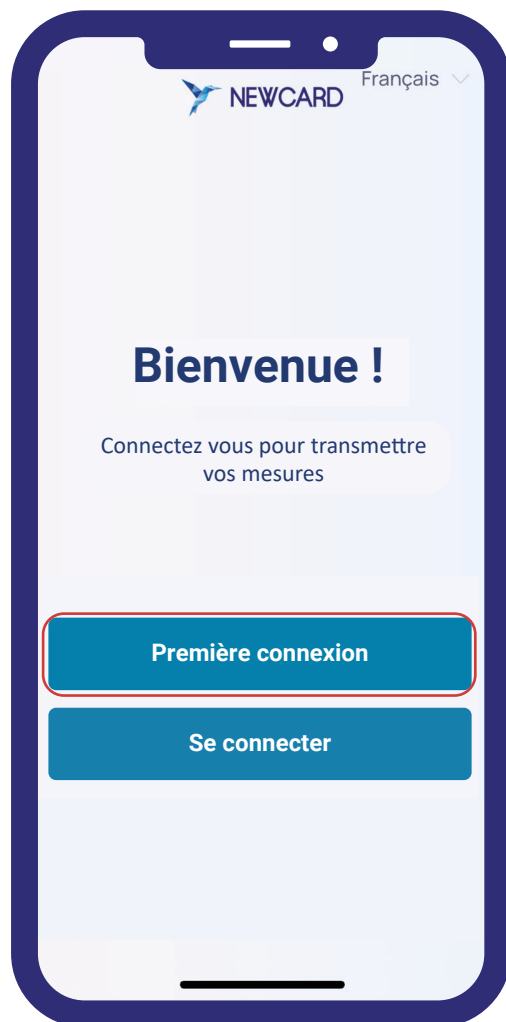

> Entrer votre identifiant :
7 caractères



Je note mon identifiant

.....

OU

Identifiant reçu par SMS :



NEWCARD

Félicitations Newcard est sur votre téléphone !
Cliquez sur Première connexion et écrivez votre
identifiant : **xxxxxxx**

3.

➤ Saisir le code de validation, 6 chiffres. Reçu par SMS

The diagram illustrates the process of entering a 6-digit validation code received via SMS into the Newcard app. It shows two states of the app interface and an incoming SMS notification.

SMS Notification:

- NEWCARD** (maintenant)
- Veuillez saisir le code suivant sur votre application Newcard: **248924**

App Interface (Left - Initial State):

- Étape 2/5
- Veuillez saisir le code**
- envoyé par SMS au +336*****11
- Pas votre numéro de téléphone ?
- Input field: [] [] [] [] [] []
- Recevoir un nouveau code
- Keypad: 1, 2 (ABC), 3 (DEF), 4 (GHI), 5 (JKL), 6 (MNO), 7 (PQRS), 8 (TUV), 9 (WXYZ), 0, and a backspace icon.

App Interface (Right - Code Entered State):

- < Retour
- Étape 2/5
- Veuillez saisir le code**
- envoyé par SMS au +336*****11
- Pas votre numéro de téléphone ?
- Input field: **2 4 8 9 2 4**
- Recevoir un nouveau code
- Keypad: 1, 2 (ABC), 3 (DEF), 4 (GHI), 5 (JKL), 6 (MNO)

A red dashed line connects the code **248924** in the SMS notification to the code entered in the app's input field.

4.


> Créer un mot de passe secret.
Il doit contenir :

- ✓ Au moins 8 caractères
- ✓ Au moins une majuscule
- ✓ Au moins un chiffre
- ✓ Au moins un caractère spécial
(ex : # ? ! @ \$ % ^ & * -)



Je note mon mot de passe

.....

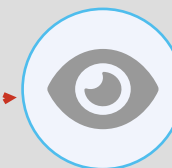

Astuce

Appuyer sur voir
pour afficher le
mot de passe.


Les 2 mots de
passe doivent être
identiques.

> Enregistrer le mot de passe en cliquant sur :

Enregistrer

5.

- Créer un code secret (PIN) à 4 chiffres

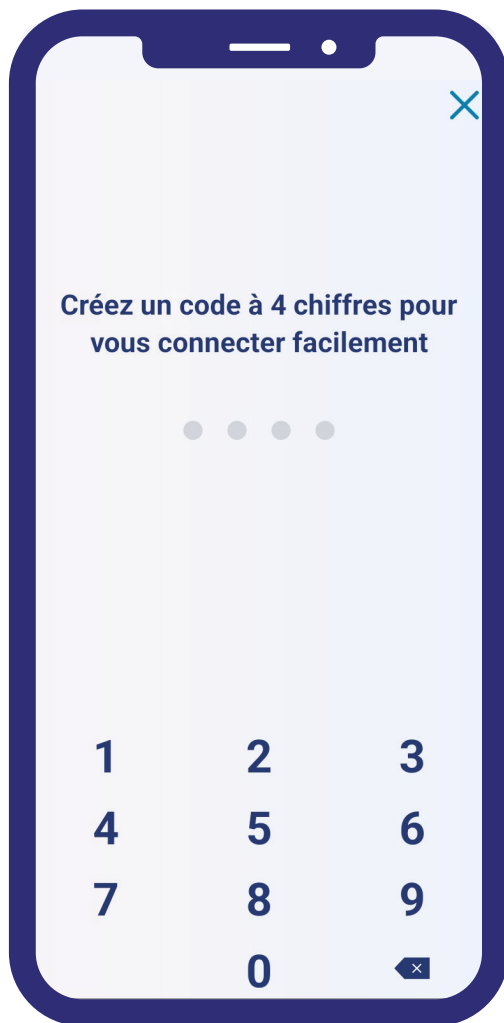

Je note mon code secret

.....

- Répétez le code à nouveau




Astuce

Utilisez le même
code secret que
celui de votre
téléphone

Félicitations, votre compte est crée !

6.

> Accepter les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

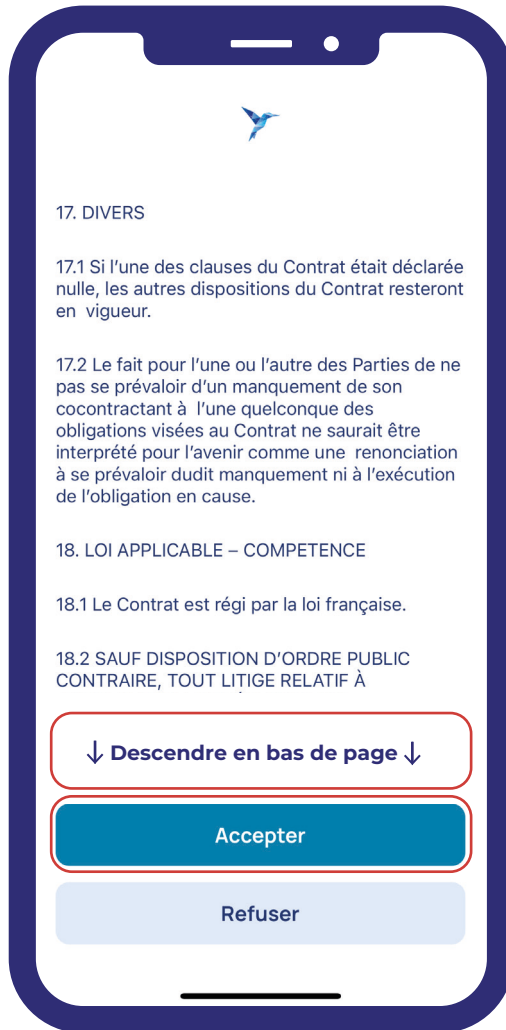

> Lire attentivement les Conditions Générales d'utilisation et descendre en bas de la page

1 ↓ Descendre en bas de page ↓

> Cliquer sur

2 Accepter
pour valider


7.

➤ Autoriser Newcard à utiliser le Bluetooth de votre téléphone




➤ Cliquer sur :

Accéder à mes paramètres

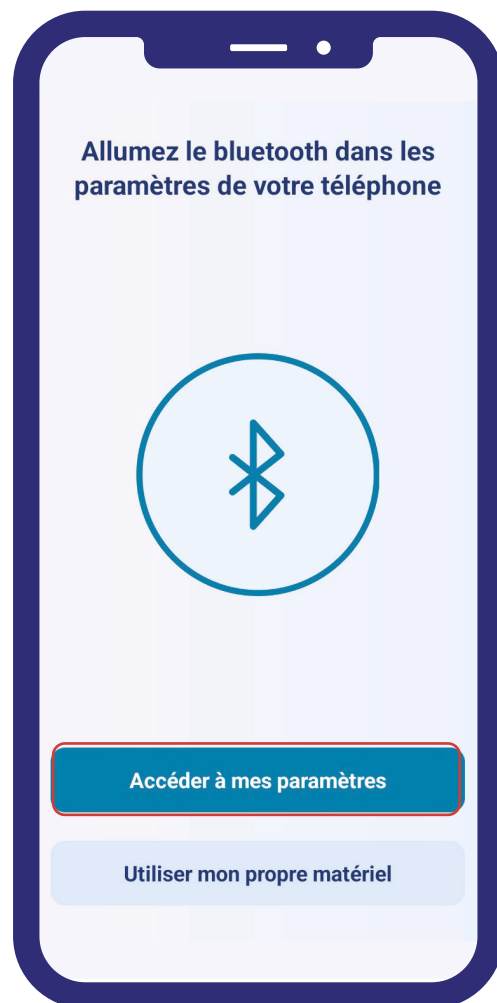

➤ Cliquer sur :

Autoriser

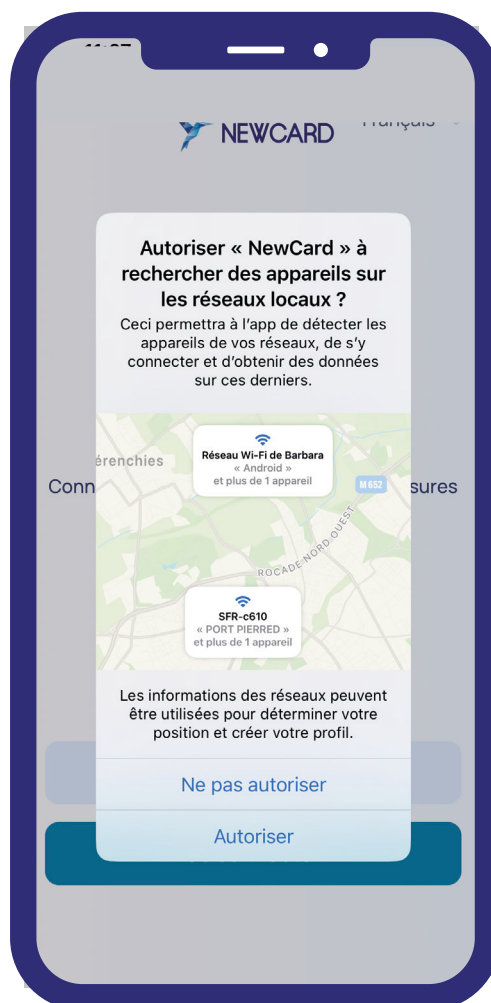

8.

➤ Prendre votre tensiomètre. Vérifier que les piles sont bien insérées




➤ Cliquer sur :

Continuer



➤ Appuyer sur le bouton du tensiomètre physique

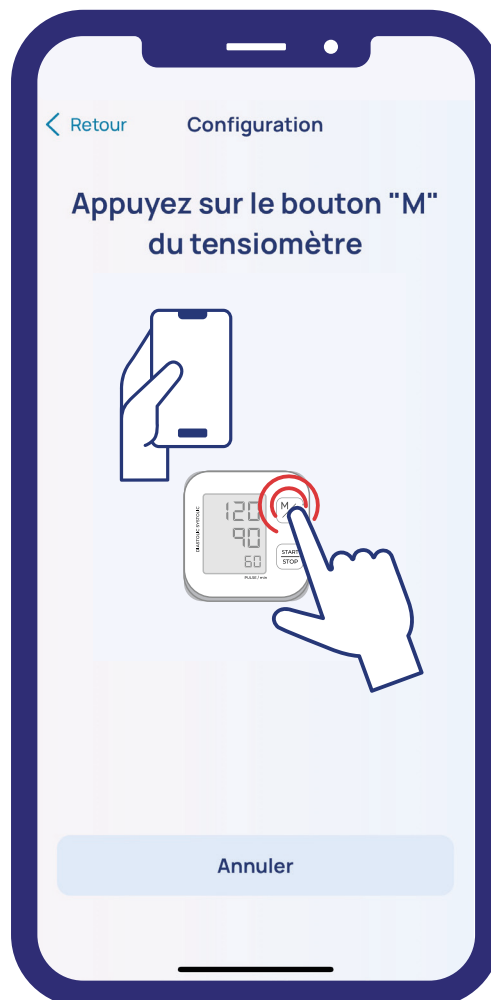

✓ **BRAVO !**
« Tensiomètre connecté avec succès »

Cliquer sur : Continuer



9.

➤ Prendre votre balance. Vérifier que les piles sont bien insérées



➤ Cliquer sur :

Connecter

➤ Connexion automatique





BRAVO !

« Balance connectée avec succès »

➤ Cliquer sur :

Terminer

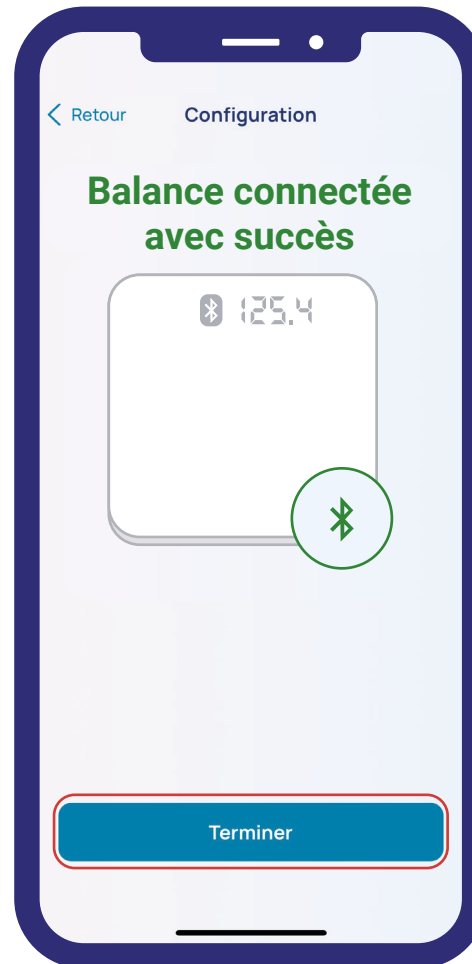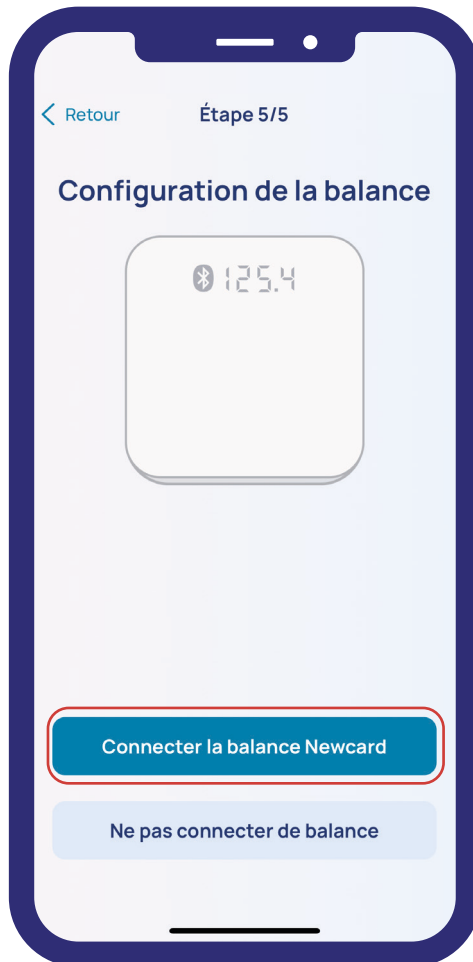

Félicitations, vous êtes prêts pour vos premières mesures !

| 10.

➤ Prendre vos mesures : Poids, tension et symptômes

➤ Cliquer sur : **Prendre mes mesures**




**Besoin
d'aide ?**

N'hésitez pas à
demander à vos
proches, votre aide
à domicile ou votre
voisin.

| 11.

➤ En cas de fermeture de l'application
cliquer sur : **Se connecter**

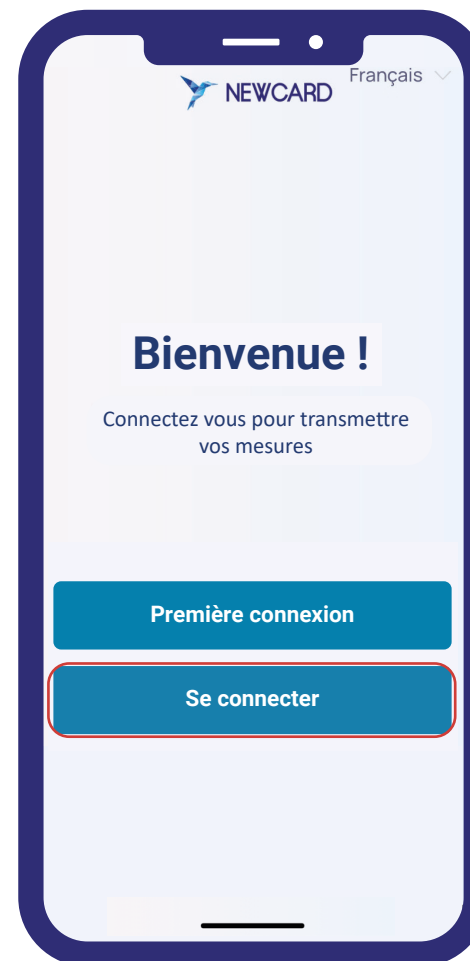

Utilisez :

➤ Code secret

OU

➤ Identifiant +
Mot de passe



Téléphone :
03 20 14 71 14



1 Minute pour mon cœur :
cardio@newcard.io



1 Minute pour mes reins :
nephro@newcard.io