



NEWCARD


Medische telebewaking



1 MINUTE POUR *mon cœur*

(1 Minuut voor mijn Hart)

Snelle gebruiksgids

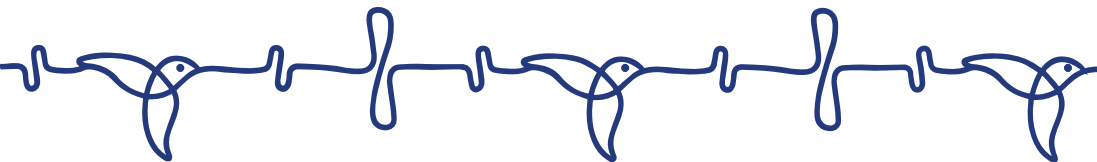

Belgique - NL



Tablette



Tensiomètre

UW METINGEN OPNEMEN

In 1 minuut tijd

1 De tablet aanzetten




Selecteer de Newcard-app

2 Selecteren

Mijn metingen nemen

4 Om mijn bloeddruk door te geven

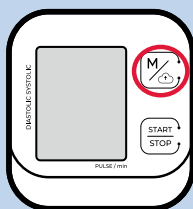

Druk op de knop



5 Uw gewicht aangeven



(weegschaal op een harde en stabiele vloer plaatsen)

EEN AFWEZIGHEID AANGEGEVEN

Selecteren

Een afwezigheid melden

Op de startpagina



De reden van de afwezigheid aangeven



Selecteer de data van de afwezigheid en

Stuur mijn afwezigheid



Rol de manchet niet volledig uit, schuif je arm erin.

3 Meet uw bloeddruk correct

In 4 stappen



- Ga zitten en doe de bloeddrukband om rond de **linkerarm**.
- Het **rode band** moet aan de binnenkant **van de elleboogplooi** worden geplaatst.
- Leg de linkerarm op een tafel, met de handpalm naar boven.

d. Druk op start



6 Beantwoord de vragen



7 Uw gegevens verzenden



8



Uw gegevens worden bewaakt door uw Newcard-verpleegkundige en uw cardioloog.



ONZE TIPS

- Controleer of de batterijen in de weegschaal en de bloeddrukmeter aanwezig zijn.
- Voor de bloeddruk, ga comfortabel zitten op een rustige plaats.
- Rol/klap de manchet niet helemaal uit, schuif uw arm erin.
- Plaats de manchet op uw arm, ter hoogte van uw hart.
- Het rode merkteken moet in de plooi van uw elleboog zitten.

Voor de eerste meting, aarzel niet om uw familie, uw thuiszorgmedewerker of uw buurman/buurvrouw om hulp te vragen !



CONTACTEN



Telefoon

+32 78 48 16 93



E-mail

ic-be@newcard.io

**Bij medische noodsituatie,
bel 112**

MEER INFORMATIE



[http://26570142.hs-sites-eu1.com/
volledige-gebruikershandleiding](http://26570142.hs-sites-eu1.com/volledige-gebruikershandleiding)

**Wij danken u om de originele verpakking te bewaren om de kit
te vervoeren of naar ons terug te sturen.**

Dit medisch hulpmiddel van klasse I is een gezondheidsproduct dat, overeenkomstig deze regelgeving, het CE-markering draagt. Lees aandachtig de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Gecreëerd door NEWCARD SAS - Laatste wijziging: **10 juni 2026** - Afgedrukt door: Référence Directe

Niet op de openbare weg gooien – Referentie : MPC-NTU-PAT-NL-BEL-01.



Parc du Moulin
236 Av. Clément Ader
59118 Wambrechies
www.newcard.fr