


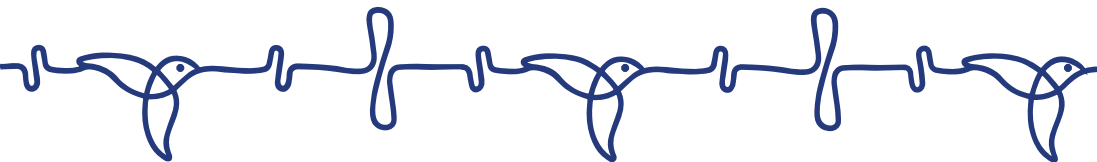

1 MINUTE POUR *mon cœur*

(1 Minuut voor mijn Hart)

Snelle gebruiksgids



UW METINGEN OPNEMEN

In 1 minuut tijd

1 Zet de tablet aan



Selecteer de Newcard-app

2 Selecteren

Mijn metingen nemen

3 Uw gewicht aangeven



(weegschaal op een harde en stabiele vloer plaatsen)

4 Beantwoord de vragen



5



Uw gegevens worden bewaakt door uw Newcard-verpleegkundige en uw cardioloog.

EEN AFWEZIGHEID AANGEVEN

Selecteren

Een afwezigheid melden

Op de
startpagina

A diagram showing three selection options for the reason of absence. The first two are 'Ziekenhuisopname voor het hart' (with a heart icon) and 'Andere ziekenhuisopname' (with a plus icon). The third is 'Persoonlijke reden' (with a person icon). Arrows indicate a flow from the first two options to the third.

De reden van de
afwezigheid aangeven

A diagram showing the selection of dates for absence. It includes fields for 'van' (from) and 'bij' (until), with calendar icons. The dates shown are 27/09/2023 and 04/10/2023. There is also an 'optioneel' (optional) field. A button at the bottom says 'Stuur mijn afwezigheid'.

Selecteer de data van
de afwezigheid en

Stuur mijn afwezigheid



ONZE TIPS

- Controleer of de batterijen in de weegschaal zitten.
- De weegschaal moet op een harde en stabiele vloer worden geplaatst.
- Als de batterij van je tablet leeg is, sluit deze dan met de oplader aan op een stopcontact.

Voor de eerste meting, aarzel niet om uw familie, uw thuiszorgmedewerker of uw buurman/buurvrouw om hulp te vragen!



CONTACTEN



Telefoon

+32 78 48 16 93



E-mail

ic-be@newcard.io

**Bij medische noodsituatie,
bel 112**

MEER INFORMATIE



<https://26570142.hs-sites-eu1.com/nl-be/patient-1-minute-pour-mon-coeur-st>

Wij danken u om de originele verpakking te bewaren om de kit te vervoeren of naar ons terug te sturen.

Dit medisch hulpmiddel van klasse I is een gezondheidsproduct dat, overeenkomstig deze regelgeving, het CE-markering draagt. Lees aandachtig de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Gecreëerd door NEWCARD SAS - Laatste wijziging: 10 juni 2026 - Afgedrukt door: Référence Directe

Niet op de openbare weg gooien – Referentie : MPC-NTU-PAT-ST-NL-BEL-00



Parc du Moulin
236 Av. Clément Ader
59118 Wambrechies
www.newcard.fr